



1

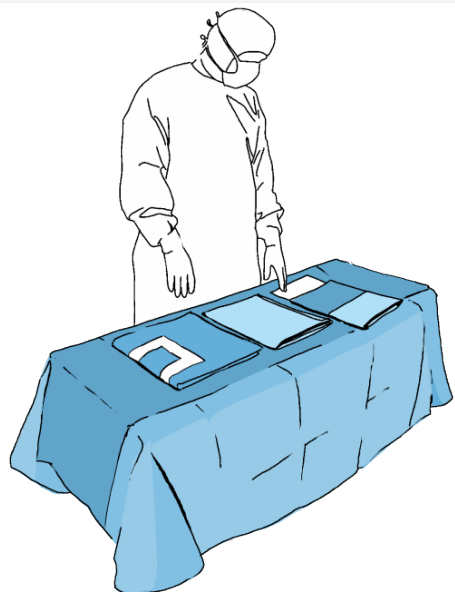


Otworzyć opakowanie zewnętrzne zachowując przy tym zasady aseptyki i wyjąć zestaw na stół do instrumentarium. Rozłożyć zewnętrzną serwetkę na stole do instrumentarium, a na niej poszczególne elementy zestawu.

2

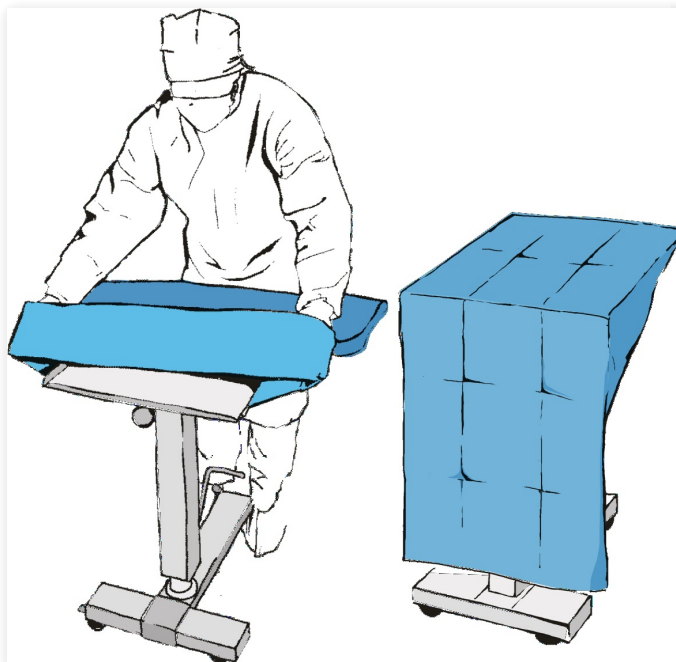

Nałożyć osłonę na stolik Mayo.


3

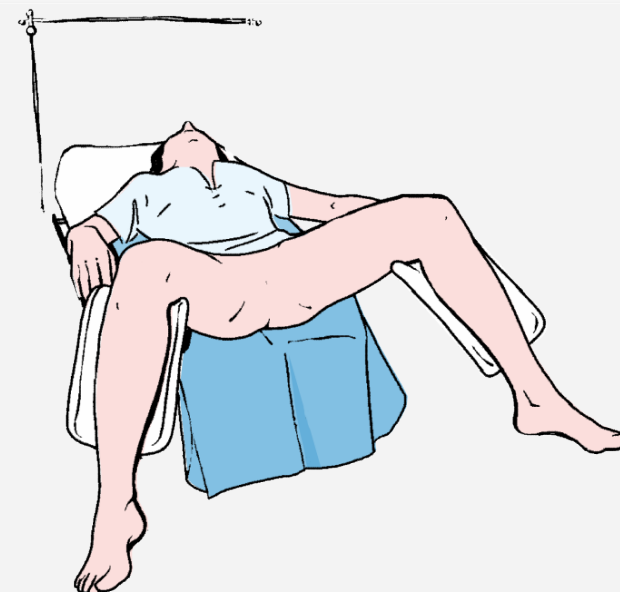

Pod pośladki ułożonej w pozycji ginekologicznej pacjentki podłożyć mniejszą serwetkę.

Rozkładanie zestawu do ginekologii Matodrape

4

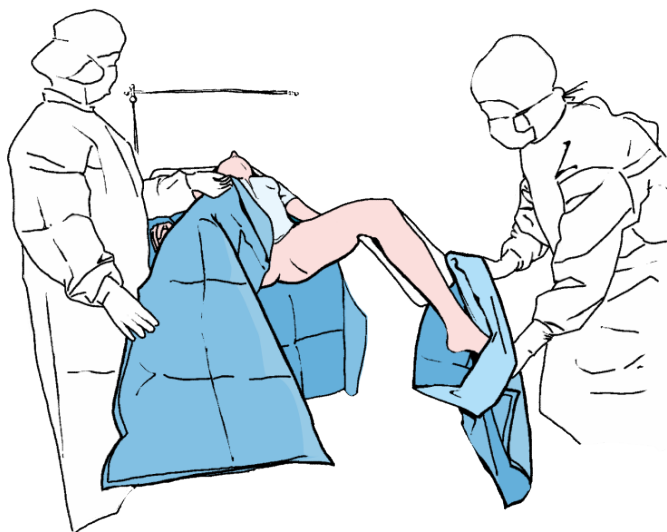


Na nogi pacjentki nasunąć pokrowce z mankietem.

5




Przed rozpoczęciem zabezpieczania pacjentki (wyznaczania pola operacyjnego) zwrócić uwagę na kierunek rozkładania obłożenia wykorzystując, w tym celu umieszczone na serwetce piktogramy.

6

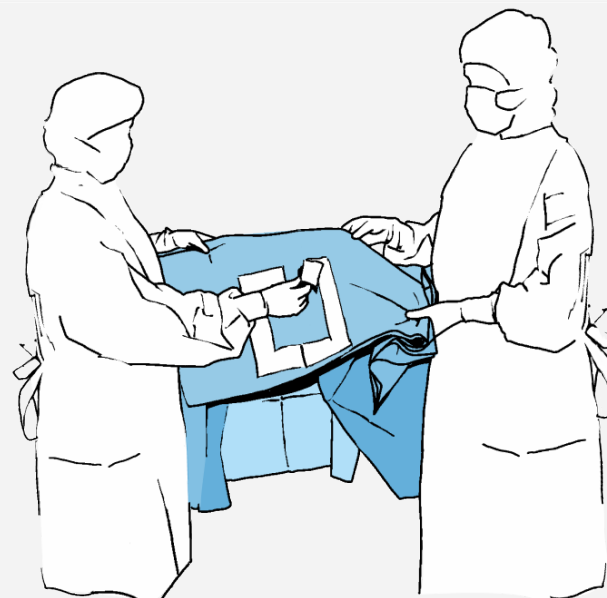


Usunąć papier zabezpieczający z otworu serwety głównej.

7

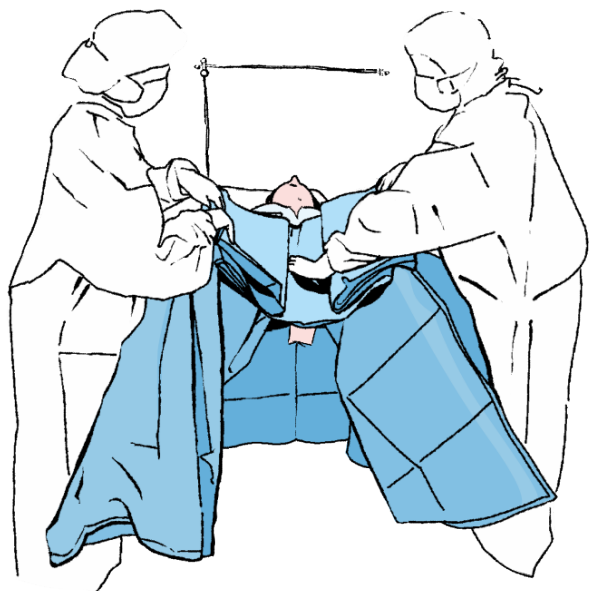

Przykleić obłożenie wyznaczając tym samym pole operacyjne. Następnie docisnąć w miejscu przyklejenia obłożenia w celu zwiększenia przyczepności taśmy przylepnej do skóry pacjentki.

8

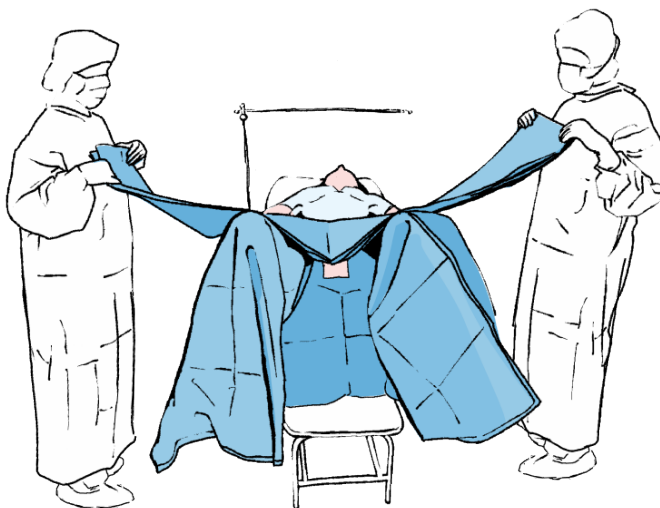

Rozwinąć boki obłożenia tak by swobodnie zwisały ze stołu operacyjnego, a następnie rozwinąć górną część obłożenia w kierunku głowy pacjentki (w kierunku stanowiska anestezyjologicznego).

9



Przełożyć obłożenie przez ramkę, tworząc tym samym ekran anestezyjologiczny. Dolną część obłożenia rozwinąć w kierunku dolnego krańca stołu operacyjnego, częściowo między nogami pacjentki.