

Przykład zestawu do odłączenia dializy MA-991-ZEST-488.

1



Przed zakończeniem procedury należy umyć ręce (specjalista).

2



Należy otworzyć set do zakończenia procedury.

3



Założyć jedną rękawicę pacjentowi.


Aplikacja zestawu do odłączenia dializy Matoset

4




Następnie specjalista zakłada obydwie rękawice.

5

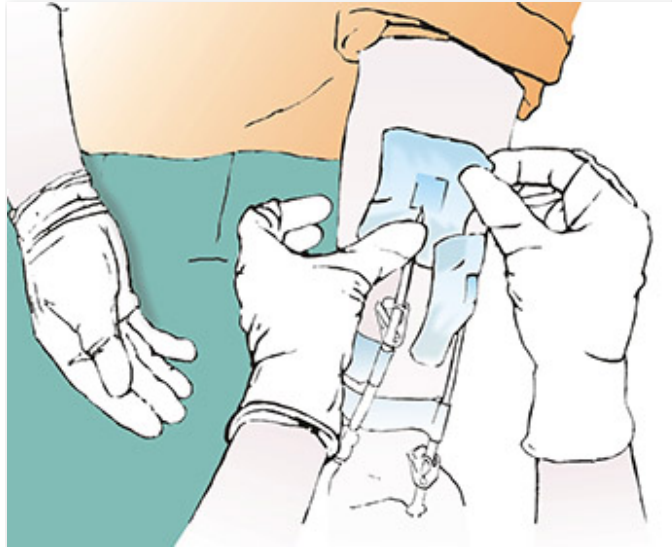


Kolejno usunąć kaniule, korzystając przy tym z pomocy pacjenta do podtrzymania kompresu w celu zabezpieczenia wkluc kompresami.

6

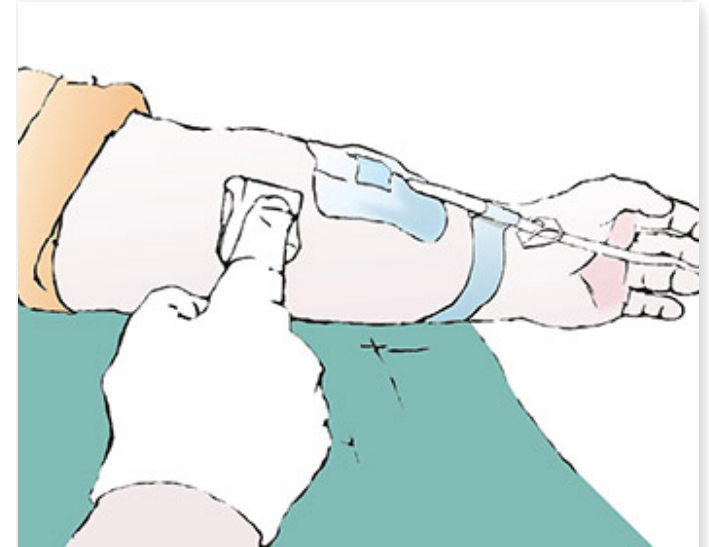

»

7

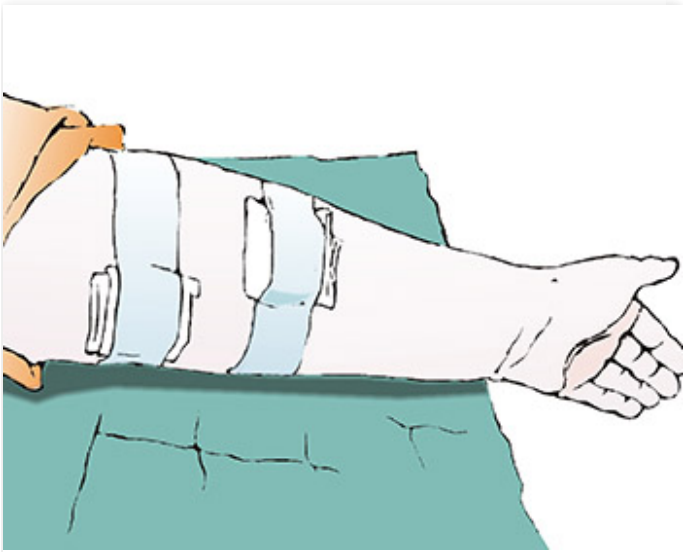

Po usunięciu obu kaniul wkłucia należy zabezpieczyć opatrunkami z kompresów włókninowych i przylepców.