

Przykład zestawu do podłączenia dializy MA-991-ZEST-487.

1




Przed rozpoczęciem procedury należy umyć ręce (specjalista i pacjent).

2



Do wykonania procedury należy przygotować środek dezynfekcyjny, stazę (zacisk), odpowiednie kaniule oraz sety do rozpoczęcia i zakończenia procedury.

3

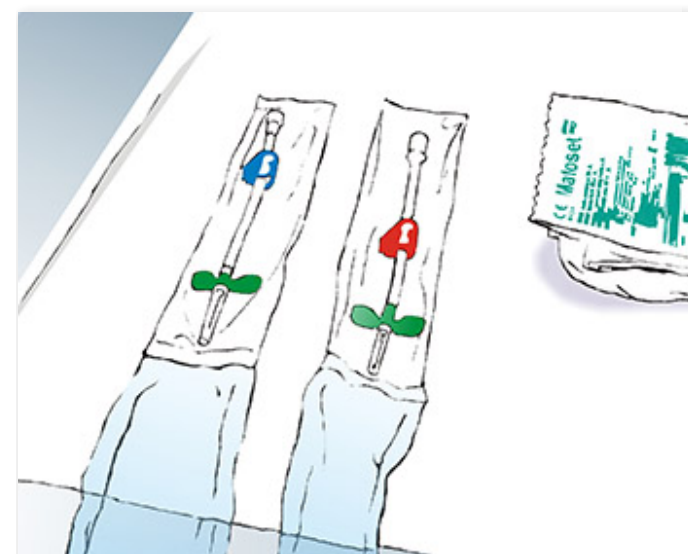


Należy otworzyć opakowania kaniul oraz set do rozpoczęcia dializy i założyć pacjentowi stazę ale bez zaciskania.

Aplikacja zestawu do podłączenia dializy Matoset

4



5

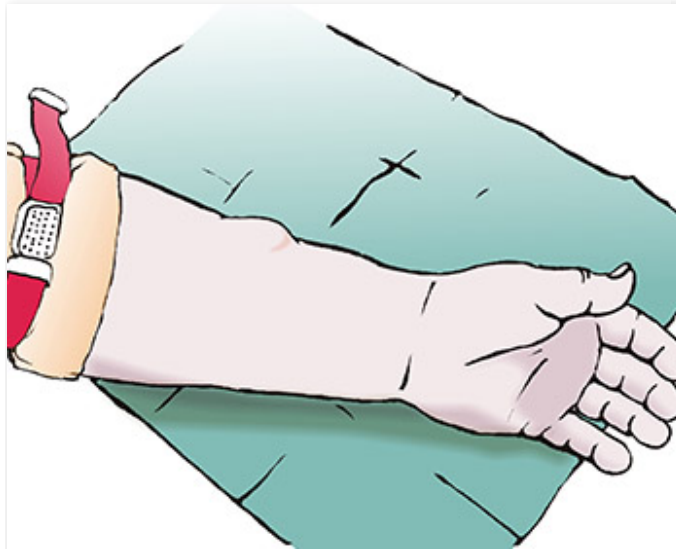

Wyjąć jałową serwetę i podłożyć pod przedramię pacjenta.

6



Następnie należy założyć rękawicę na lewą rękę, a drugą odłożyć na jałową część otwartego opakowania.

Aplikacja zestawu do podłączenia dializy Matoset

7



Zdezynfekować przedramię pacjenta używając płynu do dezynfekcji oraz jałowych kompresów z zestawu.

8




»

9



»

10

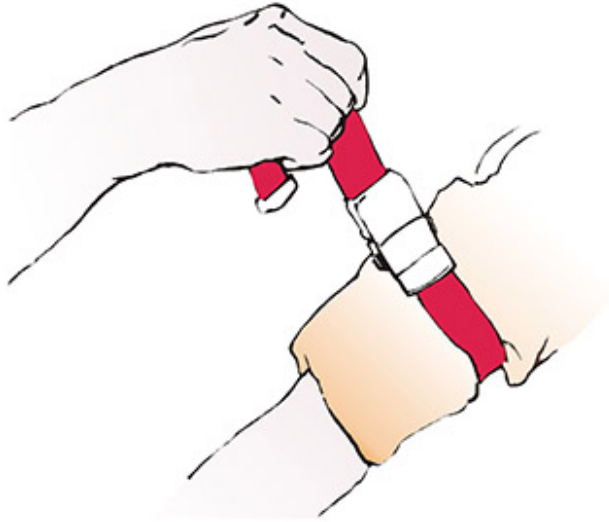


Zacisnąć stażę.

11



Założyć prawą rękawicę.


12

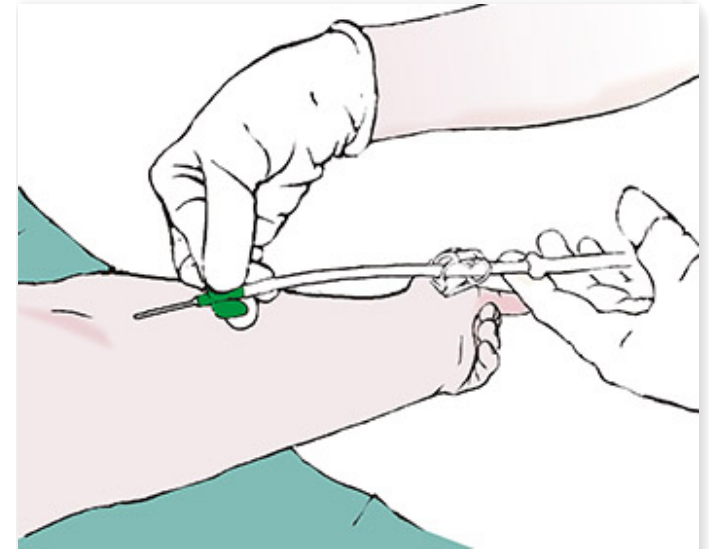

Wkłuć kaniule.


Aplikacja zestawu do podłączenia dializy Matoset

13

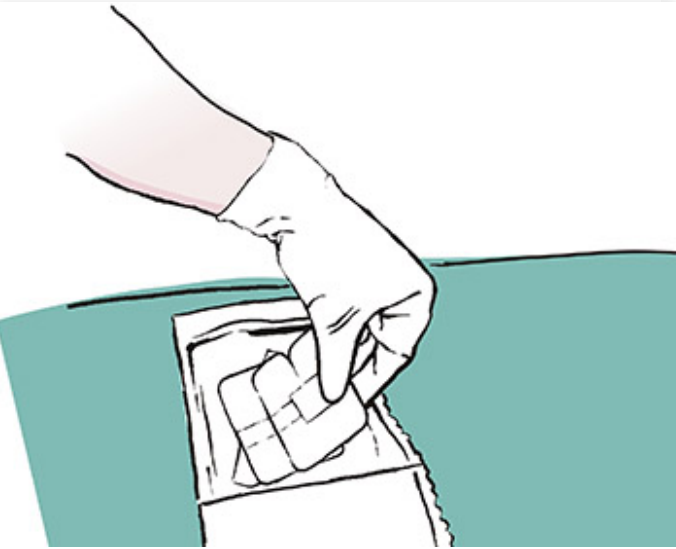


Po wkłuciu każdej kaniuli należy je umocować specjalnymi opatrunkami do mocowania kaniul.

14

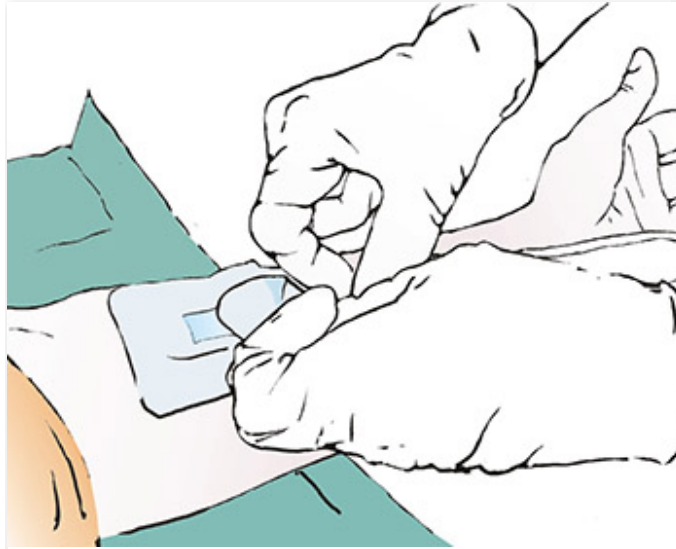


15

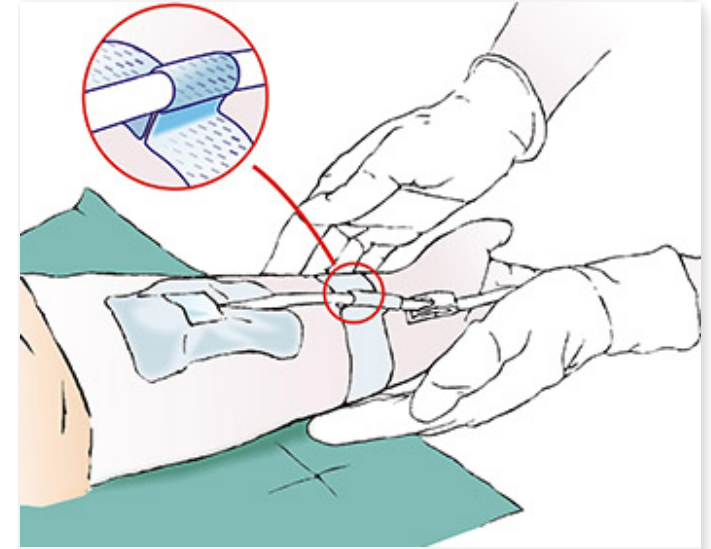

Na końcu zabezpieczyć przewody kaniul przylepcami włókninowymi.

16

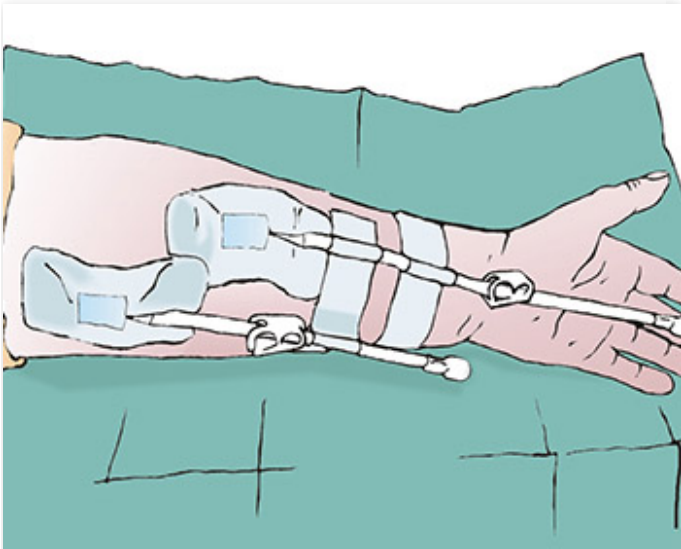

Następnie pacjenta podłącza się do „sztucznej nerki”.
Dializa trwa 3-4 godziny.