



Camera Cover jest używana do ochrony urządzeń medycznych podczas zabiegów chirurgicznych. Jest uniwersalną osłoną dla wszystkich kamer i endoskopów. Zabezpiecza ona środowisko sali operacyjnej przed skażeniem i stanowi kompletną barierę sterylną. Chroni również urządzenia medyczne przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Elastyczność i miękkość materiału pozwala na łatwą manipulację podczas zabiegu.

1

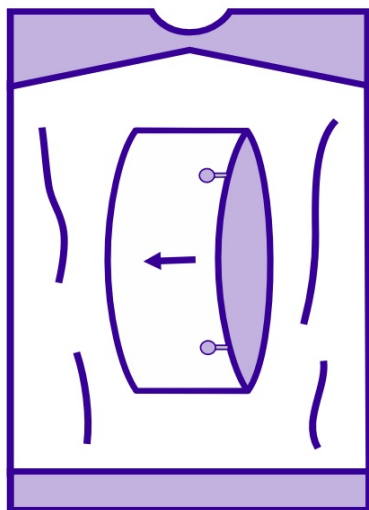


Otwórz opakowanie papierowo-foliowe poprzez oderwanie folii od papieru w miejscu, gdzie zgrzew ma kształt litery V, a następnie wyjmij osłonę.

2

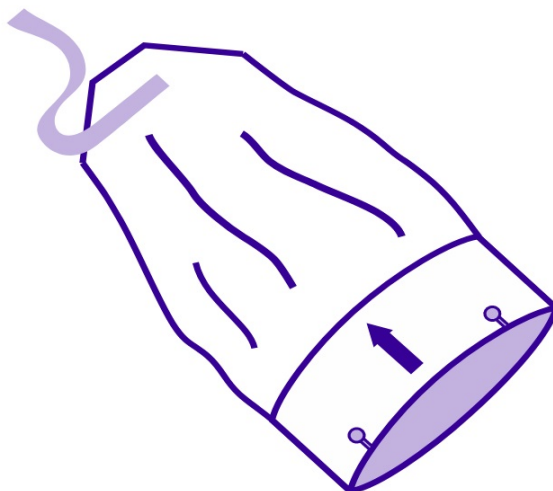

Po wyjęciu osłony z opakowania lekko wysuń część foliową rękawa zaopatrzoną w kolorową taśmę.


3

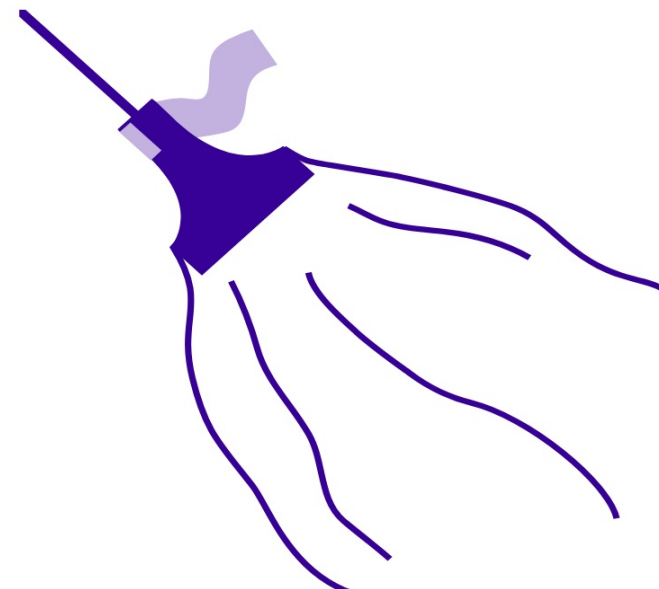

Jałową optykę umieść w wyciętym w kształcie stożka otworze przedniej części osłony i przymocuj za pomocą kolorowej samoprzylepnej taśmy, z której należy odkleić pasek zabezpieczający.


Etapy zakładania foliowej osłony Camera Cover

4

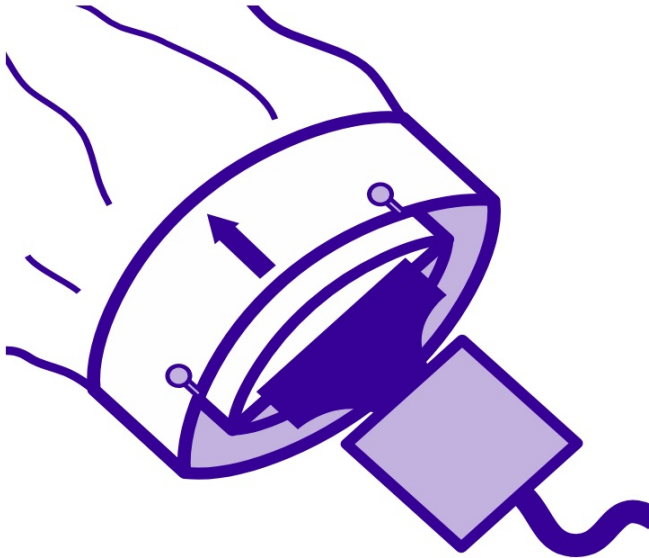


Przełóż głowę kamery przez kartonowy pierścień zewnętrzny w kierunku zaznaczonym strzałką.

5

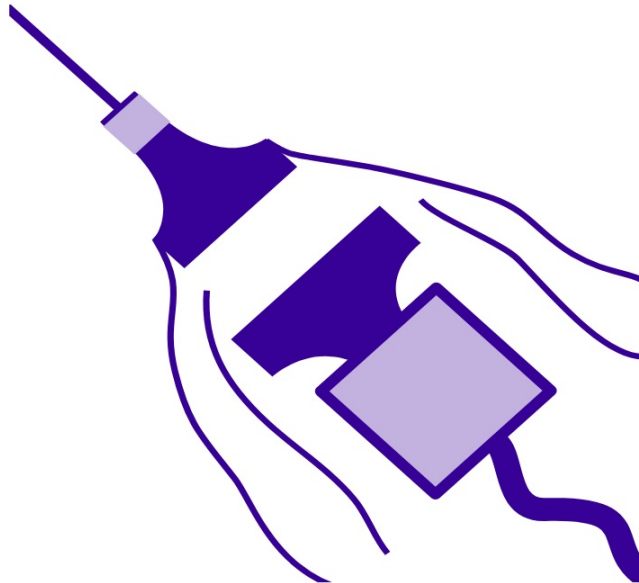


Połącz optykę z kamerą wewnątrz osłony.

6

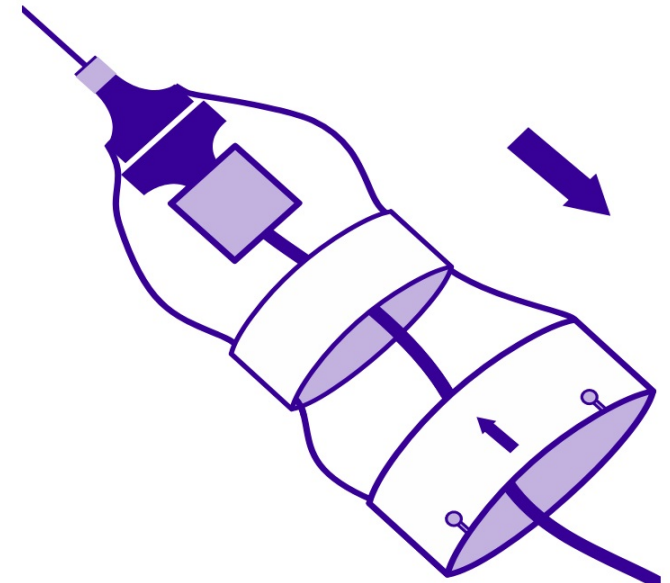


Foliową osłonę rozciągnij na całej długości przewodu.

7

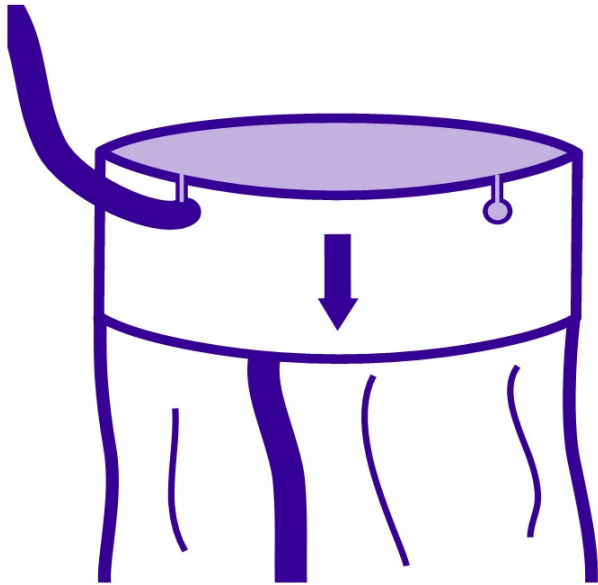

Umocuj przewód w wyciętych otworach w zewnętrznym kartonowym pierścieniu.

8

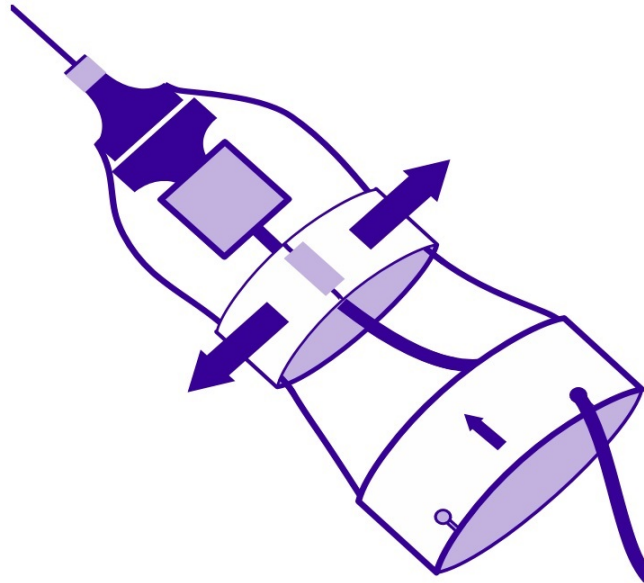

Po rozciągnięciu osłony, wewnętrzny pierścień można zdjąć (poprzez przerwanie przylepca łączącego) i wyrzucić.