


1

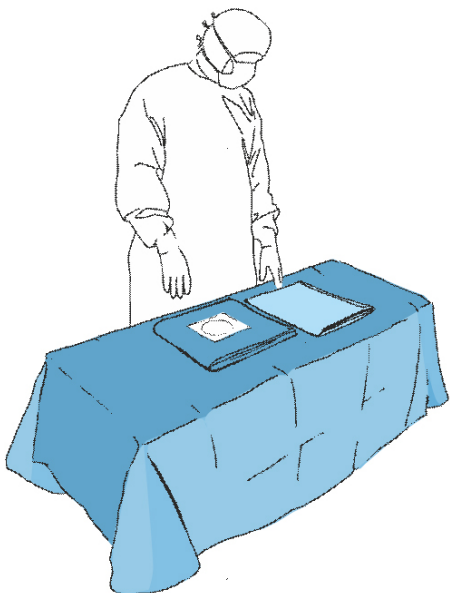


Otworzyć opakowanie zewnętrzne zachowując przy tym zasady aseptyki i wyjąć zestaw na stół do instrumentarium. Rozłożyć zewnętrzną serwetę na stole do instrumentarium, a na niej poszczególne elementy zestawu.

2



Przed rozpoczęciem zabezpieczania pacjenta zwrócić uwagę na kierunek rozkładania obciążenia wykorzystując, w tym celu umieszczone na serwetce piktogramy.


3

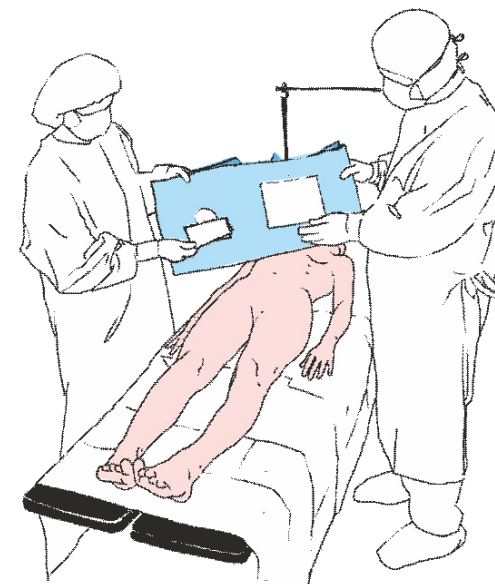

Usunąć papier zabezpieczający z wybranego otworu serwetki głównej (drugi otwór pozostaje zasłonięty).


# Rozkładanie zestawu do angiografii Matodrape

4

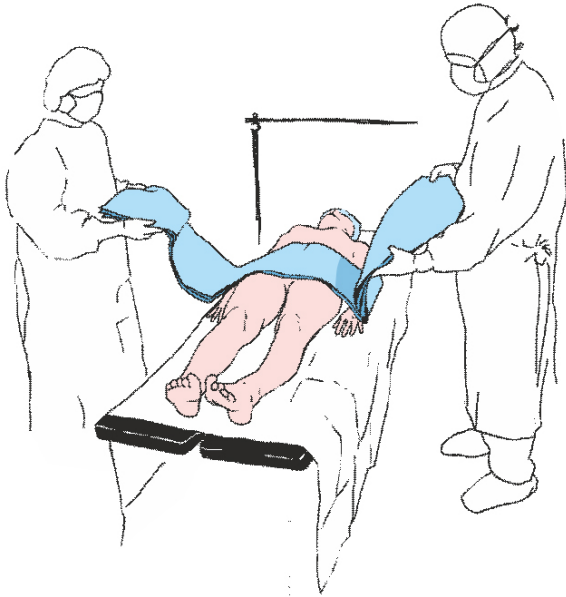

Częściowo rozłożyć serwetę główną na pacjenta (wyznaczania pola operacyjnego) przyklejając otwór roboczy w odpowiednim miejscu pola operacyjnego i położyć obłożenie na pacjencie wyznaczając tym samym pole operacyjne.

5

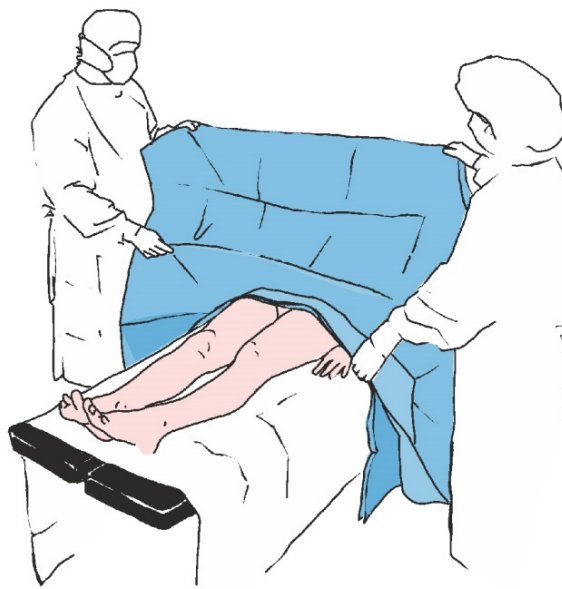


Rozwinąć boki obłożenia tak by swobodnie zwiślały ze stołu operacyjnego, a następnie rozwinąć górną część obłożenia w kierunku stanowiska anestezjologicznego.

6




Rozwinąć dolną część obłożenia w kierunku dolnego krańca stołu operacyjnego zabezpieczając kończyny dolne pacjenta.

7

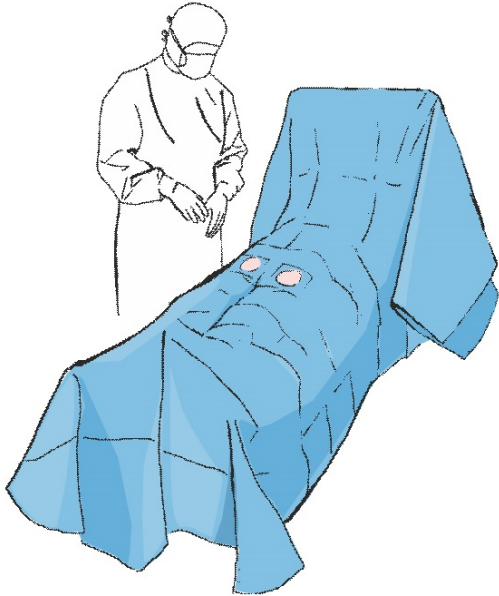

Na ekran anestezyjologiczny nałożyć mniejszą serwetkę oddzielającą głowę pacjenta od pola operacyjnego.

8

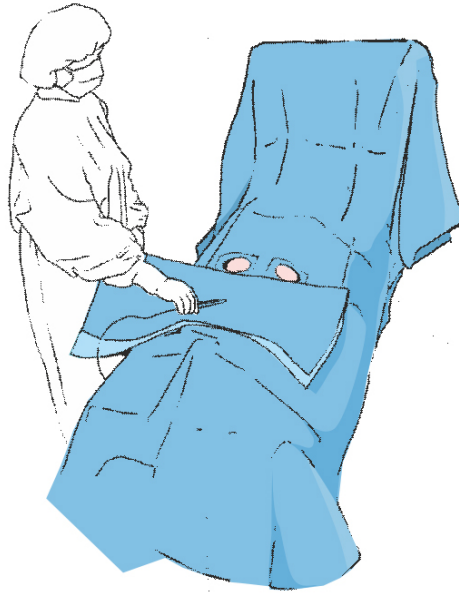

Na koniec położyć na pacjencie kolejną serwetkę.