



1

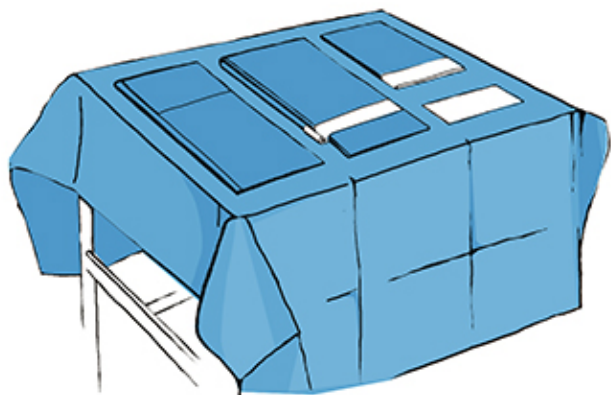

Po otwarciu opakowania połóż obłożenie na stole do instrumentarium. Zewnętrzną serwetą zabezpiecz stół oraz pozostałe elementy. Rozłóż elementy na stole i zwróć uwagę na piktogramy na serwetach oznaczające miejsce aplikacji.

2

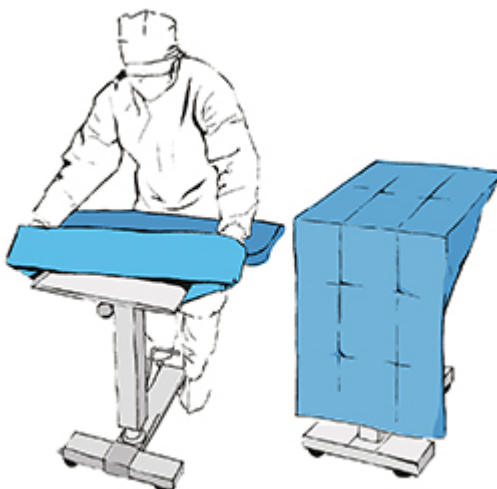

Nasuń pokrowiec w postaci worka na stolik Mayo.


3



Założ pokrowiec na nogę pacjenta i umocuj go pod kolanem taśmami samoprzylepnymi.

Rozkładanie zestawu do artroskopii kolana Matodrape

4

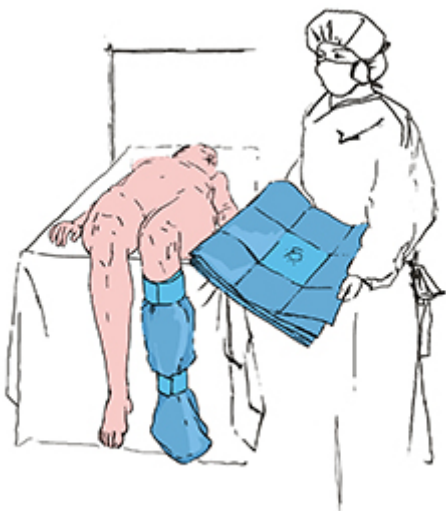


Rozłóż serwetę złożoną na pół. Serweta jest złożona w taki sposób, że otwór z elementem elastycznym jest od razu widoczny.

5



Rozłóż serwetę w górę ciała pacjenta przekładając nogę w pokrowcu przez elastyczne otwory. Umocuj dolny otwór tuż pod kolanem tak by kolano znalazło się między otworami.

6

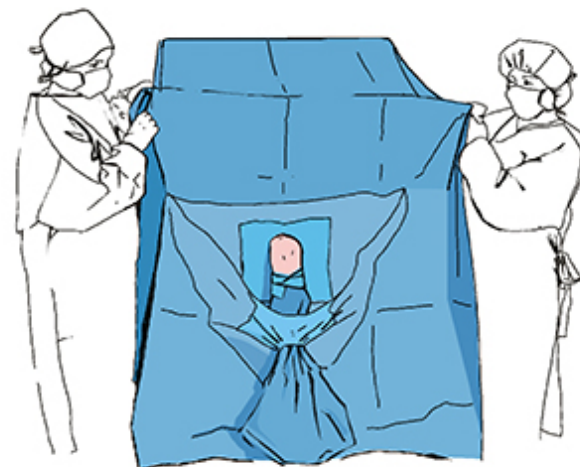

Rozłóż pozostałą część serwety przykrywając całego pacjenta. Od strony głowy umocuj serwetę do ekranu anestezjologicznego za pomocą przylepców na rogach serwety.