


1



Otworzyć opakowanie zewnętrzne zachowując przy tym zasady aseptyki i wyjąć zestaw na stół do instrumentarium. Rozłożyć zewnętrzną serwetę na stole do instrumentarium, a na niej poszczególne elementy zestawu.

2

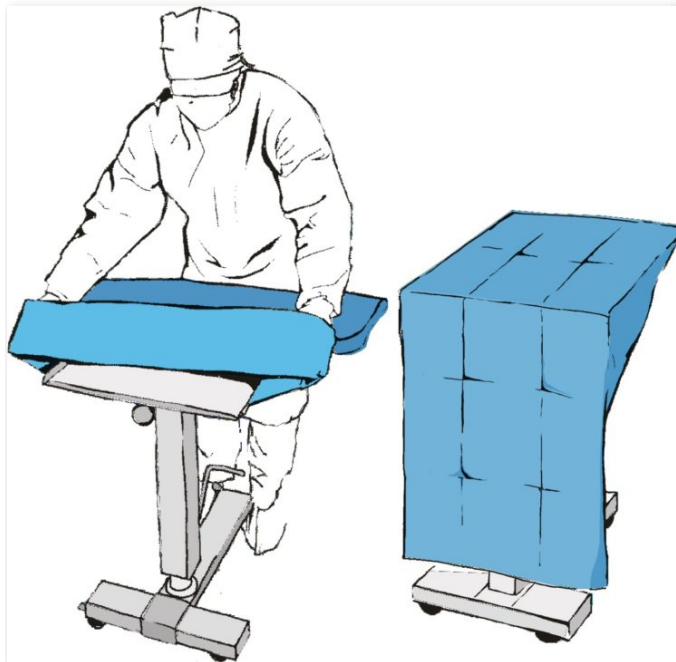

Nasań pokrowiec w postaci worka na stolik Mayo.


3



Przed rozpoczęciem zabezpieczania pacjenta zwrócić uwagę na kierunek rozkładania obłożenia wykorzystując, w tym celu umieszczone na serwetach piktogramy.


Rozkładanie zestawu do by-pass Matodrape

4

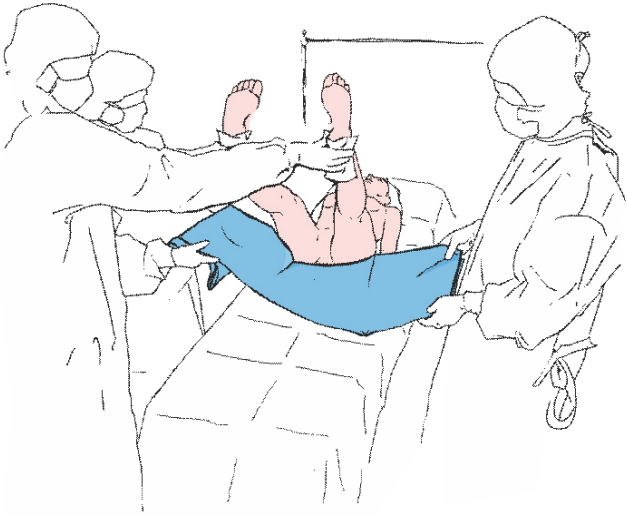


Unieść do góry kończyny dolne pacjenta wykorzystując do tego celu załączone do zestawu ręczniki. Pod uniesione nogi podłożyć serwetę z okryciem na krocze.

5

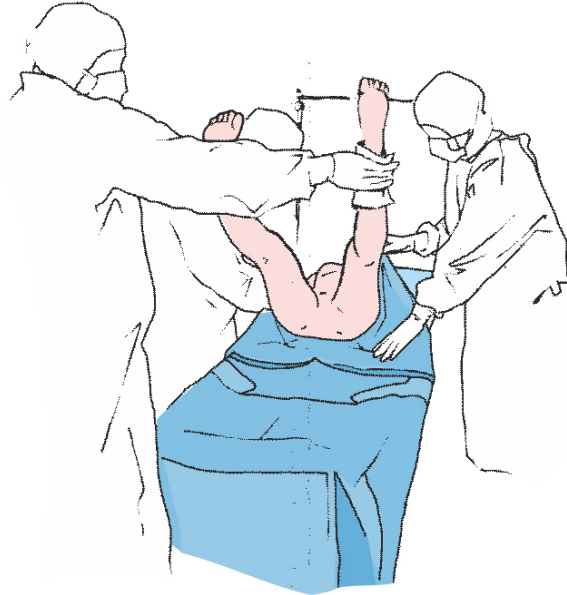

Rozłożyć serwetę w kierunku dolnego krańca stołu operacyjnego.


6

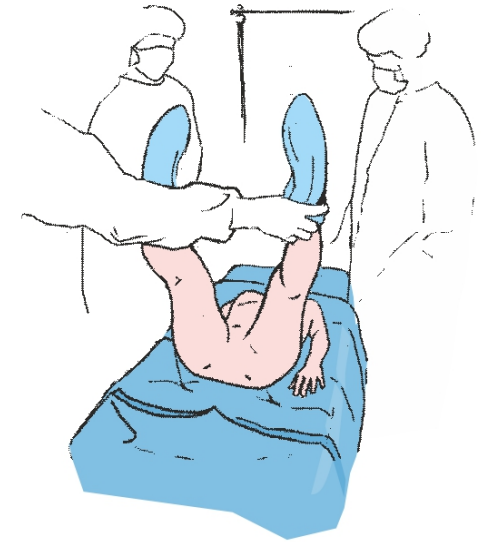

Nałożyć pokrowce na nogi pacjenta dokładnie mocując je w okolicach stawów skokowych.

Rozkładanie zestawu do by-pass Matodrape

7

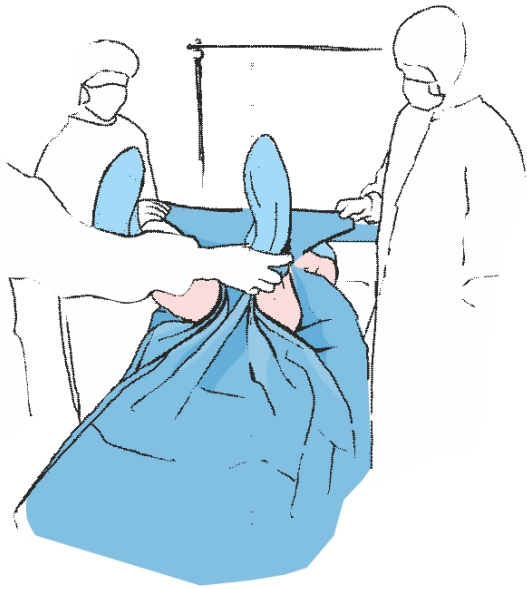


Przełożyć osłonę na krocze między udami pacjenta...

8




...usunąć papier zabezpieczający i przykleić ją do podbrzusza.

9

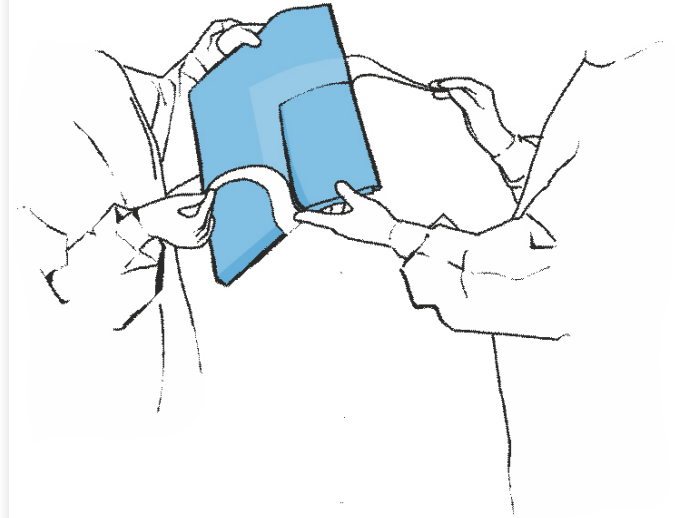


Usunąć papier zabezpieczający z otworu w drugiej serwecie głównej.

10

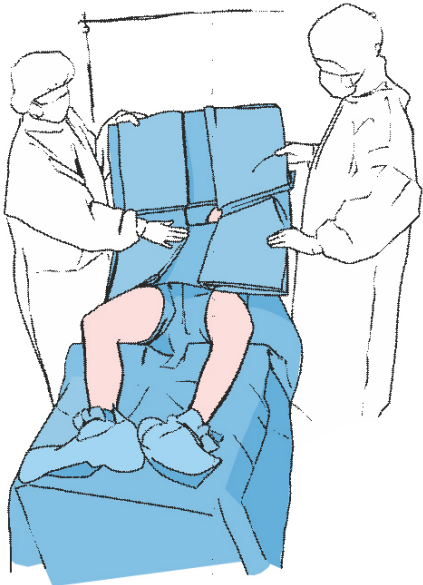


Przykleić obłożenie do klatki piersiowej wyznaczając tym samym pole operacyjne. Następnie docisnąć w miejscu przyklejenia obłożenia w celu zwiększenia przyczepności taśmy przylepnej do skóry pacjenta.

11

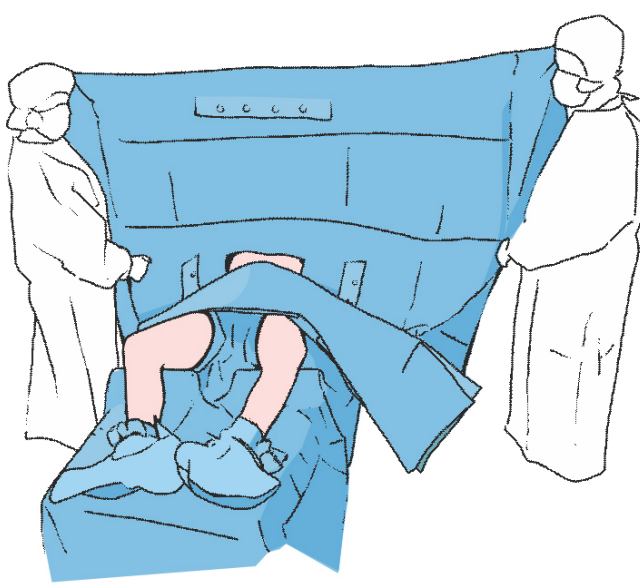


Rozwinąć boki obłożenia tak by swobodnie zwiślały ze stołu operacyjnego, a górną część obłożenia przełożyć przez ramkę lub zamocować na stojakach, tworząc tym samym ekran anestetyczny.

12

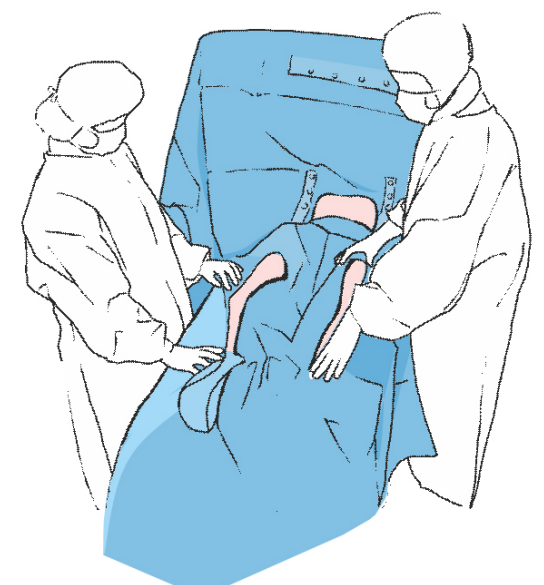

Rozwinąć dolną część obłożenia w kierunku dolnego krańca stołu operacyjnego wyznaczając granice pola operacyjnego za pomocą dwóch podłużnych otworów.

13

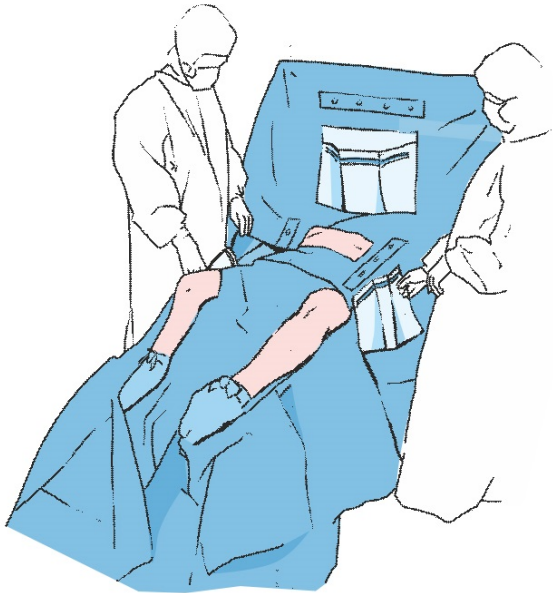

Na koniec mocujemy do obłożenia kieszenie foliowe odklejając taśmę zabezpieczającą z warstwy klejącej.