



1

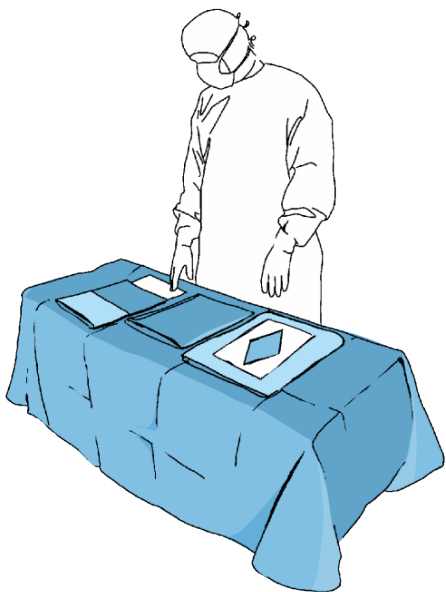


Otworzyć opakowanie zewnętrzne zachowując przy tym zasady aseptyki i wyjąć zestaw na stół do instrumentarium. Rozłożyć zewnętrzną serwetkę na stole do instrumentarium, a na niej poszczególne elementy zestawu.

2

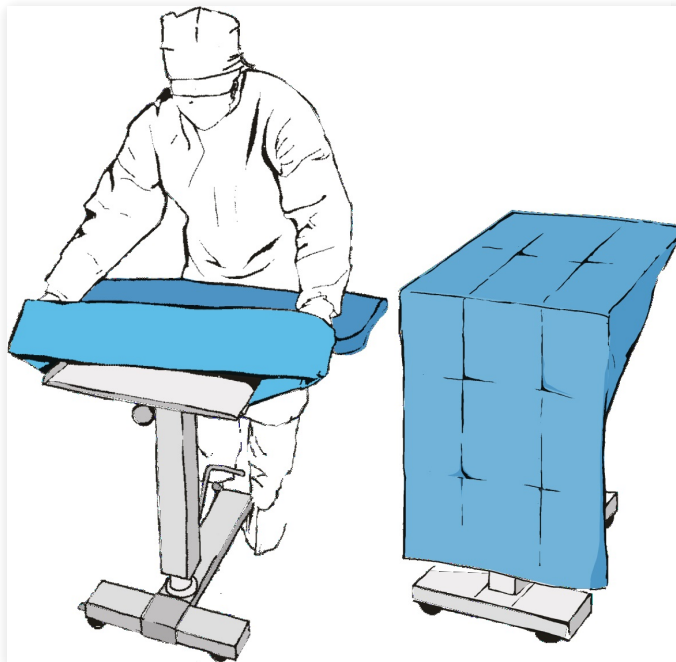

Nałożyć osłonę na stolik Mayo.


3

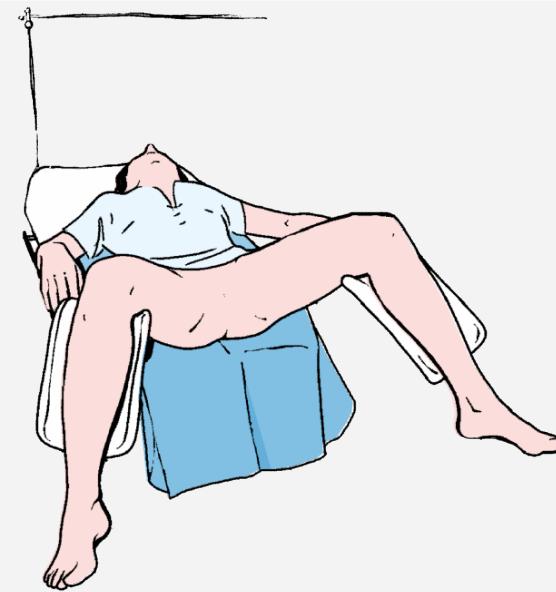

Po pośladki ułożonego w pozycji urologicznej/ginekologicznej pacjenta/pacjentki (dalej jako pacjentka) podłożyć mniejszą serwetkę.

# Rozkładanie zestawu do cystoskopii Matodrape

4

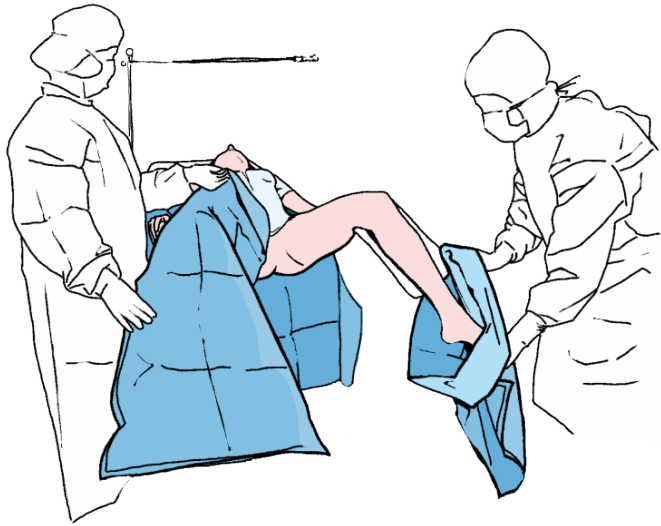


Na nogi pacjentki nasunąć pokrowce z mankietem.

5



Przed rozpoczęciem zabezpieczania pacjentki (wyznaczania pola operacyjnego) zwrócić uwagę na kierunek rozkładania obłożenia wykorzystując, w tym celu umieszczone na serwecie piktogramy.


6

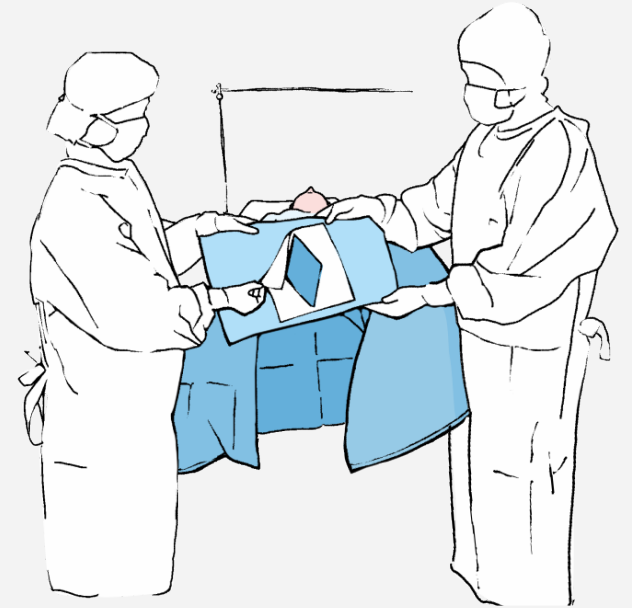

Usunąć papier zabezpieczający z otworu serwety głównej.


# Rozkładanie zestawu do cystoskopii Matodrape

7

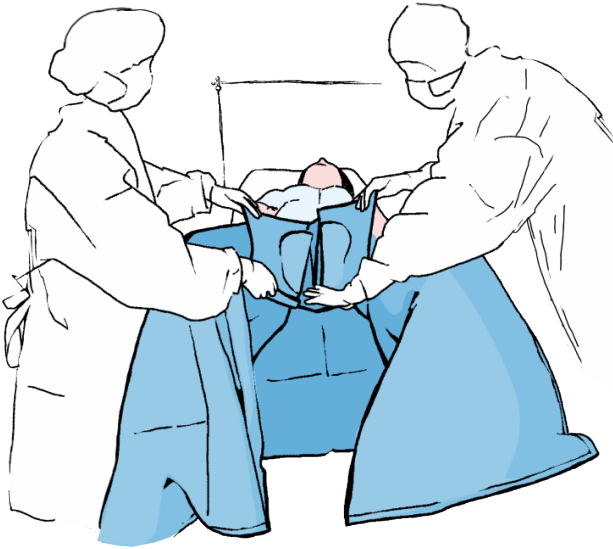

Przykleić obłożenie wyznaczając tym samym pole operacyjne. Następnie docisnąć w miejscu przyklejenia obłożenia w celu zwiększenia przyczepności taśmy przylepnej do skóry pacjentki.

8

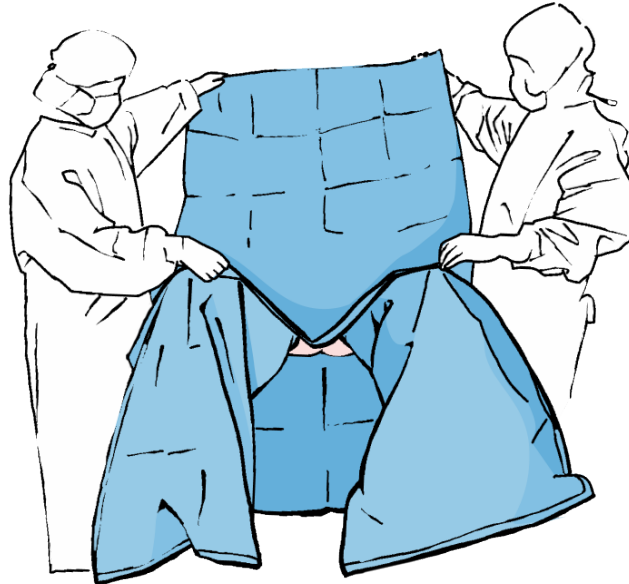

Rozwinąć boki obłożenia tak by swobodnie zwiślały ze stołu operacyjnego, a następnie rozwinąć górną część obłożenia w kierunku głowy pacjentki (w kierunku stanowiska anestetycznego). Przełożyć obłożenie przez ramkę, tworząc tym samym ekran anestetyczny.

9



Dolną część obłożenia rozwinąć w kierunku dolnego krańca stołu operacyjnego, częściowo między nogami pacjentki.