


1



Otworzyć opakowanie zewnętrzne zachowując przy tym zasady aseptyki i wyjąć zestaw na stół do instrumentarium. Rozłożyć zewnętrzną serwetę na stole do instrumentarium, a na niej poszczególne elementy zestawu.

2

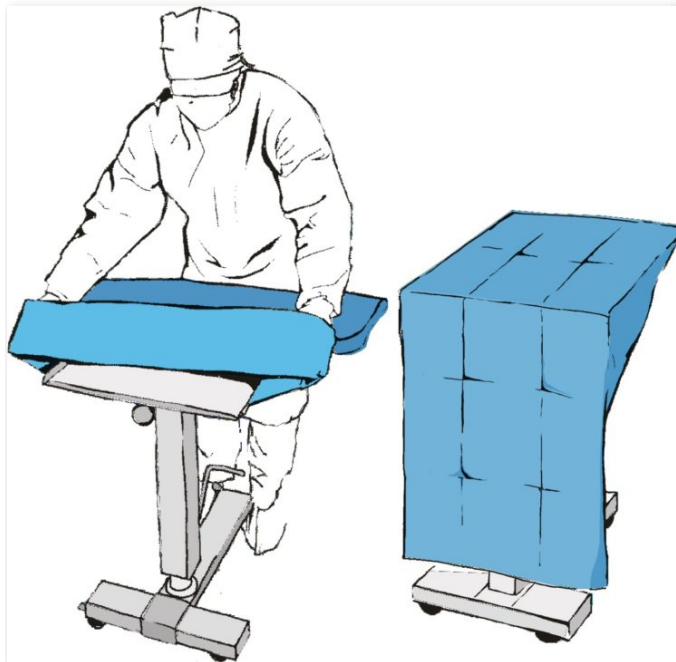

Nasuń pokrowiec w postaci worka na stolik Mayo.


3




Przed rozpoczęciem zabezpieczania pacjenta zwrócić uwagę na kierunek rozkładania obciążenia wykorzystując, w tym celu umieszczone na serwetach piktogramy.

Rozkładanie zestawu do kraniotomii Matodrape

4

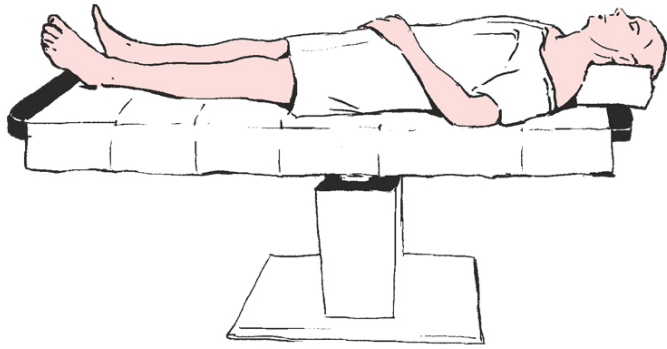


5

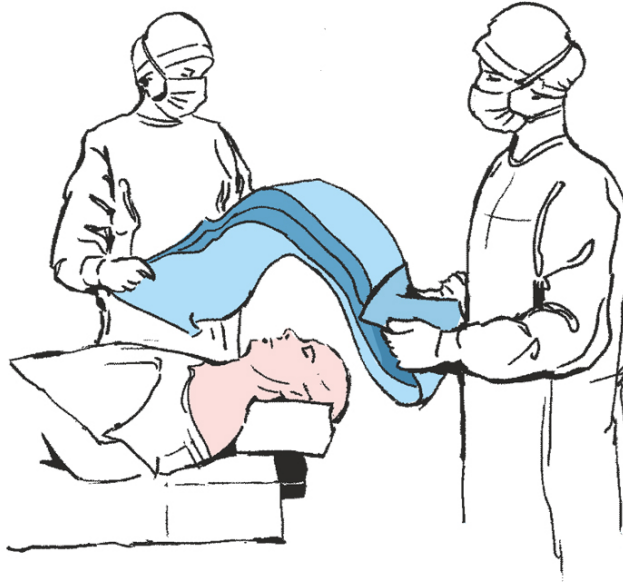


Rozwinąć nad głową pacjenta boki obłożenia w 2 osoby tak by swobodnie zwiślały ze stołu operacyjnego ...

6

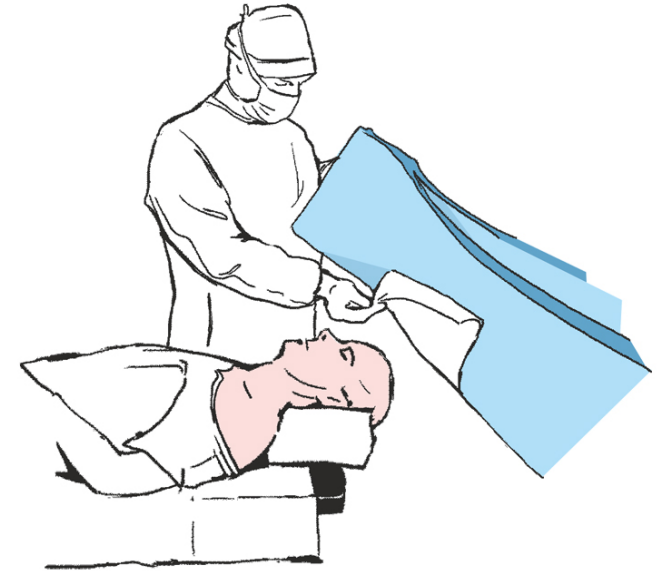


... a następnie usunąć papier zabezpieczający folię chirurgiczną z otworu serwety głównej ...

7

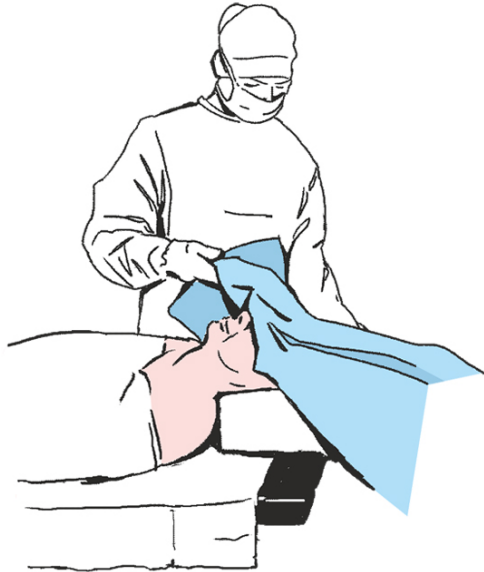

... i przykleić obłożenie wyznaczając tym samym pole operacyjne.

8

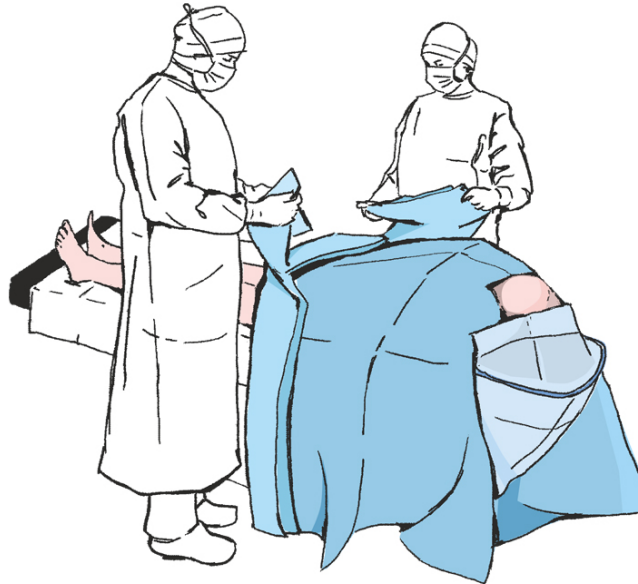


Rozwinąć dolną część obłożenia w kierunku dolnego krańca stołu operacyjnego zabezpieczając kończyny dolne pacjenta.

9




Docisnąć w miejscu przyklejenia obłożenia z folią chirurgiczną w celu zwiększenia przyczepności taśmy przylepnej do skóry pacjenta. Uformować otwór worka na płyny dostosowując kształtkę.

10

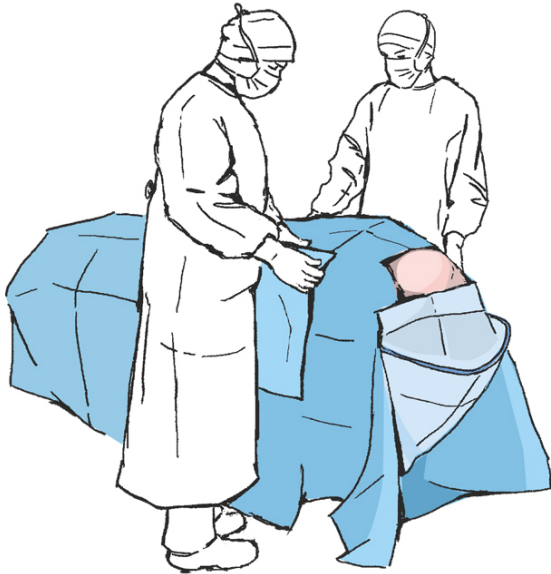


Z prawej i z lewej strony pola operacyjnego przykleić dodatkowe wzmocnienie w postaci serwet z przylepcem usuwając uprzednio taśmę zabezpieczającą.

11

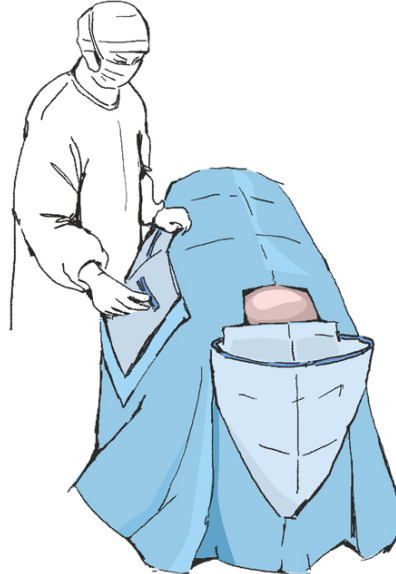


Mocujemy do boku obłożenia kieszeń foliową tak by umożliwić gromadzenie się w niej ściekających płynów z rany operacyjnej.

12

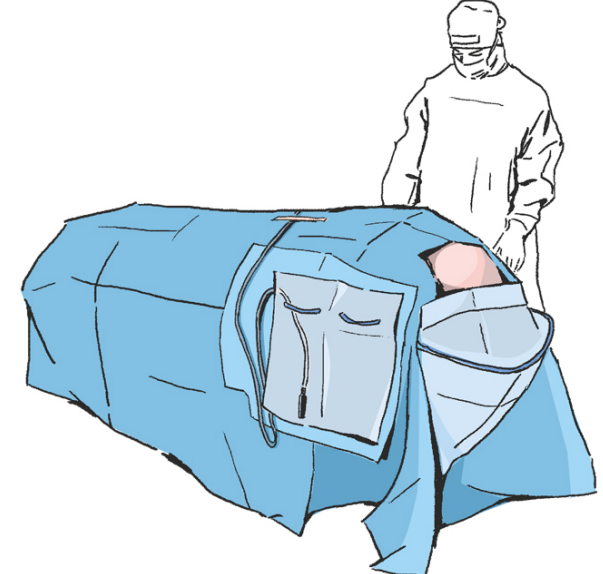

Mocujemy na górze obłożenia taśmy samoprzylepne rzep celem organizacji kabli używanych podczas zabiegu.

13

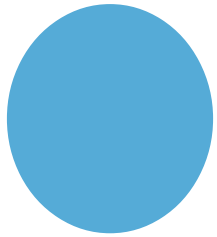

Na koniec podłączamy dren do zaworka w worku na płyny.