


1



Otworzyć opakowanie zewnętrzne zachowując przy tym zasady aseptyki i wyjąć zestaw na stół do instrumentarium. Rozłożyć zewnętrzną serwetę na stole do instrumentarium, a na niej poszczególne elementy zestawu.

2

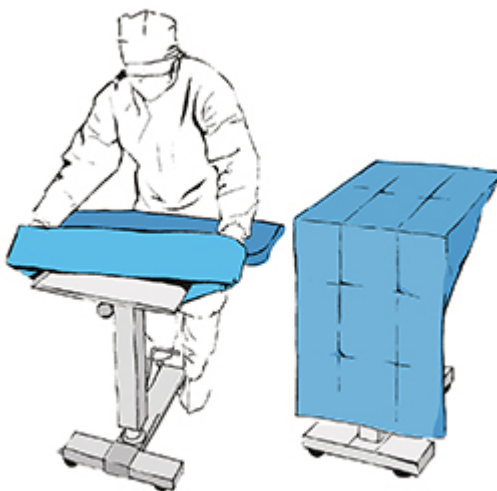

Nałożyć osłonę na stolik Mayo.

3




Przed rozpoczęciem zabezpieczania pacjenta (wyznaczania pola operacyjnego) zwrócić uwagę na kierunek rozkładania obłożenia wykorzystując, w tym celu umieszczone na serwecie piktogramy.

Rozkładanie zestawu do laparoskopii Matodrape

4




5

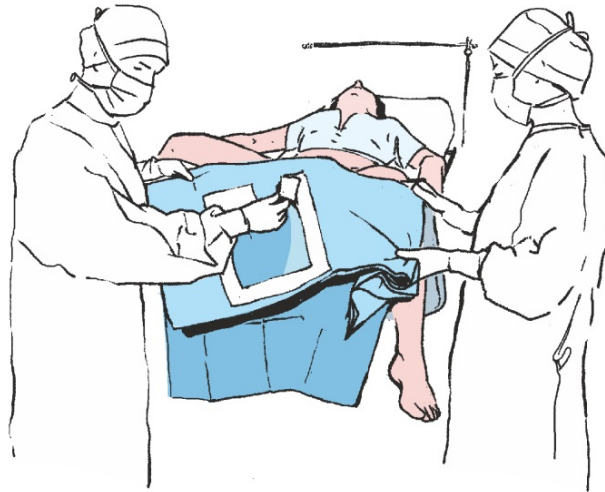

Rozłożyć brzoży obłożenia na boki. Usunąć papier zabezpieczający z okna serwety głównej.

6

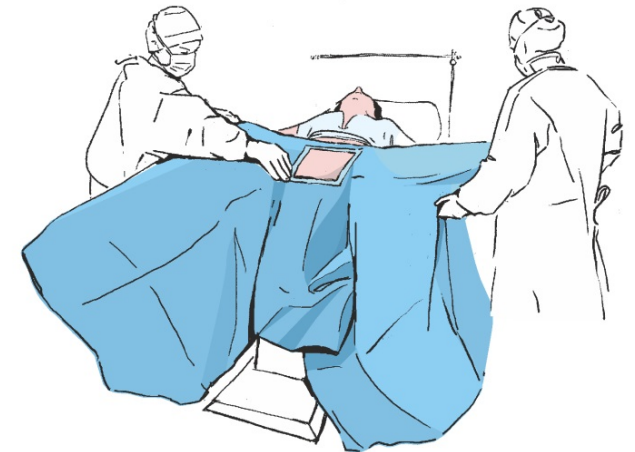


Nasunąć nogawice na nogi pacjenta i przykleić obłożenie do brzucha pacjenta wyznaczając tym samym pole operacyjne. Następnie docisnąć w miejscu przyklejenia obłożenia w celu zwiększenia przyczepności taśmy przylepnej do skóry pacjenta.

7



Rozwinąć boki obłożenia tak by swobodnie zwisały ze stołu operacyjnego a górną część obłożenia rozwinąć zgodnie z kierunkiem strzałek w kierunku ekranu anestezyjologicznego.

8

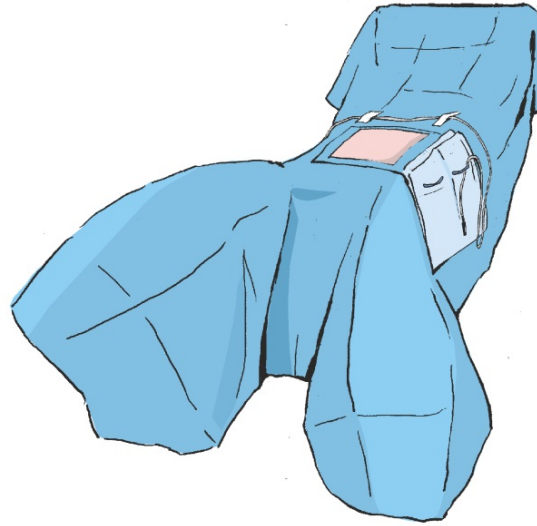

Na koniec mocujemy do obłożenia kieszeń foliową odklejając taśmę zabezpieczającą z warstwy klejącej.