



1

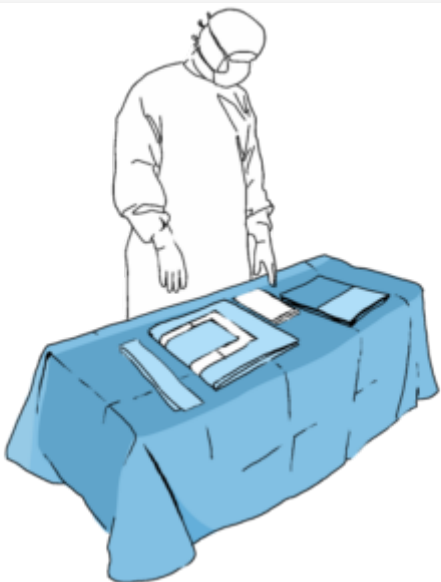

Otworzyć opakowanie zewnętrzne zachowując przy tym zasady aseptyki i wyjąć zestaw na stół do instrumentarium. Rozłożyć zewnętrzną serwetę na stole do instrumentarium, a na niej poszczególne elementy zestawu.

2

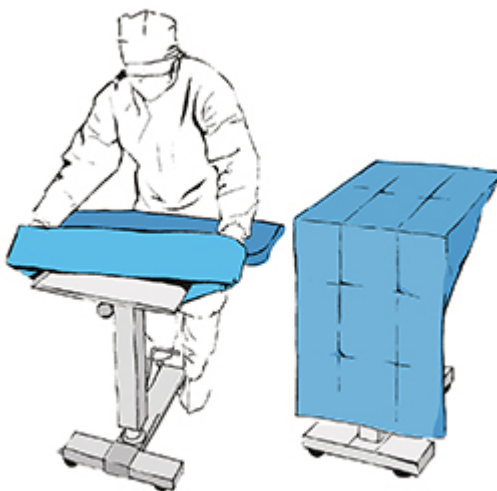

Nałożyć osłonę na stolik Mayo.


3



Przed rozpoczęciem zabezpieczania pacjenta (wyznaczania pola operacyjnego) zwrócić uwagę na kierunek rozkładania obłożenia wykorzystując, w tym celu umieszczone na serwecie piktogramy.


# Rozkładanie zestawu do laparotomii Matodrape

4

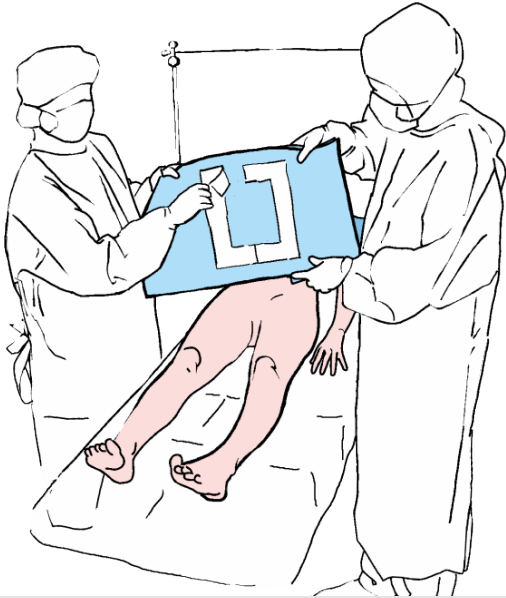


Usunąć papier zabezpieczający z otworu serwety głównej i przykleić obłożenie wyznaczając tym samym pole operacyjne. Następnie docisnąć w miejscu przyklejenia obłożenia w celu zwiększenia przyczepności taśmy przylepnej do skóry pacjenta.

5

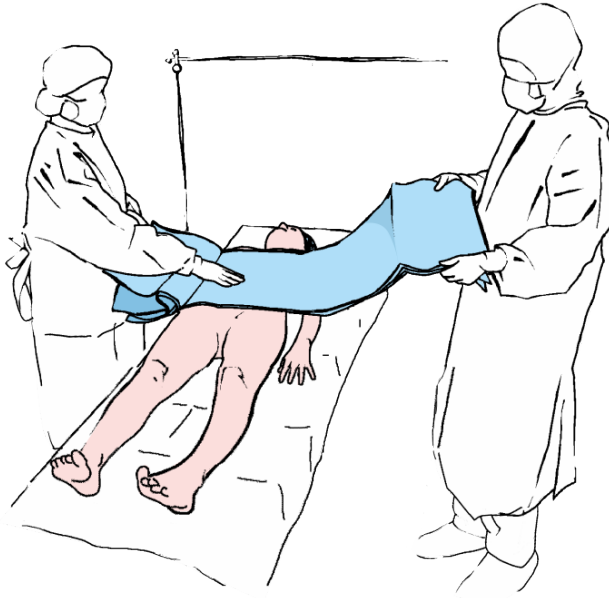


Rozwinąć boki obłożenia tak by swobodnie zwiślały ze stołu operacyjnego.

6

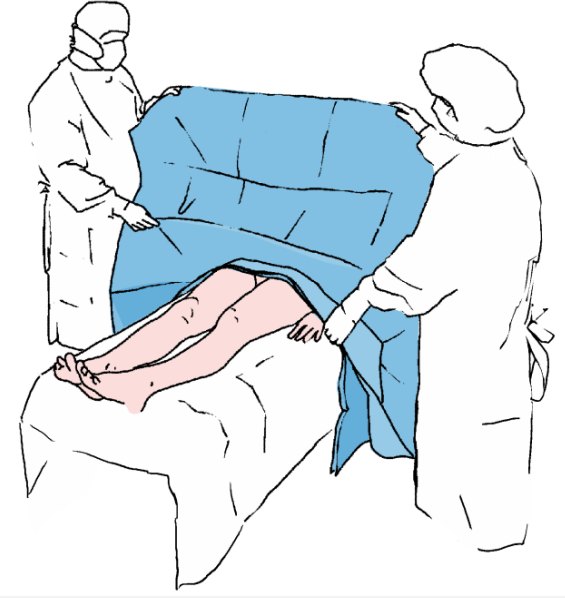

Następnie rozwinąć górną część obłożenia w kierunku głowy pacjenta (w kierunku stanowiska anestezjologicznego). Przełożyć obłożenie przez ramkę, tworząc tym samym ekran anestezjologiczny.

7

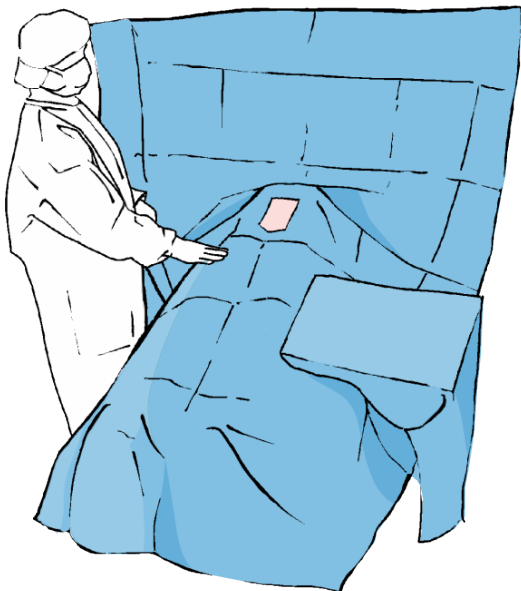

Rozwinąć dolną część obłożenia w kierunku dolnego krańca stołu operacyjnego zabezpieczając kończyny dolne pacjenta.