



1

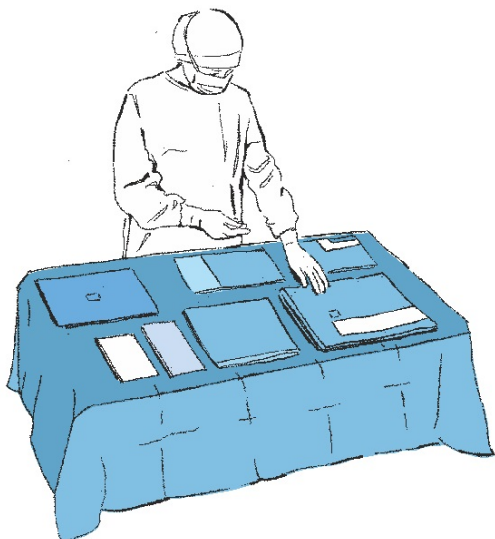


Otworzyć opakowanie zewnętrzne zachowując przy tym zasady aseptyki i wyjąć zestaw na stół do instrumentarium. Rozłożyć zewnętrzną serwetę na stole do instrumentarium, a na niej poszczególne elementy zestawu.

2

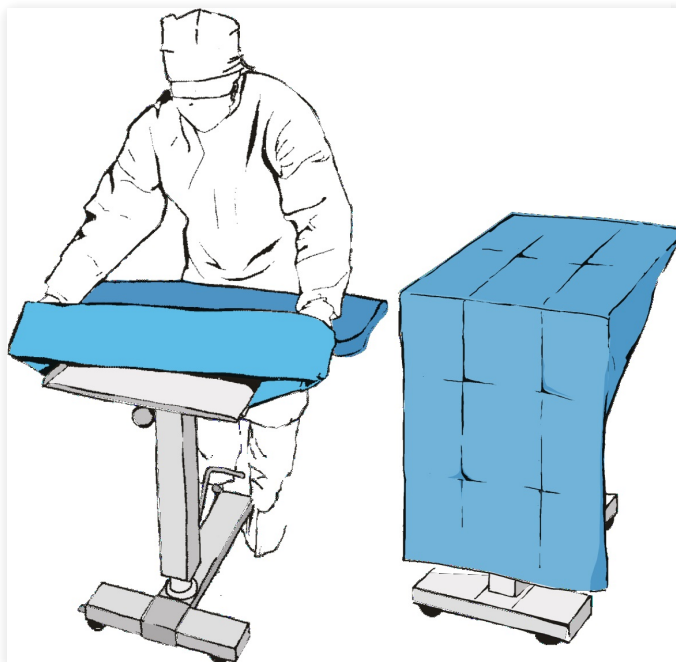

Nałożyć osłonę na stolik Mayo.

3

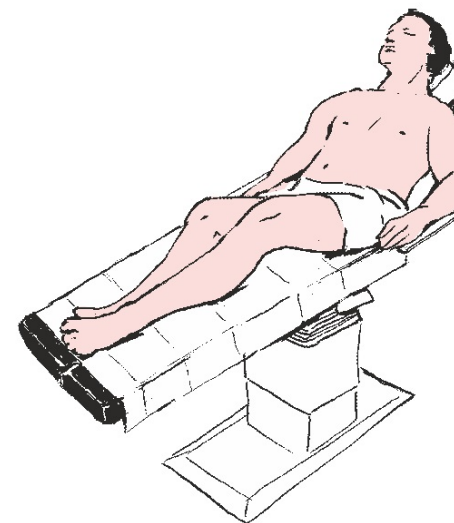


# Rozkładanie zestawu do operacji barku Matodrape

4




Unieść do góry kończynę górną podlegającą procedurze medycznej wykorzystując do tego celu załączone do zestawu ręczniki i umieścić serwetę pomocniczą pod kończyną.

5

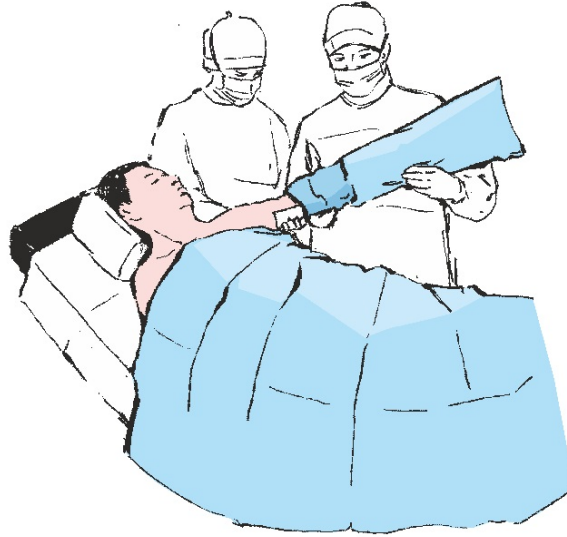

Nałożyć osłonę na kończynę górną pacjenta na wysokości poniżej stawu barkowego.


6

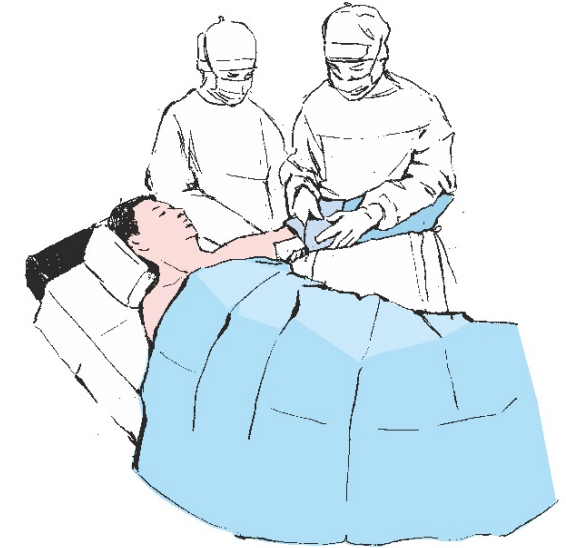

Przymocować osłonę wykorzystując do tego celu załączone taśmy mocujące.

# Rozkładanie zestawu do operacji barku Matodrape

7

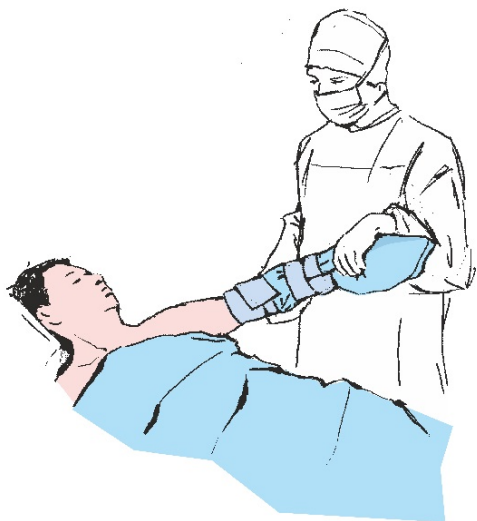

8



Przed rozpoczęciem zabezpieczania pacjenta zwrócić uwagę na kierunek rozkładania obłożenia wykorzystując, w tym celu umieszczone na serwecie piktogramy.

9



Podłożyć obłożenie z wycięciem w kształcie litery „U” pod barkiem pacjenta.

# Rozkładanie zestawu do operacji barku Matodrape

10




Rozwinąć dolną część obłożenia w kierunku dolnego krańca stołu operacyjnego osłaniając w ten sposób kończyny dolne pacjenta.

11




Usunąć papier zabezpieczający z krótkiego odcinka taśmy przylepnej i przykleić ją dokładnie pod pachą pacjenta.

12

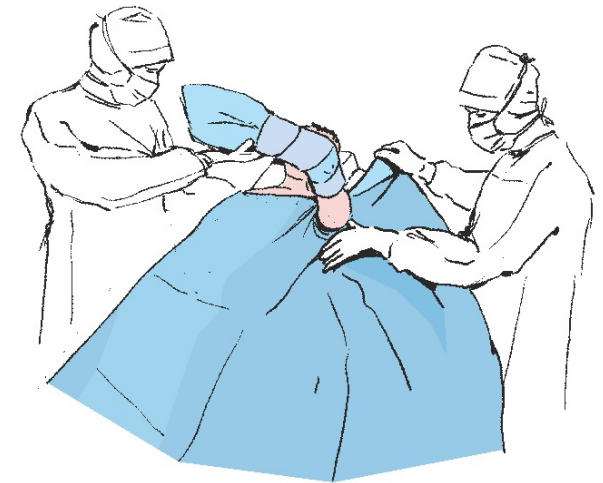

Usunąć pozostałe taśmy zabezpieczające i okleić dokładnie bark kierując się w stronę głowy pacjenta wyznaczając w ten sposób boczne granice pola operacyjnego. Docisnąć w miejscu przyklejenia obłożenia w celu zwiększenia przyczepności taśmy przylepnej do skóry pacjenta.

13

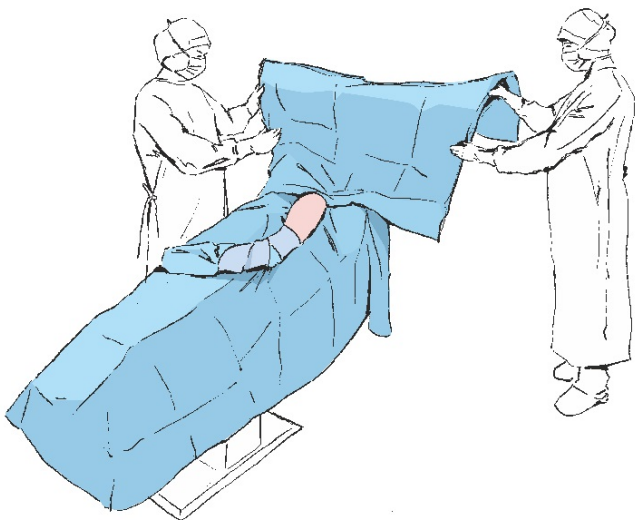

Usunąć taśmę zabezpieczającą i przykleić obłożenie nad barkiem wyznaczając w ten sposób górną granicę pola operacyjnego. Docisnąć w miejscu przyklejenia. Rozwinąć serwetę zgodnie z kierunkiem strzałek (w kierunku ekranu anestetycznego). Przełożyć obłożenie przez stojak.

14

