



1

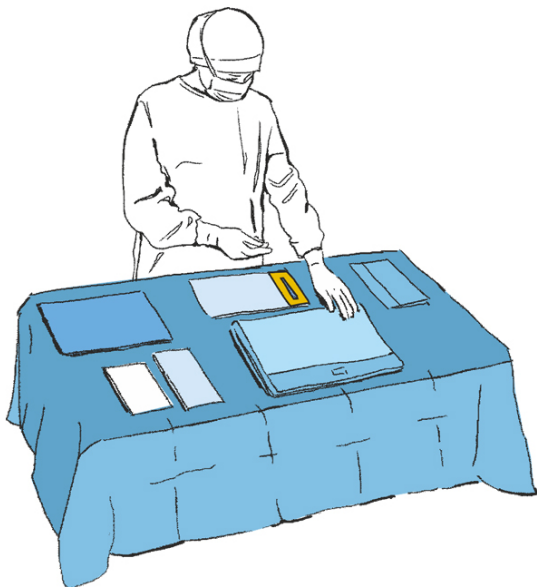

Otworzyć opakowanie zewnętrzne zachowując przy tym zasady aseptyki i wyjąć zestaw na stół do instrumentarium. Rozłożyć zewnętrzną serwetę na stole do instrumentarium, a na niej poszczególne elementy zestawu.

2

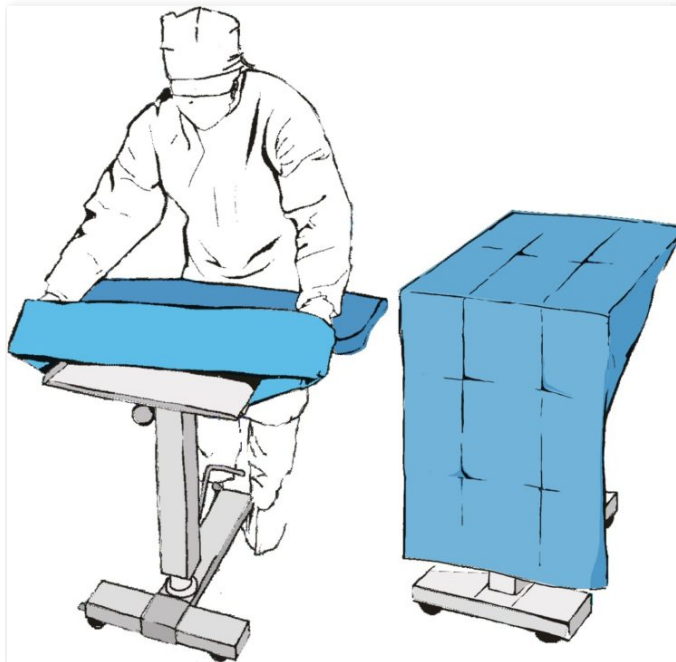

Nasuń pokrowiec w postaci worka na stolik Mayo.


3



Przed rozpoczęciem zabezpieczania pacjenta zwrócić uwagę na kierunek rozkładania obłożenia wykorzystując, w tym celu umieszczone na serwetach piktogramy.


Rozkładanie zestawu do operacji brzuszno-kroczych Matodrape

4

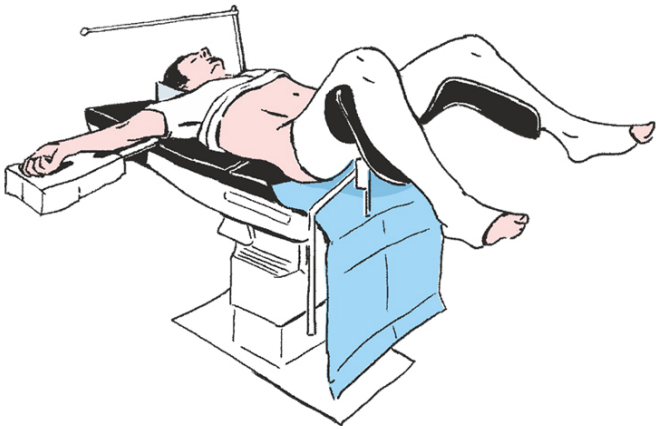


Pod pośladki ułożonego w pozycji ginekologicznej pacjenta podłożyć mniejszą serwetkę.

5

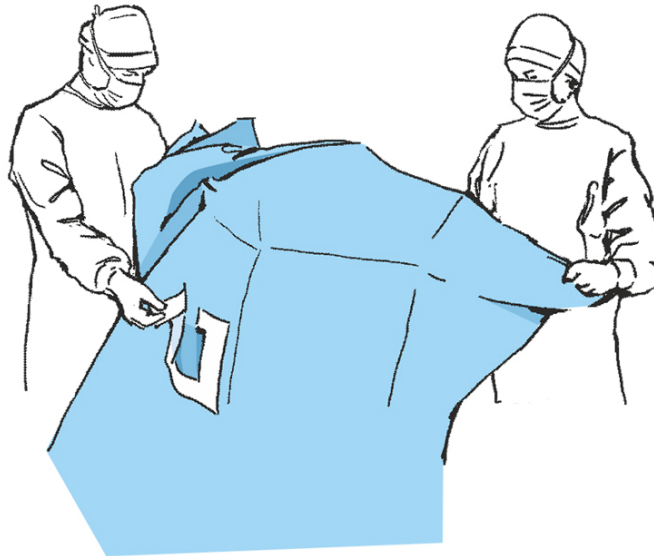

Rozłożyć brzegi obłożenia na boki i usunąć papier zabezpieczający z okna kroczonego serwety głównej.


6

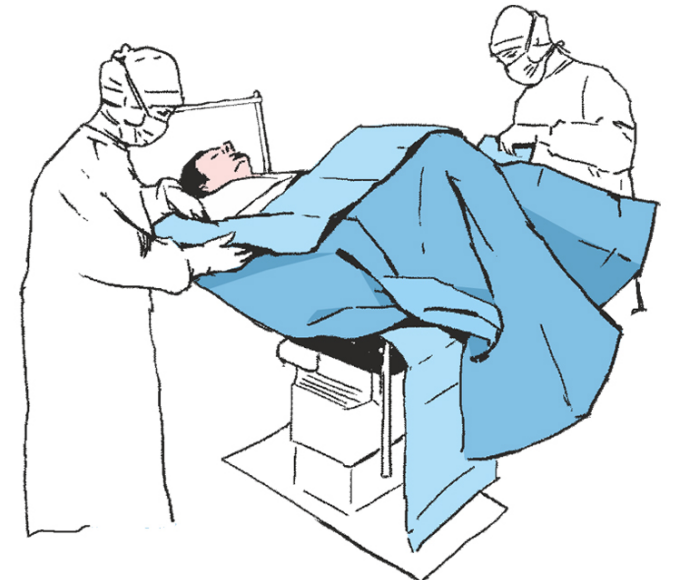

Nasunąć nogawice na nogi pacjenta i przykleić obłożenie do krocza pacjenta wyznaczając tym samym pole operacyjne.

Rozkładanie zestawu do operacji brzuszno-kroczeniowych Matodrape

7

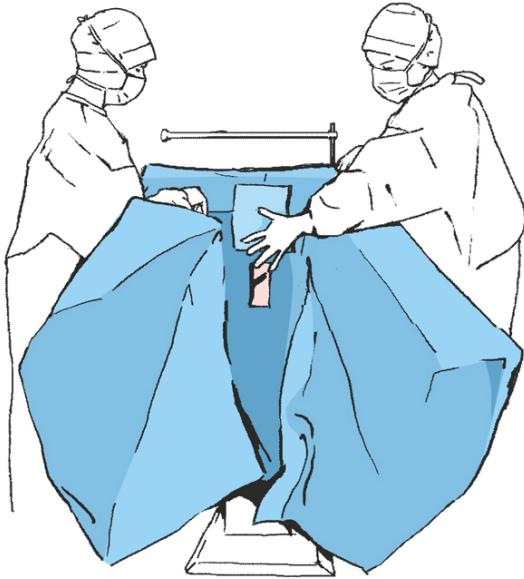


Następnie docisnąć w miejscu przyklejenia obłożenia w celu zwiększenia przyczepności taśmy przylepnej do skóry pacjenta.

8



Dolną część obłożenia rozwinąć między nogami pacjenta.

9

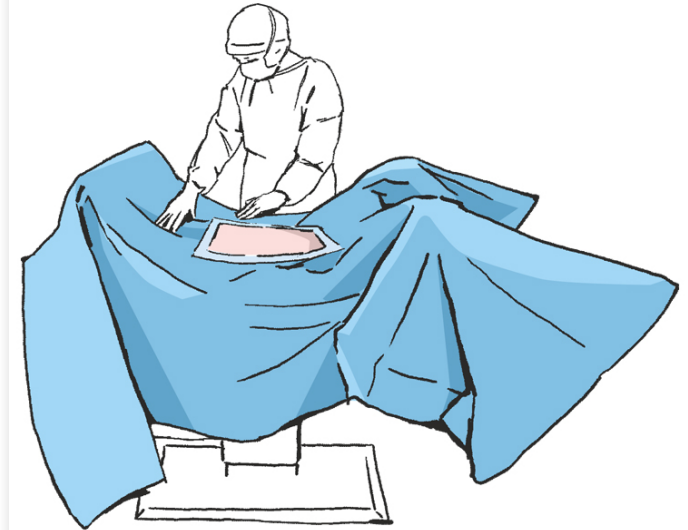

Usunąć papier zabezpieczający z okna brzusznej serwety głównej i przykleić obłożenie wyznaczając tym samym górne pole operacyjne. Następnie docisnąć w miejscu przyklejenia obłożenia w celu zwiększenia przyczepności taśmy przylepnej do skóry pacjenta.


Rozkładanie zestawu do operacji brzuszno-kroczych Matodrape

10



Rozwinąć boki obłożenia tak by swobodnie zwisały ze stołu operacyjnego a górną część obłożenia rozwinąć zgodnie z kierunkiem strzałek w kierunku ekranu anestezjologicznego. Przełożyć obłożenie przez stojak, tworząc tym samym ekran anestezjologiczny.

11

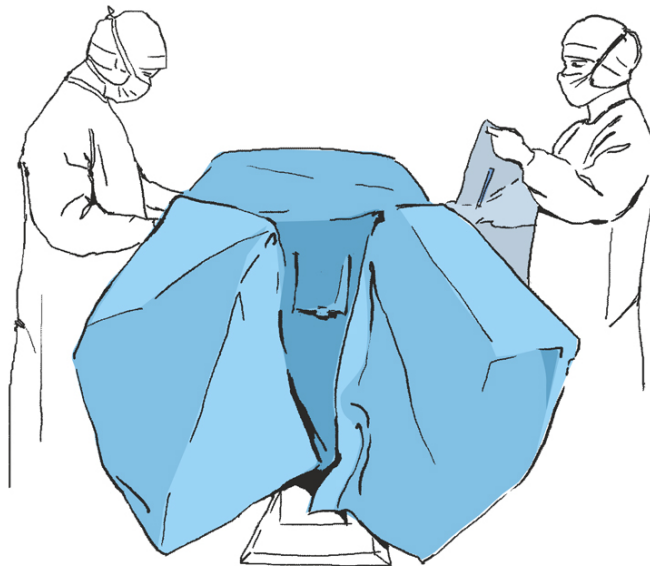

W wybranym miejscu przykleić do obłożenia kieszeń foliową 2-komorową.

12

