



1

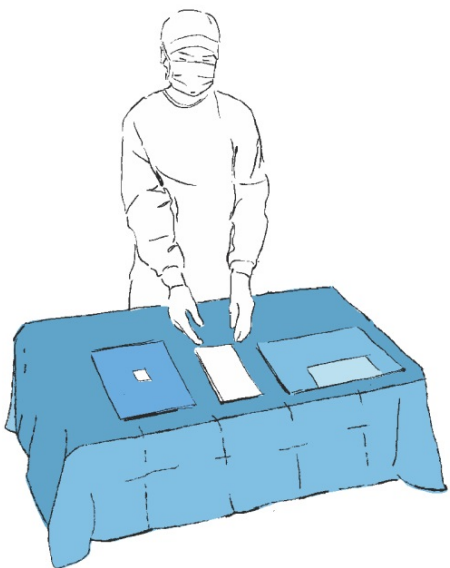

Otworzyć opakowanie zewnętrzne zachowując przy tym zasady aseptyki i wyjąć zestaw na stół do instrumentarium. Rozłożyć zewnętrzną serwetę na stole do instrumentarium, a na niej poszczególne elementy zestawu.

2

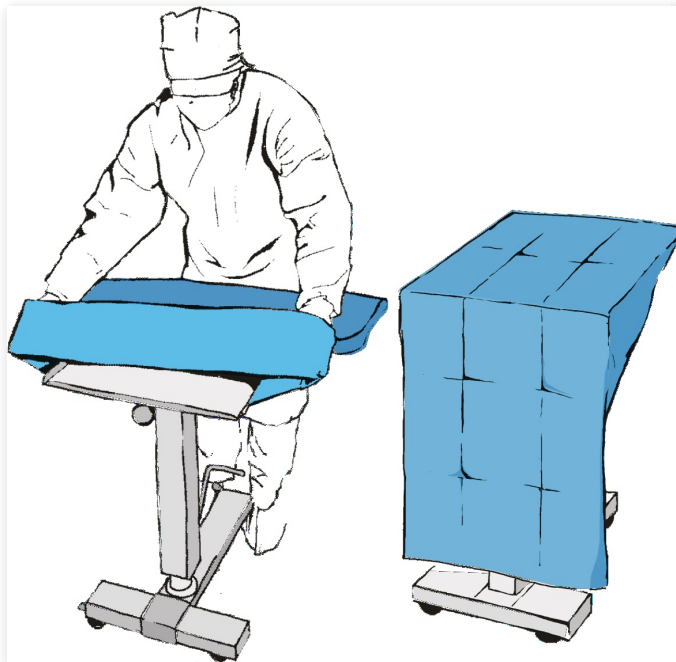

Nałożyć osłonę na stolik Mayo.


3



Przed rozpoczęciem zabezpieczania pacjenta (wyznaczania pola operacyjnego) zwrócić uwagę na kierunek rozkładania obłożenia wykorzystując, w tym celu umieszczone na serwetce piktogramy.

# Rozkładanie zestawu do operacji dłoni/stopy Matodrape

4

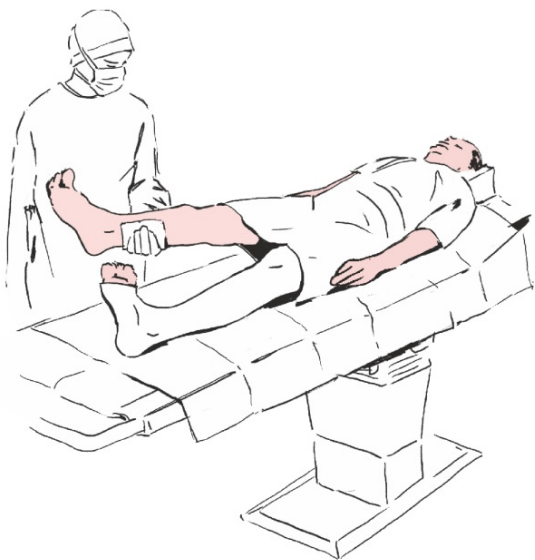


Unieść do góry kończynę podlegającą procedurze medycznej wykorzystując do tego celu załączone do zestawu ręczniki.

5




Przełożyć kończynę pacjenta przez elastyczny otwór w obłożeniu głównym.

6

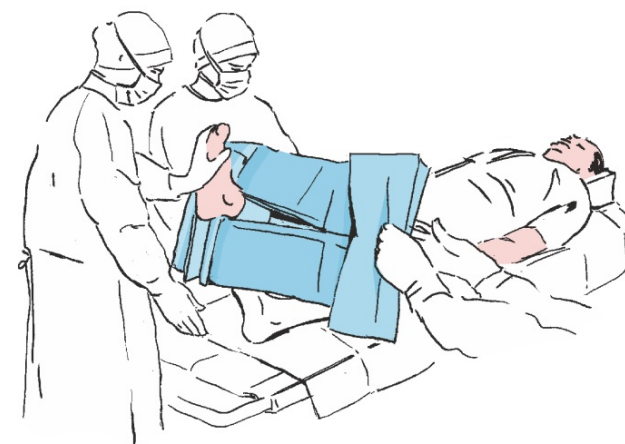


# Rozkładanie zestawu do operacji dłoni/stopy Matodrape

7

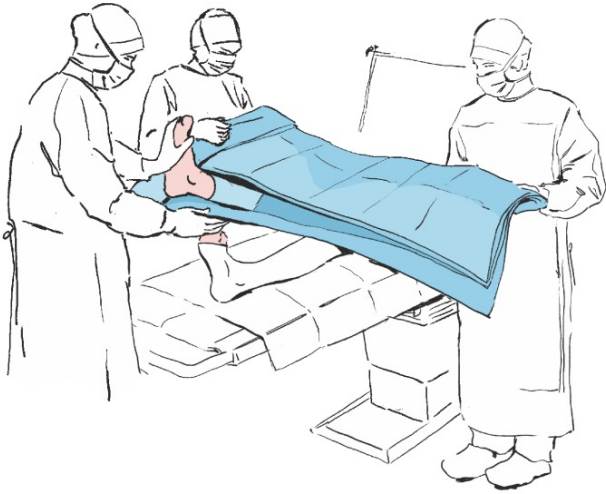

Rozwinąć boki obłożenia tak by swobodnie zwisały ze stołu operacyjnego, a następnie rozwinąć górną część obłożenia w kierunku głowy pacjenta (w kierunku stanowiska anestezjologicznego).

8

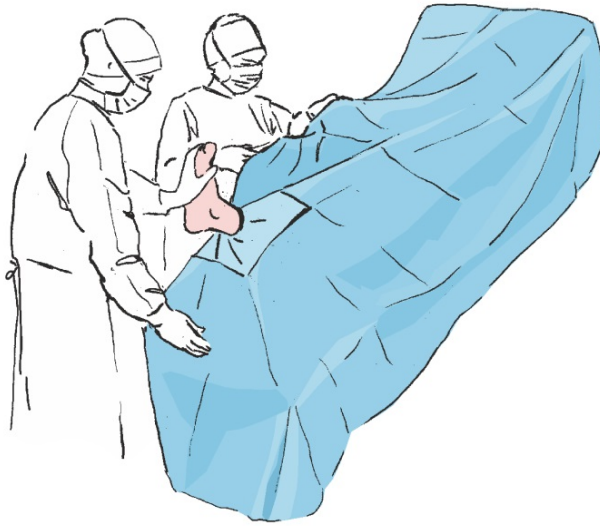

Przełożyć obłożenie przez ramkę, tworząc tym samym ekran anestezjologiczny. Rozwinąć dolną część obłożenia w kierunku dolnego krańca stołu operacyjnego zabezpieczając kończyny dolne pacjenta.

9

