



1

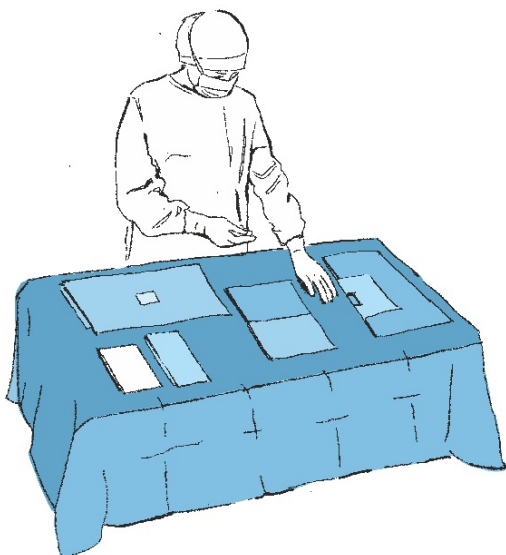


Otworzyć opakowanie zewnętrzne zachowując przy tym zasady aseptyki i wyjąć zestaw na stół do instrumentarium. Rozłożyć zewnętrzną serwetę na stole do instrumentarium, a na niej poszczególne elementy zestawu.

2

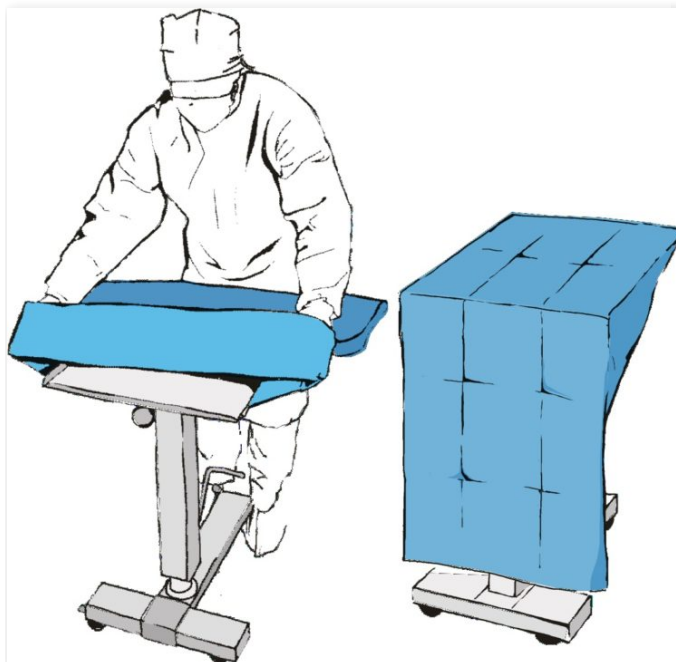

Nałożyć osłonę na stolik Mayo.


3

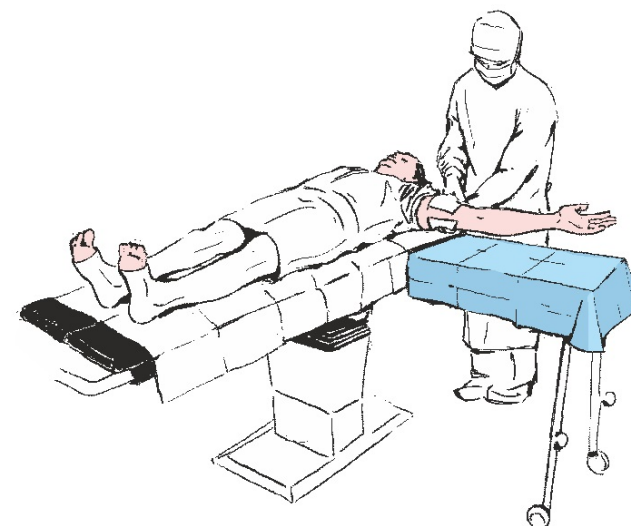

Unieść do góry kończynę górną podlegającą procedurze medycznej wykorzystując do tego celu załączone do zestawu ręczniki.


Rozkładanie zestawu do operacji kończyny górnej Matodrape

4

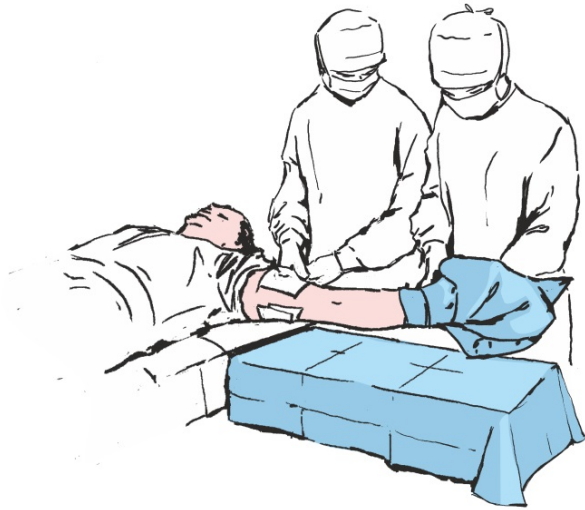

Nałożyć osłonę na kończynę górną pacjenta.

5

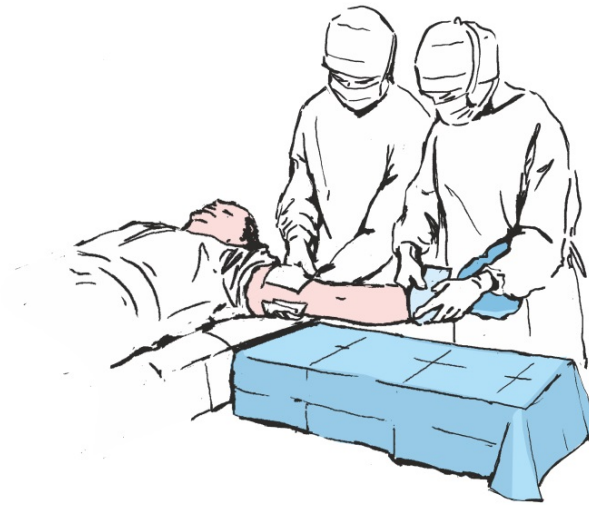

Przymocować osłonę na wysokości przedramienia wykorzystując do tego celu załączoną taśmę mocującą.


6



Przed rozpoczęciem zabezpieczenia pacjenta (wyznaczenia pola operacyjnego) zwrócić uwagę na kierunek rozkładania obłożenia wykorzystując, w tym celu umieszczone na serwecie piktogramy.


Rozkładanie zestawu do operacji kończyny górnej Matodrape

7

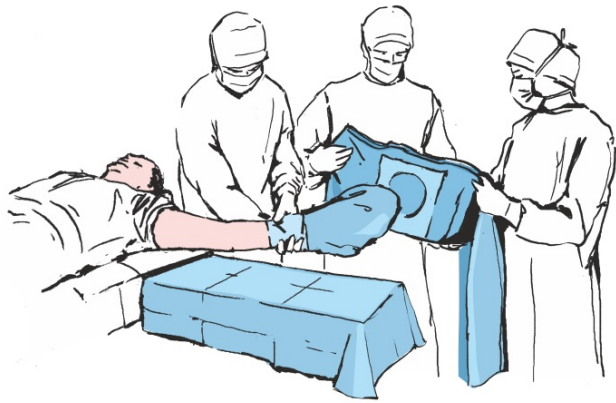


Przełożyć kończynę górną pacjenta przez elastyczny otwór w obłożeniu głównym.

8

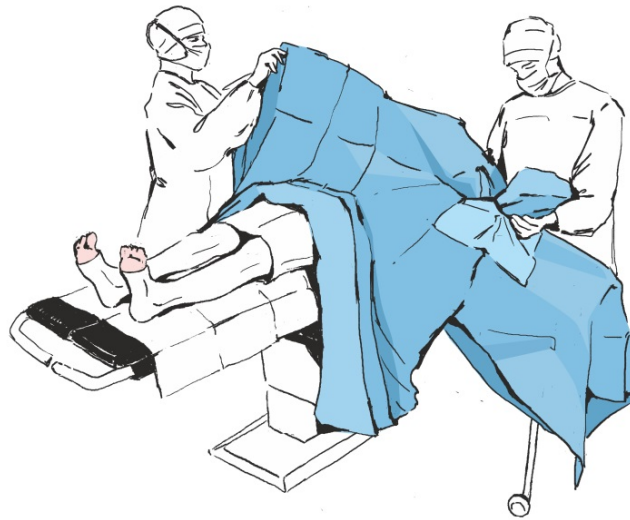

Przykryć boczną dołączoną na stałe do obłożenia serwetką podstawkę pod kończynę.

9

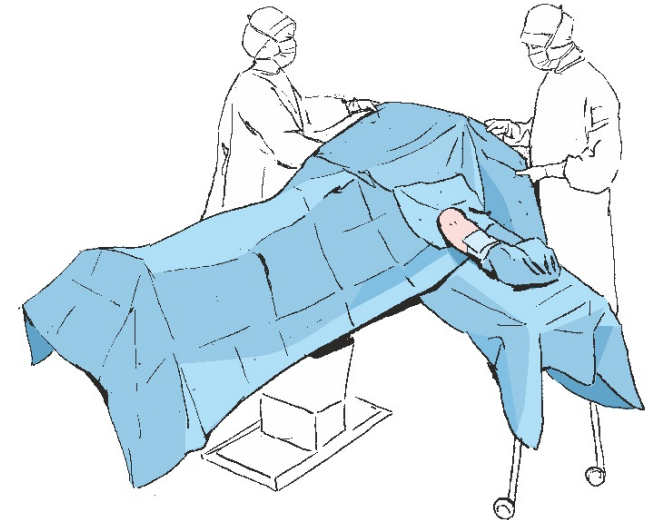

Rozwinąć dolną część obłożenia osłaniając kończyny dolne pacjenta a następnie rozwinąć górną część obłożenia zgodnie z kierunkiem strzałek w kierunku ekranu anestezjologicznego. Przełożyć obłożenie przez stojak, tworząc tym samym ekran anestezjologiczny.

10

