



1

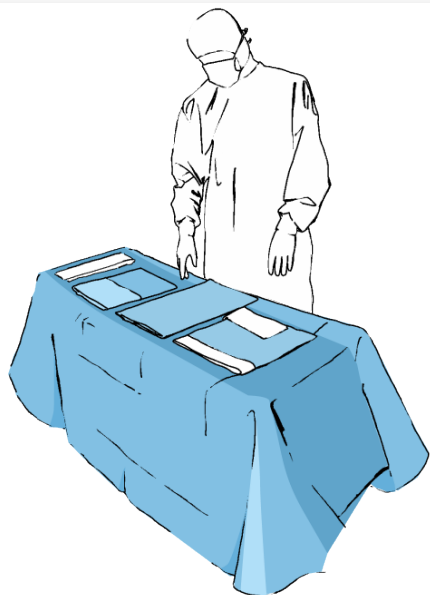

Otworzyć opakowanie zewnętrzne zachowując przy tym zasady aseptyki i wyjąć zestaw na stół do instrumentarium. Rozłożyć zewnętrzną serwetę na stole do instrumentarium, a na niej poszczególne elementy zestawu.

2

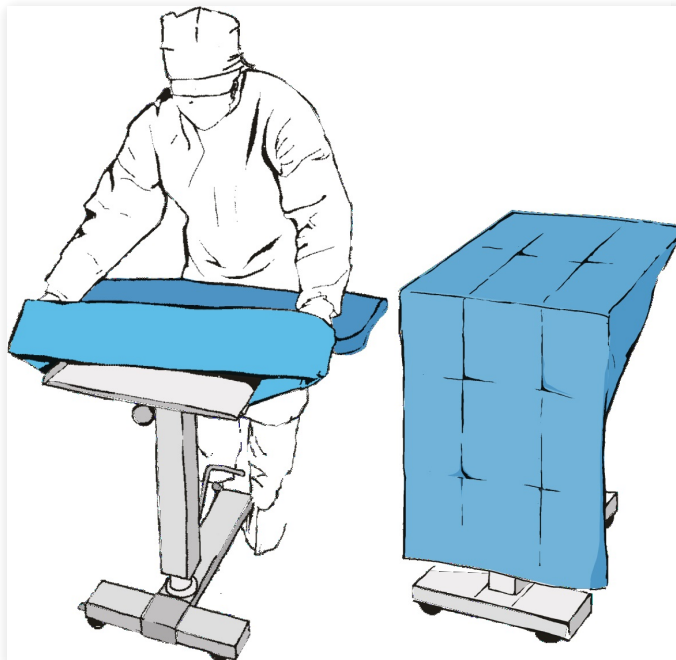

Nałożyć osłonę na stolik Mayo.


3



Usunąć taśmę zabezpieczającą z serwety dolnej (z samym przylepcem).


Rozkładanie zestawu do operacji tarczycy Matodrape

4

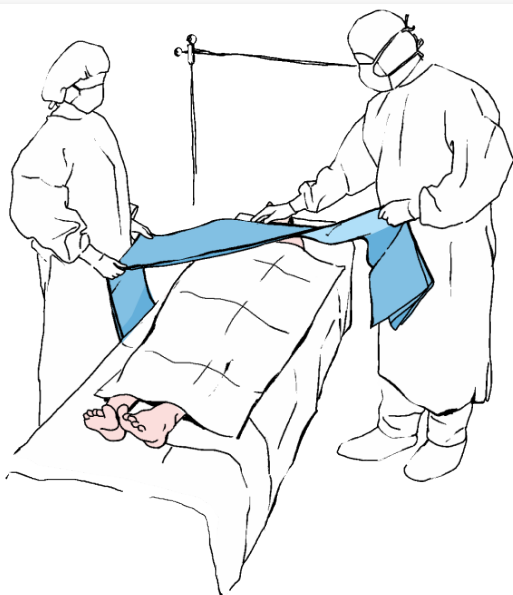


Rozwijając serwetę na boki przykleić obłożenie w okolicy górnej części klatki piersiowej wyznaczając w ten sposób dolną granicę pola operacyjnego.

5

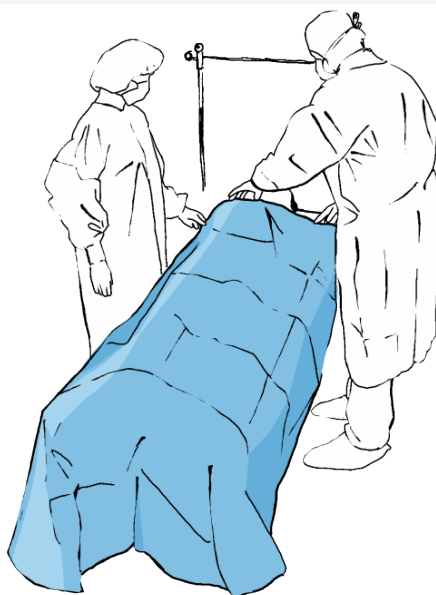

Rozwinąć dolną część obłożenia w kierunku dolnego krańca stołu operacyjnego osłaniając w ten sposób kończyny dolne pacjenta.

6

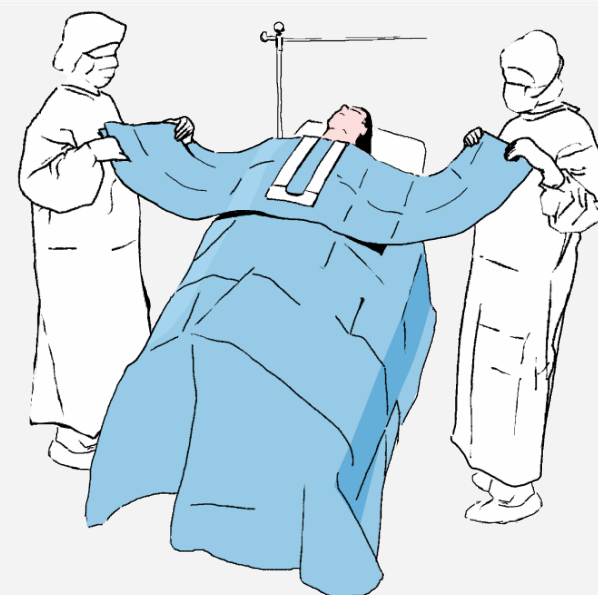

Na rozwiniętej serwetce dolnej rozłożyć serwetę z wycięciem w kształcie litery „U” tak aby przylepce były na górze.


Rozkładanie zestawu do operacji tarczycy Matodrape

7




Usunąć taśmę zabezpieczającą.

8

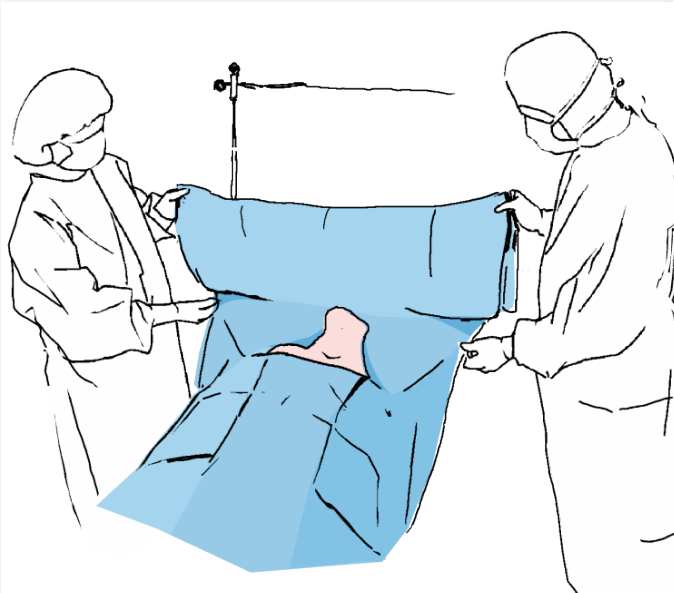

Przykleić obłożenie w taki sposób aby uniknąć zagnieceń wyznaczając w ten sposób górną i boczne granice pola operacyjnego. Następnie docisnąć w miejscu przyklejenia obłożenia w celu zwiększenia przyczepności taśmy przylepnej do skóry pacjenta. Rozwinąć serwetę zgodnie z kierunkiem strzałek (w kierunku stanowiska anestezyjologicznego).

9

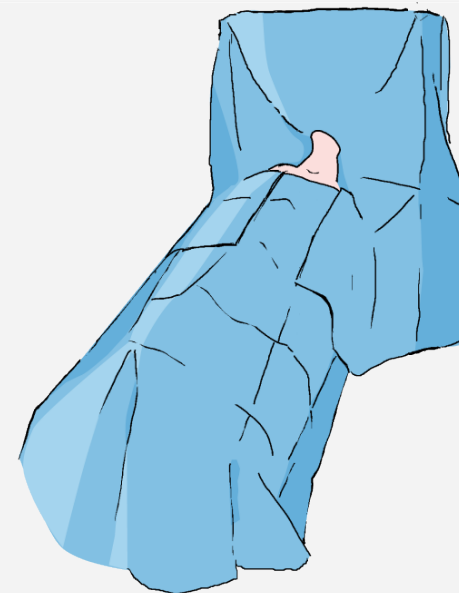

Przełożyć obłożenie przez ramkę i przykleić do stojaków, tworząc tym samym ekran anestezyjologiczny.