



1

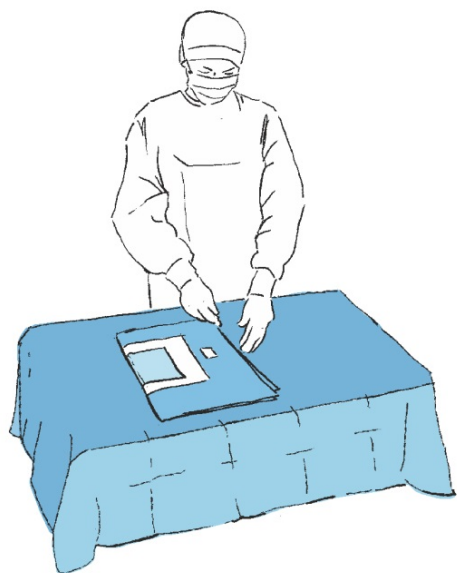

Otworzyć opakowanie zewnętrzne zachowując przy tym zasady aseptyki i wyjąć zestaw na stół do instrumentarium. Rozłożyć zewnętrzną serwetę na stole do instrumentarium, a na niej poszczególne elementy zestawu.

2

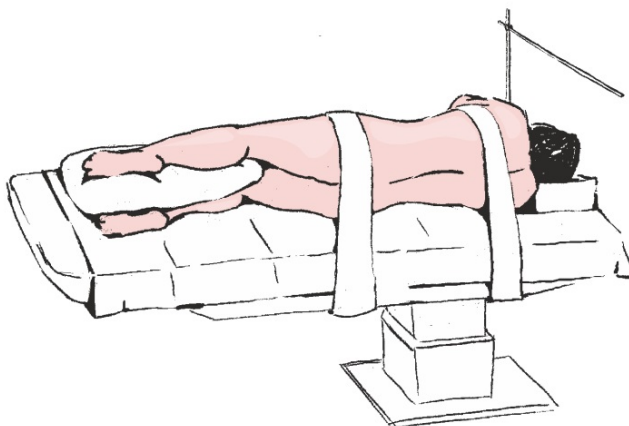


3



Przed rozpoczęciem zabezpieczenia pacjenta (wyznaczenia pola operacyjnego) zwrócić uwagę na kierunek rozkładania obłożenia wykorzystując, w tym celu umieszczone na serwetce piktogramy.


# Rozkładanie zestawu do operacji urologicznej (PCNL) Matodrape

4

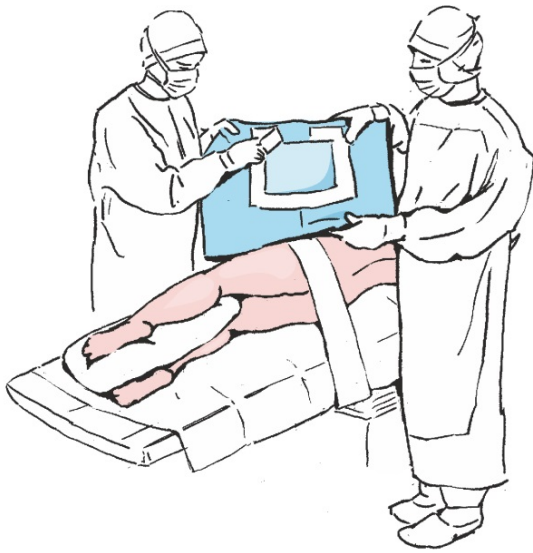


Rozwinąć nad głową pacjenta boki obłożenia w 2 osoby tak by swobodnie zwisały ze stołu operacyjnego, a następnie usunąć papier zabezpieczający wokół otworu serwety głównej i przykleić obłożenie wyznaczając tym samym pole operacyjne.

5

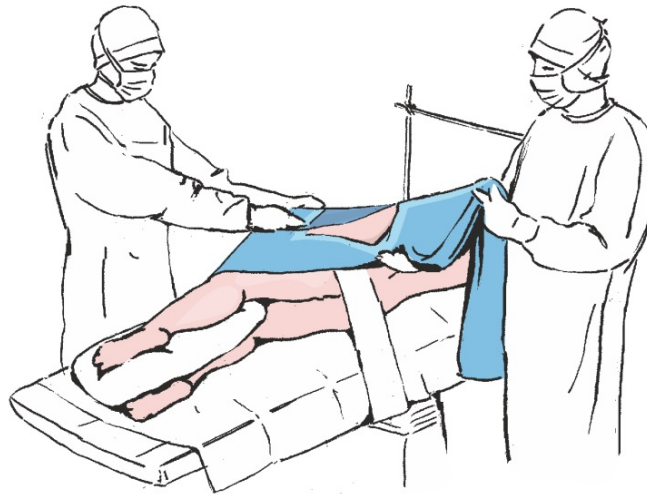

Następnie docisnąć w miejscu przyklejenia obłożenia w celu zwiększenia przyczepności taśmy przylepnej do skóry pacjenta.


6

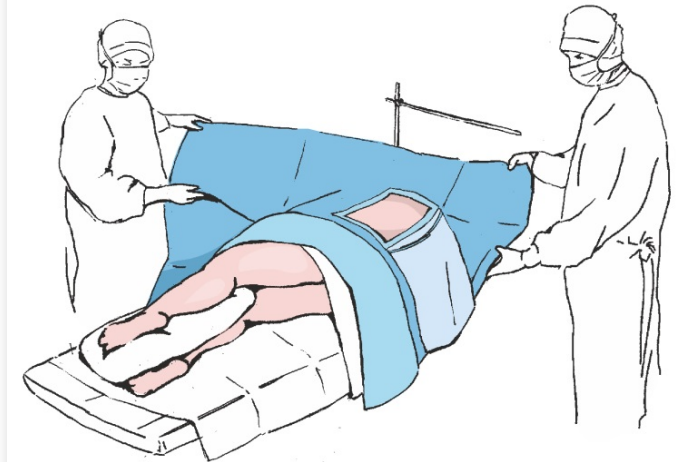

Rozwinąć boki obłożenia tak by swobodnie zwisały ze stołu operacyjnego, a następnie rozwinąć górną część obłożenia w kierunku głowy pacjenta (w kierunku stanowiska anestezjologicznego). Przełożyć obłożenie przez ramkę, tworząc tym samym ekran anestezjologiczny.

# Rozkładanie zestawu do operacji urologicznej (PCNL) Matodrape

7

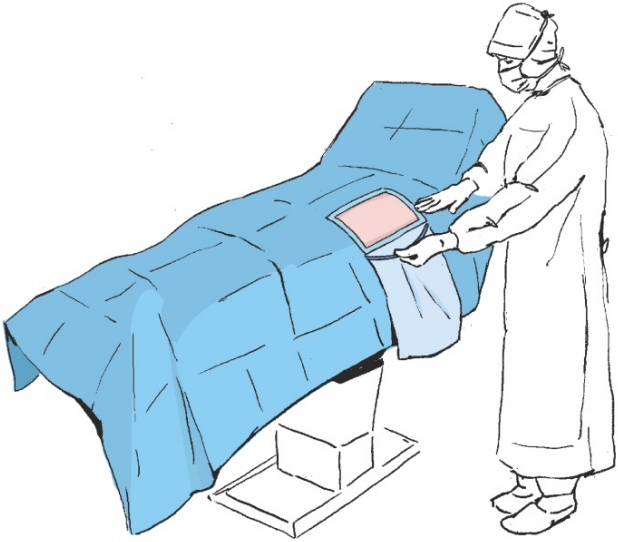

Rozwinąć dolną część obłożenia w kierunku dolnego krańca stołu operacyjnego zabezpieczając kończyny dolne pacjenta. Uformować otwór worka na płyny dostosowując kształtkę.

8

