



1

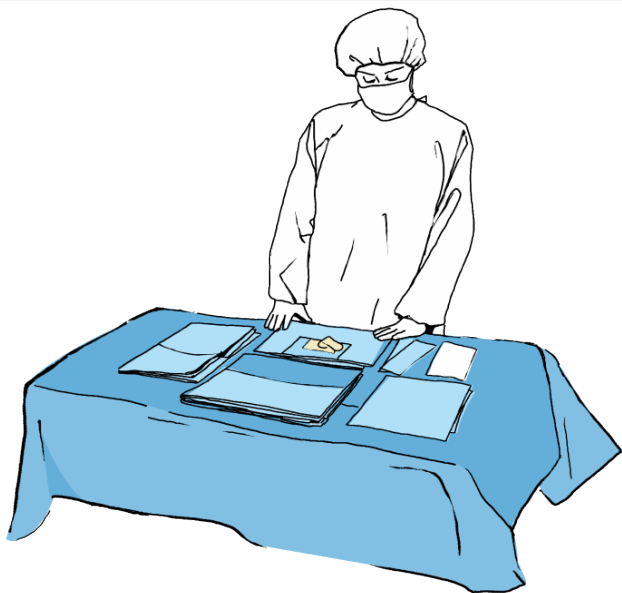


Otworzyć opakowanie zewnętrzne zachowując przy tym zasady aseptyki i wyjąć zestaw na stół do instrumentarium. Rozłożyć zewnętrzną serwetkę na stole do instrumentarium, a na niej poszczególne elementy zestawu.

2

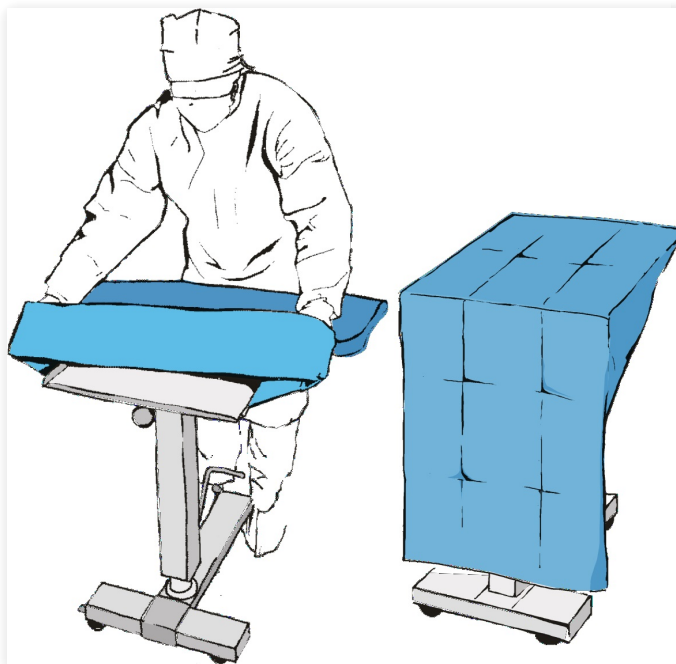

Nałożyć osłonę na stolik Mayo.


3

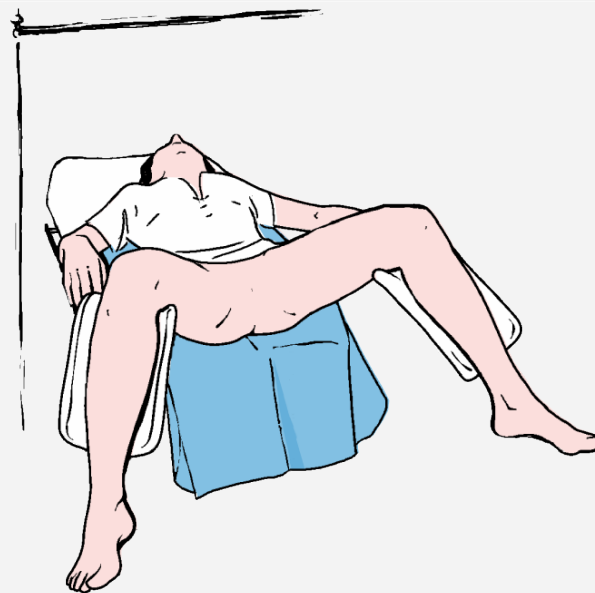

Pod pośladki ułożonego w pozycji urologicznej pacjenta podłożyć mniejszą serwetkę.

Rozkładanie zestawu do operacji urologicznej (TUR) Matodrape

4

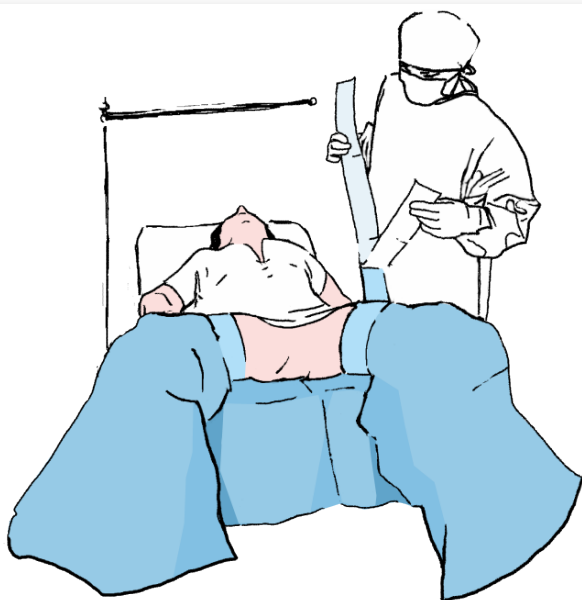


Na nogi pacjenta nasunąć pokrowce oraz umocować je za pomocą taśm medycznych.

5



Przed rozpoczęciem zabezpieczania pacjenta zwrócić uwagę na kierunek rozkładania obłożenia wykorzystując, w tym celu umieszczone na serwecie piktogramy.


6

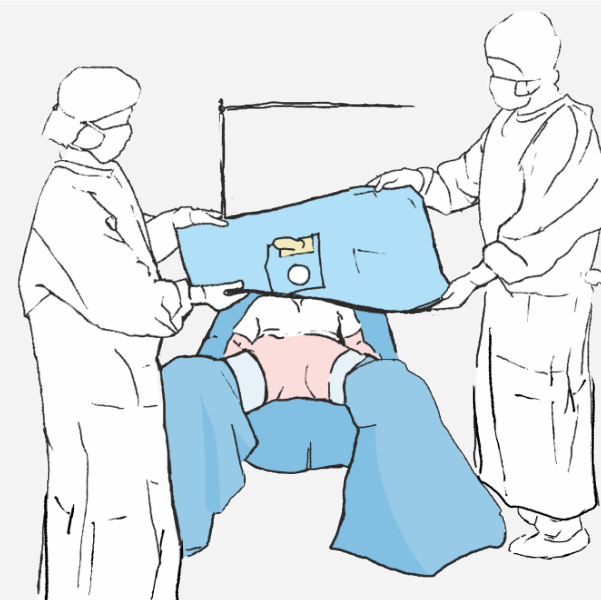

Częściowo rozłożyć serwetę główną na pacjenta (wyznaczania pola operacyjnego) dopasowując otwory w odpowiednie miejsca pola operacyjnego i położyć obłożenie na pacjencie wyznaczając tym samym pole operacyjne.

Rozkładanie zestawu do operacji urologicznej (TUR) Matodrape

7

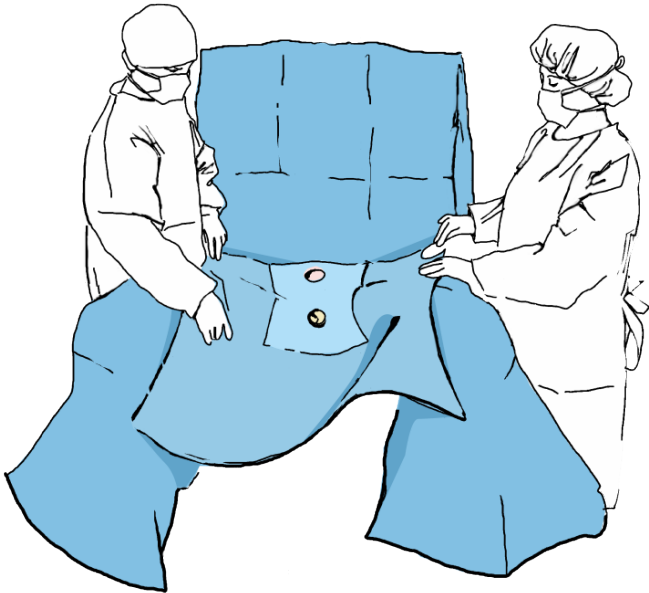

Rozwinąć boki obłożenia tak by swobodnie zwisały ze stołu operacyjnego, a następnie rozwinąć górną część obłożenia w kierunku stanowiska anestezyjologicznego. Przełożyć obłożenie przez ramkę, tworząc tym samym ekran anestezyjologiczny. Dolną część obłożenia rozwinąć w kierunku dolnego krańca stołu operacyjnego, częściowo między nogami pacjenta.

8

