


1

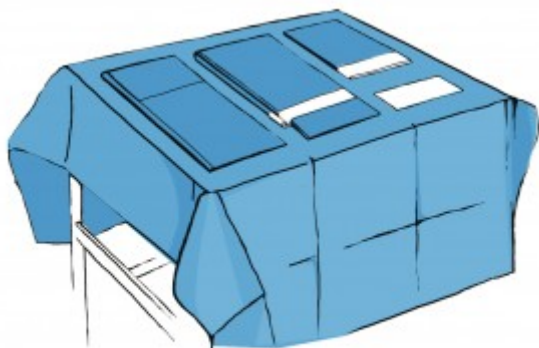

Po otwarciu opakowania połóż obłożenie na stole do instrumentarium. Zewnętrzną serwetą zabezpiecz stół oraz pozostałe elementy. Rozłóż elementy na stole.

2



Położ większy podkład Seni Soft pod pośladki pacjentki.

3



Użyj serwetę z zestawu do owinięcia nogi pacjentki aby zapewnić sterylność pola operacyjnego.

4



Po porodzie wytrzyj noworodka załączonymi serwetkami z miękkiej, białej włókniny.

5



Zawiń noworodka w mniejszy podkład Seni Soft i załóż dziecku czapeczkę na głowę.