



1

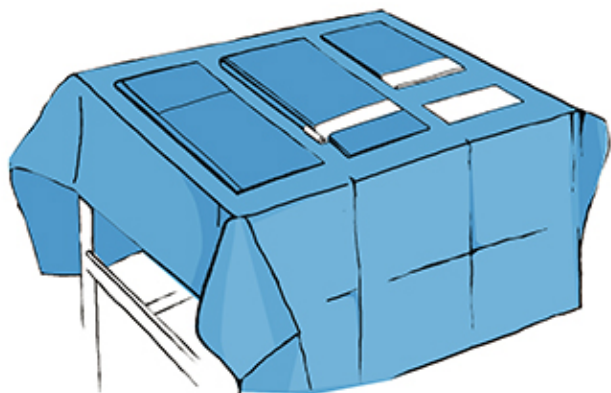

Po otwarciu opakowania połóż obłożenie na stole do instrumentarium. Zewnętrzną serwetą zabezpiecz stół oraz pozostałe elementy. Rozłóż elementy na stole i zwróć uwagę na piktogramy na serwetach oznaczające miejsce aplikacji.

2

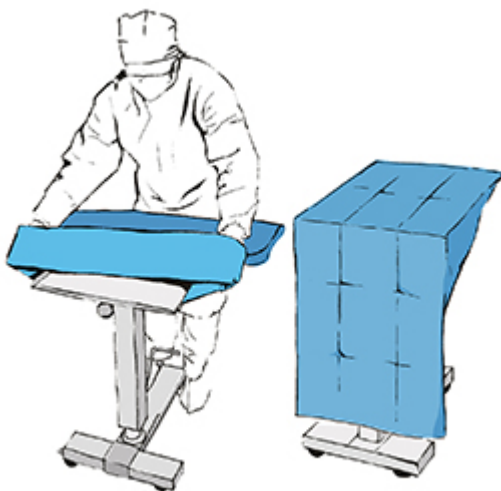

Nasuń pokrowiec w postaci worka na stolik Mayo.


3



Odklej taśmę zabezpieczającą z serwetki oznaczonej piktogramem stopy.


# Rozkładanie zestawu uniwersalnego Matodrape

4

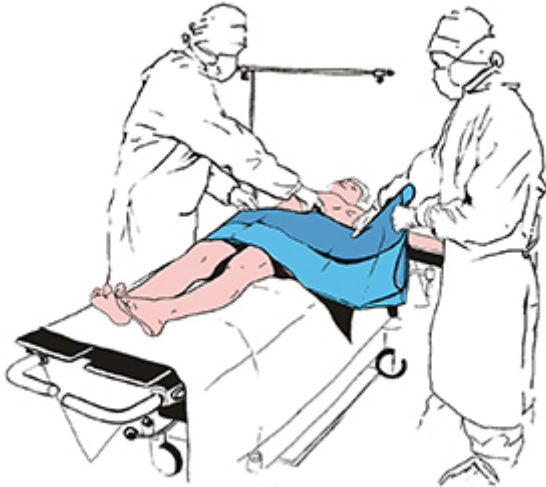

Zamocuj serwetę do ciała pacjenta i rozwiń zgodnie z kierunkiem strzałek wyznaczając dolną granicę pola operacyjnego. Pozostałą część serwety rozwiń na nogi.

5

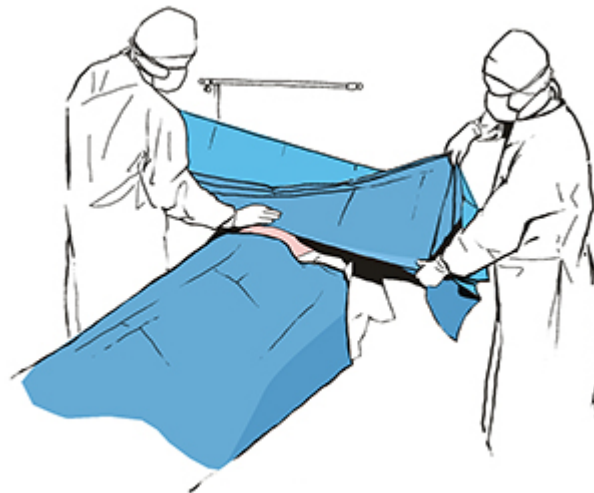

Zabezpiecz górną granicę pola operacyjnego przyklejając serwetę od strony głowy pacjenta (serweta oznaczona piktogramem głowy). Następnie rozwiń serwetę zgodnie z kierunkiem strzałek i umocuj ją do ekranu anestezjologicznego za pomocą przylepców na rogach serwety.

6



Umocuj serwety boczne wyznaczając ostatnie granice pola operacyjnego.