

INSTRUKCJA UŻYCIA - ZACISK DO PĘPOWINY

UWAGA!

Niewłaściwe umieszczenie zacisku na pępowinie może prowadzić do jego niedostatecznego zamknięcia, a w konsekwencji do utraty krwi, która u niektórych dzieci może prowadzić do zgonu. Przeczytaj instrukcję przed użyciem wyrobu.

1. Przed użyciem zawsze należy skontrolować system blokowania. Nie używać, jeśli system jest niekompletny lub zablokowany.
2. Sprawdzić grubość pępowiny. W przypadku cienkiej pępowiny może zająć konieczność złożenia jej przed założeniem zacisku, w celu uzyskania większego oporu przy zaciskaniu zacisku.
3. Umieścić pępowinę na środku korpusu zacisku.
4. Upewnić się, że żaden przedmiot nie blokuje tego miejsca (np. gaziki, narzędzia chirurgiczne itp.).
5. Zamknąć zacisk do jego zablokowania i kliknięcia. Upewnić się, że zacisk jest dobrze zamknięty i nie można go otworzyć dłońmi. Przeciąć pępowinę zgodnie z obowiązującymi standardami, w odległości uniemożliwiającej zsuniecie się zacisku.
6. Potwierdzić, że koniec pępowiny nie krwawi.
7. Regularnie sprawdzać pod kątem objawów krwawienia z powodu nieszczelnego zacisku lub uszkodzonej pępowiny.
8. Wyrób przeznaczony do użycia wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
9. Wyrób jałowy, nie może być powtórnie sterylizowany.
10. Nie należy stosować wyrobu po upływie daty przydatności do użycia.
11. Nie stosować, gdy opakowanie sterylne jest otwarte lub uszkodzone. W przypadku uszkodzenia lub niezamierzonego otwarcia opakowania wyrób należy traktować jako niejałowy i nieprzydatny do użycia.
12. Wyroby stosować tylko w dostarczonej formie.
13. Wyrób jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użycia. Powtórne użycie wiąże się z utratą właściwości funkcjonalnych wyrobu i jest niedopuszczalne.

Zacisk do pępowiny - instrukcja użycia

PRAWIDŁOWO ZAMKNIĘTY ZACISK

