

Opatrunek do mocowania kaniul Cannula F dzięki swojej prostej budowie z włókniny laminowanej folią zapewnia pewnie i bezpieczne umocowanie kaniuli (wenflonu).

Opatrunek nie przepuszcza zarazków, bakterii i płynów, a przezroczysta powierzchnia pozwala na wizualną inspekcję miejsca wkłucia. Folia wykazuje wysoką przepuszczalność pary wodnej. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie gromadzenia się wilgoci i maceracji skóry. Prawidłowo zamocowany opatrunek może pozostawać na skórze aż do 3 dni.

1



Umieść kaniulę w świetle naczynia.

2



Zdejmij papier zabezpieczający część foliową kaniuli z klejem i umieść na dłoni pacjenta. Rozcięcie między skrzydełkami powinno obejmować stopkę kaniuli.

3



Odklej papier zabezpieczający skrzydełka i przyklej wokół kaniuli.

## Zakładanie opatrunku do mocowania kaniul Cannula F

4



Odklej zewnętrzną folię zabezpieczającą kaniulę łąpiąc za niebieski pasek.

5



Efekt końcowy prawidłowego założenia opatrunku.