


Opatrunek Fixopore F posiada wyjątkowo prosty i intuicyjny system aplikacji (faliste wcięcia). Jako pomoc przy zakładaniu służy zadrukowany papier z cyframi informującymi o kolejności czynności.

1

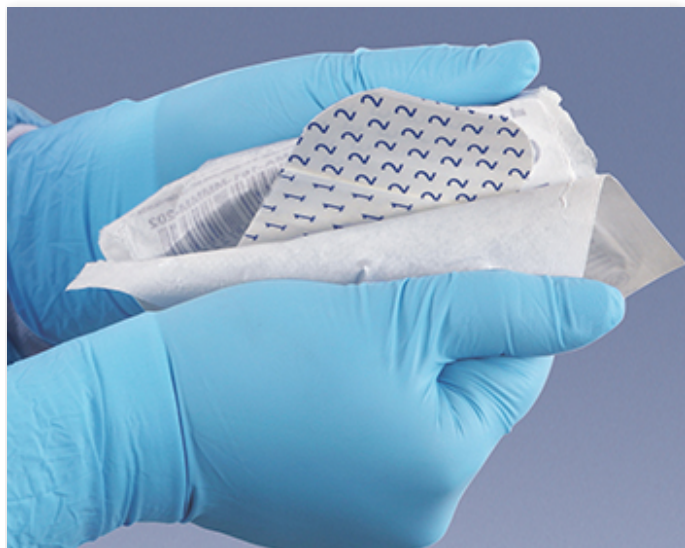

Przed założeniem opatrunku należy oczyścić ranę i osuszyć skórę otaczającą ranę.

2



Otworzyć pojedyncze opakowanie bez przerywania papieru i wyjąć opatrunek.

3



Usunąć papier ochronny od spodu oznaczony numerem 1.

Zakładanie opatrunku foliowego Fixopore F

4



Umieścić opatrunek na ranie.

5



Usunąć papier zabezpieczający oznaczony numerem 2.

6



Przykleić cały opatrunek do skóry przyciskając go do ciała.

Zakładanie opatrunku foliowego Fixopore F

7




Usunąć papier zabezpieczający oznaczony numerem 3 chwytając za brzegi przy falistym wycięciu odciągając je na boki.

8



9

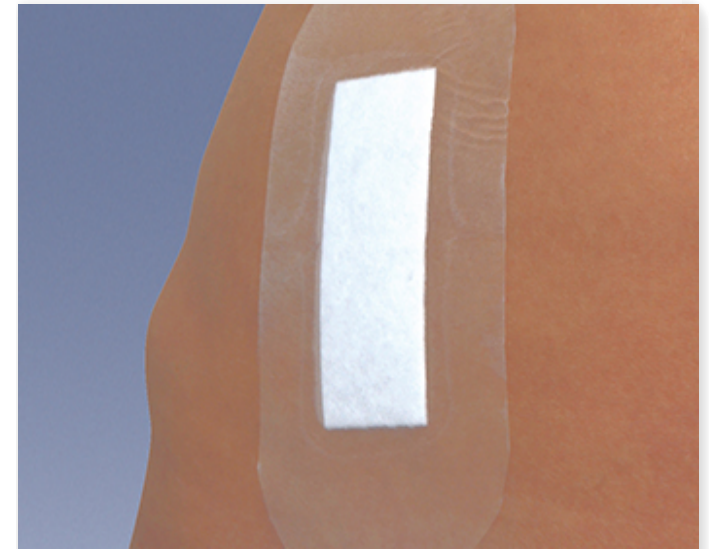

Wygładzić powierzchnię opatrunku przyciskając brzegi do skóry.

10



Nie należy napinać opatrunku podczas aplikacji. Nie należy dotykać wkładu chłonnego podczas aplikacji. Zmiana opatrunku uzależniona jest od wysięku z rany. Przezroczysta struktura podłoża umożliwia stałą obserwację skóry wokół rany.

11



W celu bezbolesnego usunięcia opatrunku należy odkleić jeden róg opatrunku a następnie rozciągając w dół rozerwać strukturę kleju, która łatwo i bezboleśnie odchodzi od skóry i rany.