

Przystępując do zabezpieczenia miejsc narażonych na powstanie otarć lub na działanie wilgoci, należy wybrać taki rozmiar opatrunku, który pokryje całą zagrożoną powierzchnię skóry.

1



Otwórz opakowanie i wyjmij opatrunek.

2



Usuń papier ochronny (biały) z centralnej dolnej części opatrunku i trzymając za papierowe brzegi umieść opatrunek na skórze.

3



Umieść klejącą warstwę na skórze.

# Zakładanie opatrunku foliowego Medisorb F

4



Usuń papier ochronny (biały) z brzegów i przykleić resztę opatrunku. Lekko dociśnij krawędzie opatrunku.

5



Usuń wierzchnią plastikową osłonę, ciągnąc za zakładki zgodnie z kierunkiem pokazanym przez zielone strzałki.

6

