

Przystępując do zabezpieczenia rany, należy wybrać taki rozmiar opatrunku wtórnego, który pokryje całą ranę z 2-3 cm marginesem.

1



Przed założeniem opatrunku należy ubrać rękawiczki, oczyścić ranę 0,9% roztworem soli fizjologicznej lub roztworem Ringera i osuszyć skórę otaczającą ranę.

2



Dobrać odpowiedni rozmiar opatrunku Medisorb P tak, aby zakrył on powierzchnię rany, oraz 2-3 cm skóry wokół niej.

3



Usunąć większy papier ochronny i nałożyć opatrunek na ranę.

Zakładanie opatrunku polimerowego Medisorb P

4



Usunąć drugi papier ochronny i przykleić opatrunek.

5



Delikatnie przycisnąć krawędzie opatrunku.

6



W przypadku stosowania Medisorb P w miejscach trudnych do opatrywania (pięta lub łokieć), dla ułatwienia przyklejenia opatrunku można rozciąć jego boki.

7




Opatrując rany odleżynowe okolicy krzyżowej, należy wygiąć opatrunek, umieścić go w zagłębieniu pośladkowym i lekko dociskając wygładzić na zewnątrz. Jeżeli pacjent nie trzyma moczu lub kału, należy dodatkowo zabezpieczyć brzegi opatrunku przylepcem.

8



UWAGI: Opatrunek należy codziennie kontrolować, żeby zapobiec ewentualnemu wyciekowi wydzieliny. Jeżeli nie ma żadnych niepokojących objawów, opatrunek może być pozostawiony na ranie do 7 dni.

9

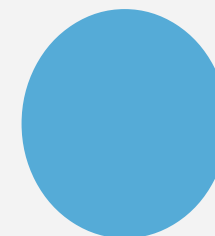

Opatrunek musi być usunięty natychmiast po stwierdzeniu jakichkolwiek klinicznych objawów infekcji. Stosowanie opatrunku Medisorb P można rozpocząć ponownie dopiero po ustąpieniu oznak stanu zapalnego.