

Przystępując do zabezpieczenia rany, należy przygotować Medisorb P PLUS oraz opatrunek wtórny do zabezpieczenia zewnętrznego np. Medisorb F, siatkę opatrunkową Codofix® lub bandaż.

1




Przed zastosowaniem opatrunku należy ubrać rękawiczki i przepłukać ranę 0,9% roztworem soli fizjologicznej i osuszyć otaczającą ją skórę.

2



Otworzyć opakowanie. Należy chwycić przeciwne krawędzie opakowania bezpośredniego (opakowanie z folii metalizowanej) i pociągnąć, aż do pełnego odkrycia opatrunku.

3

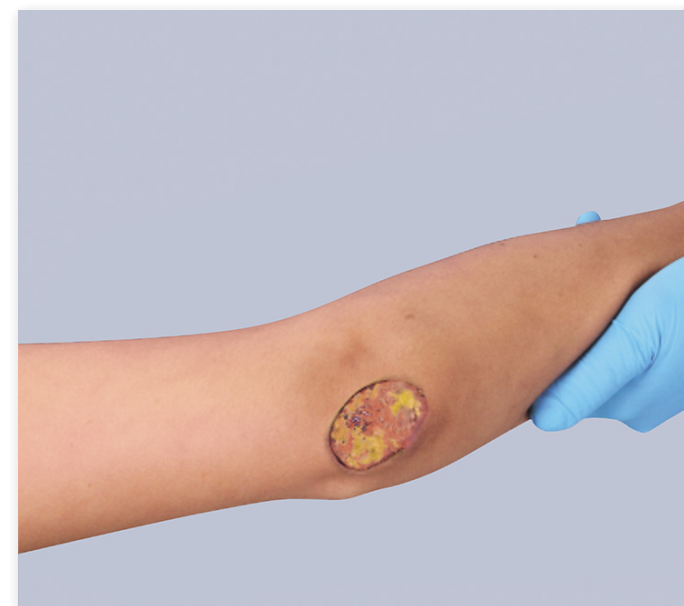

Upewnić się, że opatrunek zostanie zastosowany na ranę odpowiednią powierzchnią! Opatrunek Medisorb P PLUS posiada dwie powierzchnie: porowatą powierzchnię, która powinna być stosowana w bezpośrednim kontakcie z raną oraz gładką powierzchnię z połyskiem, która powinna być stosowana jako powierzchnia zewnętrzna, chroniąc ranę przed czynnikami zewnętrznymi.

# Zakładanie opatrunku poliuretanowego Medisorb P PLUS

4



W sposób aseptyczny należy przenieść opatrunek na ranę. W przypadku mniejszych ran, opatrunek może zostać przycięty do rozmiaru umożliwiającego całkowite zaopatrzenie rany. Opatrunek musi zakrywać powierzchnię rany oraz ok. 2-3 cm skóry wokół niej.

5



6



Opatrunek należy unieruchomić przy użyciu: opatrunku foliowego Medisorb F, elastycznej siatki opatrunkowej Codofix® lub bandaża (na zdjęciu bandaż samoprzylepny Matofix COHESIVE). Stosując bandaż do mocowania opatrunku zawsze rozwijaj go tak aby nierozwinięta część była skierowana na zewnątrz.

# Zakładanie opatrunku poliuretanowego Medisorb P PLUS

7




Opatrunek należy kontrolować codziennie i zmieniać go natychmiast w przypadku nagromadzenia się pod nim nadmiaru wydzieliny lub pojawienia się cech stanu zapalnego, czyli zaczerwienienia, obrzęku bądź nadmiernego ocieplenia okolicy rany. Leczenie można kontynuować po ustąpieniu zapalenia.

8



Opatrunek należy zmienić, kiedy wydzielina dojdzie do krawędzi opatrunku lub zacznie przeciekać. Zmiana opatrunku powinna nastąpić w ciągu 1-5 dni, w zależności od morfologii dna rany i ilości wysięku. W razie potrzeby opatrunek Medisorb P PLUS można przed jego aplikacją nasączyć roztworem antybiotyku.

9

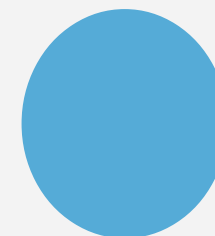

W przypadku niewielkiej ilości wydzieliny z rany, Medisorb P PLUS może wysychać i przywierać do jej powierzchni. Wówczas przy zmianie opatrunku mogą wystąpić urazy, krwawienia i ból. Aby tego uniknąć należy przed usunięciem opatrunku nawilżyć go roztworem soli fizjologicznej.