

Codosil ADHESIVE to miękki, samoprzylepny opatrunek silikonowy, który służy do rehabilitacji przerosłych blizn i bliznowców – wpływa na spłaszczenie blizny, redukcję zaczerwienienia, przez co blizna staje się mniej widoczna.

1



Wyjmij opatrunek z opakowania i dopasuj go do kształtu blizny za pomocą nożyczek. Opatrunek powinien być o 1 cm większy na brzegach niż rozmiar blizny. Nie trzeba od razu zużywać całego opatrunku, np. jeśli leczymy dużo mniejszą bliznę. Można go zużywać po kawałku.

2



Odklej białą folię zabezpieczającą chroniącą warstwę lepłą opatrunku.

3



Naklej opatrunek na powierzchnię blizny. Właściwości adhezyjne opatrunku pozwalają na jego wielokrotne przyklejanie do powierzchni skóry. Przed każdym kolejnym zastosowaniem opatrunek musi być umyty.

4



W celu zapobiegania przed przypadkowym zerwaniem opatrunku na ruchomych częściach ciała zalecane jest dodatkowo użycie podtrzymującej siatki elastycznej Codofix®. Siatka dostępna jest w 8 różnych szerokościach, co umożliwia precyzyjne dobranie wyrobu do obwodu zabezpieczanej części ciała.