



Codopress[®] PREMIUM

Wyroby uciskowe
wykonane na zamówienie

szyte
na miarę

indywidualnie
dla każdego
Pacjenta

TRICOMED SA

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Codopress® PREMIUM

Charakterystyka wyrobów

Wyroby Codopress® PREMIUM wykonywane są na podstawie indywidualnych zamówień. Zadaniem wyrobów jest zapewnienie I stopnia ucisku.


W celu zapewnienia prawidłowego zwymiarowania, pacjenci podczas pobierania wymiarów powinni mieć rany wygojone i niezabezpieczone opatrunkami.

Ubrania uciskowe:

- zapewniają odpowiedni ucisk na bliznę
- mogą być stosowane w połączeniu z innymi rodzajami terapii np. z opatrunkami silikonowymi
- nie powodują uczuleń i podrażnień skóry
- redukują uczucie swędzenia
- zapobiegają powstawaniu przykurczów stawów.



W terapii blizn
czas jest najważniejszy
nie przegap go !

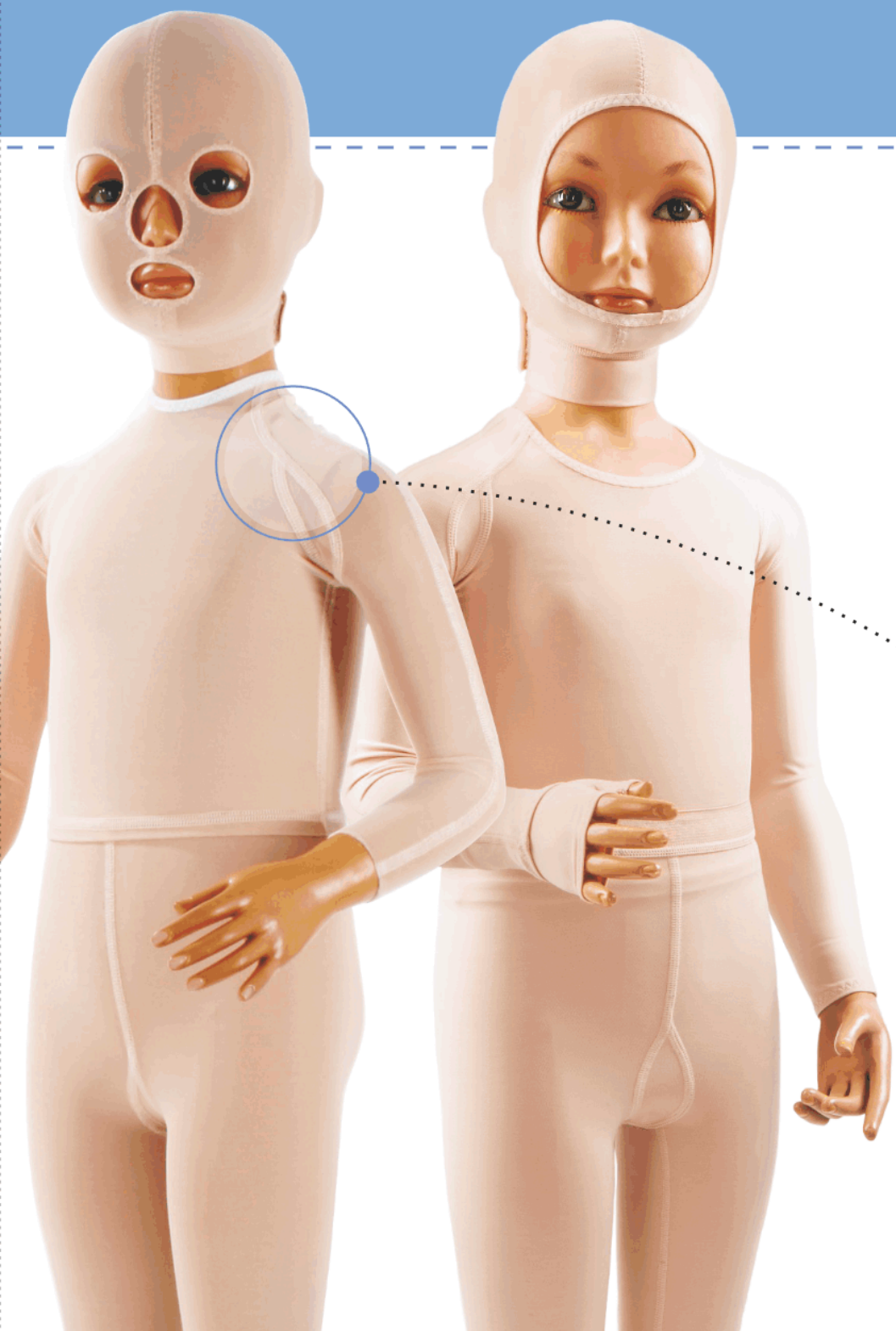


Codopress® PREMIUM

Budowa wyrobów uciskowych

Wyroby uciskowe Codopress® PREMIUM wykonane są z wysokoelastycznej, oddychającej dzianiny.

Wyroby Codopress® PREMIUM wykonane są z miękkiej oraz bardzo elastycznej dzianiny składającej się z poliamidu i elastanu.

Elementy dzianiny łączone są metodami szwalniczymi za pomocą płaskich szwów, co eliminuje ryzyko dodatkowego podrażnienia.

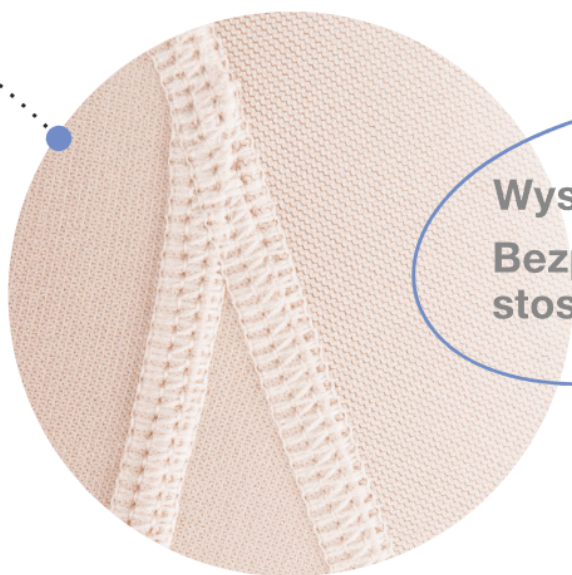

Wysoka jakość
Bezpieczeństwo
stosowania



Dzianina Codopress® PREMIUM posiada certyfikat:
OEKO-TEX Standard 100.

Leczenie skojarzone

W celu zwiększenia komfortu Pacjenta i skuteczności terapii zaleca się leczenie skojarzone, polegające na łączeniu wyrobów uciskowych Codopress® PREMIUM wraz z opatrunkami silikonowymi do rehabilitacji blizn Codosil® ADHESIVE.



opatrunek silikonowy
Codosil® ADHESIVE

Opatrunek silikonowy umieszczony bezpośrednio na bliznie wspomaga proces rehabilitacji, redukuje wielkość i zaczerwienienie blizny oraz zmniejsza uczucie swędzenia.

Codopress® PREMIUM


Zastosowanie wyrobów

Wyroby uciskowe Codopress® PREMIUM

stosowane są w celu zapobiegania powstawaniu przerostowych blizn po oparzeniach i po operacjach oraz bliznowców (keloidów).

- Na początku terapii na obwodowych, nie uciskanych częściach ciała może wystąpić obrzęk, który zwykle ustępuje po kilku dniach.
- O sposobie stosowania ubrań Codopress® PREMIUM u dzieci decyduje lekarz specjalista.
- W przypadkach trudności w tolerancji terapii uciskowej przez pacjenta istnieje możliwość stopniowego przyzwyczajania organizmu do stosowania wyrobu. Należy wówczas skontaktować się z lekarzem prowadzącym leczenie.
- Całość terapii wymaga na ogół kilkukrotnego zakupu wyrobów uciskowych w zależności od ich zużywania się lub zmiany wymiarów pacjentów (zwłaszcza u dzieci). Wyroby uciskowe typu rękawiczka lub skarpetka, ze względu na miejsce używania, mogą zużywać się szybciej niż pozostałe wyroby.

Przykładowy asortyment wyrobów:

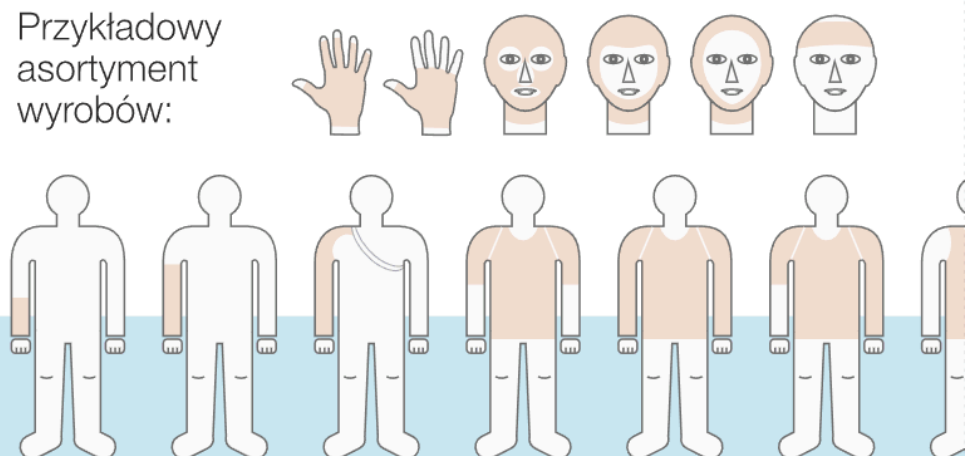



W każdym przypadku decyzję o zakończeniu terapii podejmuje lekarz.


Wyroby Codopress® PREMIUM szyte są na miarę, indywidualnie do potrzeb każdego Pacjenta

Wyrób wielokrotnego użytku. Informacje dotyczące konserwacji wyrobu znajdują się w Instrukcji Używania.

Wyrób ulega naturalnemu zużyciu wynikającemu z stosowania.

Nie zaleca się używania wyrobów Codopress® PREMIUM u pacjentów:

- z niewygojonymi ranami i/lub otarciami naskórka,
- chorujących na miażdżycę,
- cierpiących na owrzodzenia i obrzęk,
- ze stanami zapalnymi skóry z wysiękiem,
- w przypadku uczulenia na surowce, z których wykonany jest wyrób,
- w okresie ciąży.

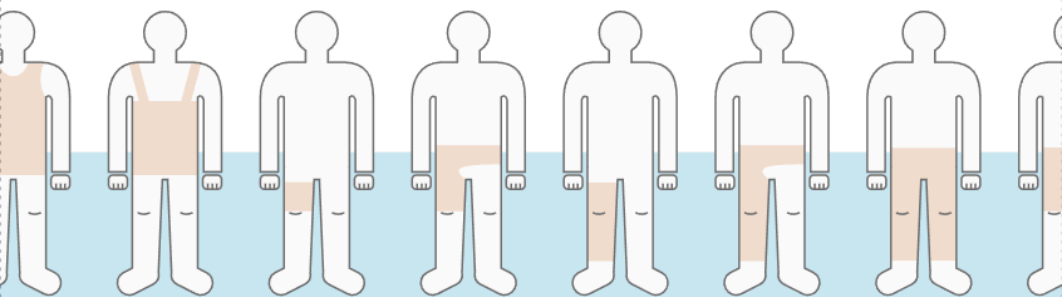

Pacjenci powinni mieć
wygojone rany,
bez opatrunków



Co należy zrobić żeby otrzymać wyrób?

Aby otrzymać wyrób uciskowy Pacjent powinien:

skontaktować się telefonicznie lub mailowo
z firmą TRICOMED SA w celu umówienia wizyty.



+48 42 684 78 21, +48 723 185 454




pracownia.codopress@tzmo-global.com

1. Pacjent może osobiście przyjechać do siedziby firmy w umówionym terminie, gdzie pobierana jest miara i szyty wyrób. Gotowy produkt przekazywany jest tego samego dnia.
2. Pacjent może przyjechać do punktu pomiarowego w umówionym terminie w celu pobrania miary. Gotowy wyrób zostanie przekazany na wskazany przez Pacjenta adres. Przy kolejnym zamówieniu identycznego wyrobu uciskowego istnieje możliwość złożenia zamówienia telefonicznego lub mailowego.



codopress.pl

tricomed.pl/products/codopress

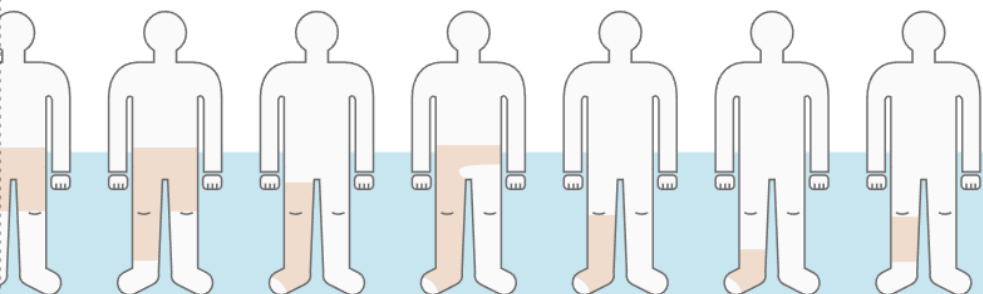



Wszystkie wyroby szyte są na indywidualne zamówienie Pacjenta po dokonaniu jego obmiarów.

Co to jest presoterapia ?

Presoterapia jest techniką prewencyjno-terapeutyczną, która polega na stosowaniu kompresji z wykorzystaniem stałego ucisku w postaci wyrobów uciskowych.

W celu osiągnięcia najlepszych efektów terapii wyroby takie powinny być dopasowane indywidualnie dla każdego Pacjenta (szyte na miarę). Dla osiągnięcia najlepszych efektów estetycznych wyroby uciskowe powinny być stosowane niezwłocznie po całkowitym wyleczeniu ran.

Czas trwania terapii uciskowej zwykle nie jest krótszy niż 6-9 miesięcy i trwa dopóki nie pojawią się wyraźne objawy rehabilitacji (spłaszczenie, zblednięcie i zmiękczenie blizny). Dokładny czas używania wyrobu określa lekarz prowadzący leczenie.

Wyroby uciskowe Codopress[®] PREMIUM (koszulki, opaski, maski, itp.) zaleca się używać przez całą dobę z przerwą na toaletę ciała i masaż oraz konserwację wyrobu.

Przerywanie czasu stosowania wyrobu znacznie zmniejsza skuteczność terapii.

Więcej informacji na temat wyrobów uciskowych Codopress[®] PREMIUM znajduje się na stronach:



tricomed.pl/products/codopress
codopress.pl
medisorb.pl



Codopress® PREMIUM

TRICOMED SA

To polska firma z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją w projektowaniu i produkcji wyrobów medycznych.


ponad
50 lat
tradycji

Obecnie działa jako spółka akcyjna w ramach Grupy Kapitałowej TZMO SA. Oferta firmy obejmuje przede wszystkim protezy, implanty, oznaczniki chirurgiczne, specjalistyczne opatrunki, narzędzia chirurgiczne wielokrotnego użytku, stazy taktyczne i wyroby uciskowe.

W 2009 roku Tricomed SA uzyskał status Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Wytwarzane w firmie produkty posiadają znak bezpieczeństwa CE, a ich produkcja odbywa się zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością PN-EN ISO 13485.

Więcej informacji na stronie: tricomed.pl

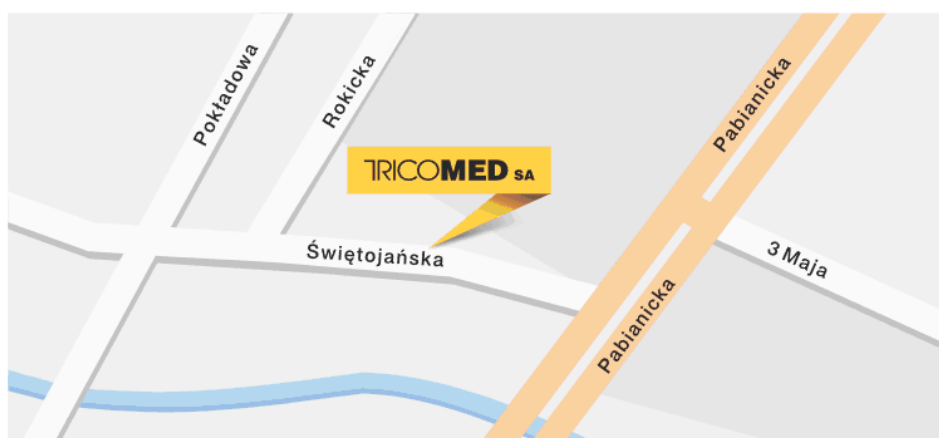

TRICOMED S.A.
ul. Świętojańska 5/9, 93-493 Łódź, Poland
tricomed.com



Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, Poland
tzmo-global.com, matopat-global.com

matopat@tzmo-global.com