






Rozkładanie zestawu do artroskopii kolana Matodrape

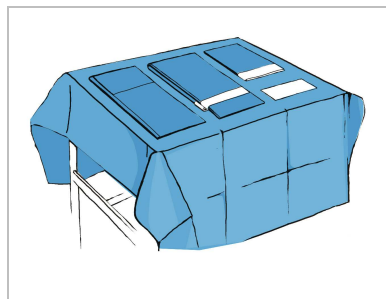

1. Po otwarciu opakowania połóż obłożenie na stole do instrumentarium. Zewnętrzną serwetą zabezpiecz stół oraz pozostałe elementy. Rozłóż elementy na stole i zwróć uwagę na piktogramy na serwetach oznaczające miejsce aplikacji.

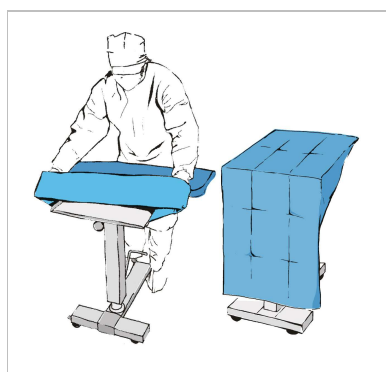


2. Nasuń pokrowiec w postaci worka na stolik Mayo.

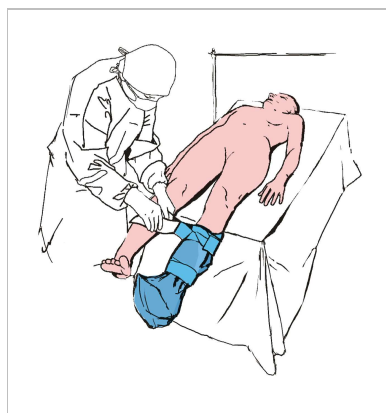


3. Załóż pokrowiec na nogę pacjenta i umocuj go pod kolanem taśmami samoprzylepnymi.



4. Rozłóż serwetę złożoną na pół. Serweta jest złożona w taki sposób, że otwór z elementem elastycznym jest od razu widoczny.

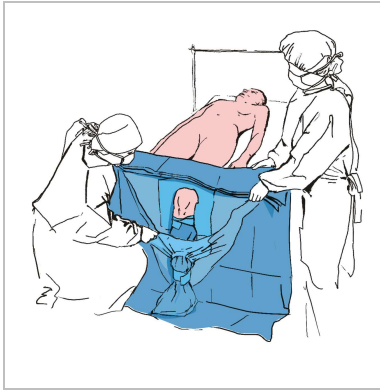

5. Rozłóż serwetę w górę ciała pacjenta przekładając nogę w pokrowcu przez elastyczne otwory. Umocuj dolny otwór tuż pod kolanem tak by kolano znalazło się między otworami.

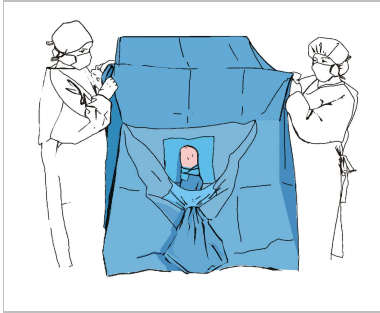

6. Rozłóż pozostałą część serwety przykrywając całego pacjenta. Od strony głowy umocuj serwetę do ekranu anestetycznego za pomocą przylepców na rogach serwety.