





Rozkładanie zestawu do cesarskiego cięcia Matodrape

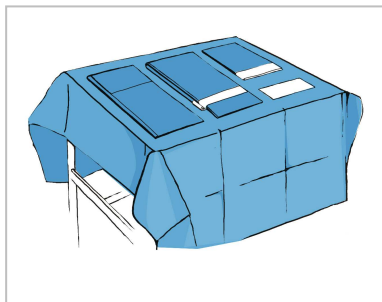


1. Po otwarciu opakowania połóż obłożenie na stole do instrumentarium. Zewnętrzną serwetą zabezpiecz stół oraz pozostałe elementy. Rozłóż elementy na stole i zwróć uwagę na piktogramy na serwetach oznaczające miejsce aplikacji.

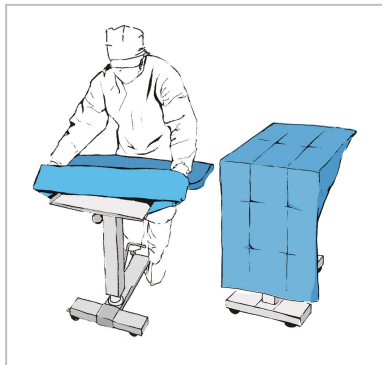

2. Nasuń pokrowiec w postaci worka na stolik Mayo.




3. Usuń papier zabezpieczający z folii chirurgicznej w serwecie głównej i umocuj ją na brzuchu pacjentki.

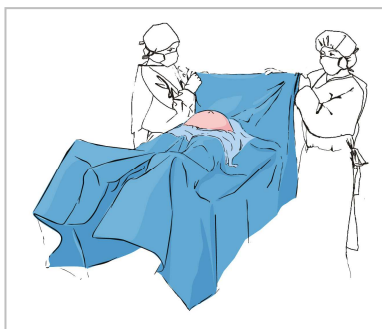

4. Rozwiń dolną część serwety na nogi pacjentki, a następnie rozwiń górną część serwety od strony głowy pacjentki i umocuj ją do ekranu anestetycznego za pomocą przylepców na rogach serwety.



5. Wytrzyj noworodka załączonymi serwetkami z miękkiej, białej włókniny.

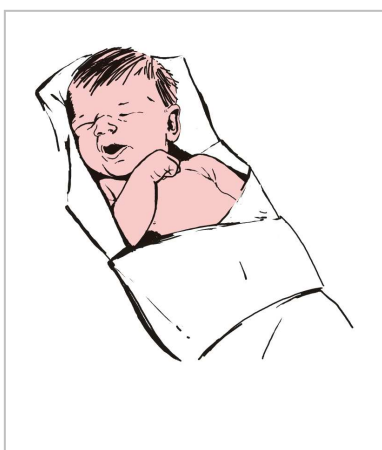

6. Zawień noworodka w podkład Seni Soft i załóż dziecku czapeczkę na głowę.