



## Zakładanie opatrunku Cannula F

Opatrunek do mocowania kaniul **Cannula F** dzięki swojej prostej budowie z włókniny laminowanej folią zapewnia pewnie i bezpieczne umocowanie kaniuli (wenflonu). Opatrunek nie przepuszcza zarazków, bakterii i płynów, a przezroczysta powierzchnia pozwala na wizualną inspekcję miejsca wkłucia. Folia wykazuje wysoką przepuszczalność pary wodnej. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie gromadzenia się wilgoci i maceracji skóry. Prawidłowo zamocowany opatrunek może pozostawać na skórze aż do 3 dni.



1. Umieść kaniulę w świetle naczynia.



2. Zdejmij papier zabezpieczający część foliową kaniuli z klejem i umieść na dłoni pacjenta. Rozcięcie między skrzydełkami powinno obejmować stopkę kaniuli.



3. Odklej papier zabezpieczający skrzydełka i przyklej wokół kaniuli.



4. Odklej zewnętrzną folię zabezpieczającą kaniulę łapiąc za niebieski pasek.



5. Efekt końcowy prawidłowego założenia opatrunku.