
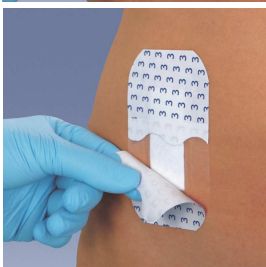


Zakładanie opatrunku foliowego Fixopore F

Opatrunek Fixopore F posiada wyjątkowo prosty i intuicyjny system aplikacji (faliste wcięcie). Jako pomoc przy zakładaniu służy zadrukowany papier z cyframi informującymi o kolejności czynności.

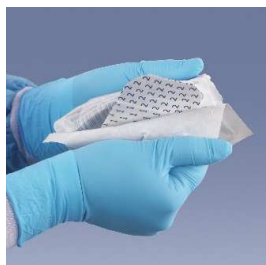

1. Przed założeniem opatrunku należy oczyścić ranę i osuszyć skórę otaczającą ranę.
2. Otworzyć pojedyncze opakowanie bez przerywania papieru i wyjąć opatrunek.
3. Usunąć papier ochronny od spodu oznaczony numerem 1.
4. Umieścić opatrunek na ranie.
5. Usunąć papier zabezpieczający oznaczony numerem 2.
6. Przykleić cały opatrunek do skóry przyciskając go do ciała.
7. Usunąć papier zabezpieczający oznaczony numerem 3 chwytając za brzegi przy falistym wycięciu odciągając je na boki.
8. Wygładzić powierzchnię opatrunku przyciskając brzegi do skóry.

UWAGI:

9. Nie należy napinać opatrunku podczas aplikacji.
10. Nie należy dotykać wkładu chłonnego podczas aplikacji.
11. Zmiana opatrunku uzależniona jest od wysięku z rany.
12. Przezroczysta struktura podłoża umożliwia stałą obserwację skóry wokół rany.
13. W celu bezbolesnego usunięcia opatrunku należy odkleić jeden róg opatrunku a następnie rozciągając w dół rozerwać strukturę kleju, która łatwo i bezboleśnie odchodzi od skóry i rany.

