


Zakładanie opatrunku foliowego Medisorb F


Przystępując do zabezpieczenia miejsc narażonych na powstanie otarć lub na działanie wilgoci, należy wybrać taki rozmiar opatrunku, który pokryje całą zagrożoną powierzchnię skóry. Przed założeniem opatrunku należy ubrać rękawiczki, a następnie dobrze oczyścić i wysuszyć skórę. Kolejnym krokiem jest założenie opatrunku.

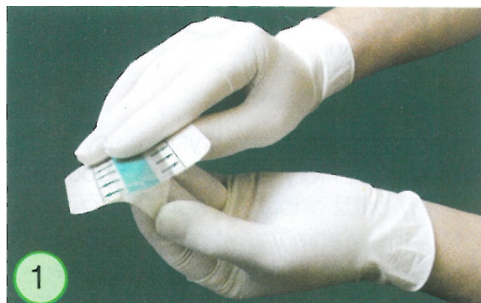

1. Usunąć papier ochronny (biały) z centralnej dolnej części opatrunku i trzymając za papierowe brzegi umieścić opatrunek na skórze.



2. Usunąć papier ochronny (biały) z brzegów i przykleić resztę opatrunku. Lekko docisnąć krawędzie opatrunku.

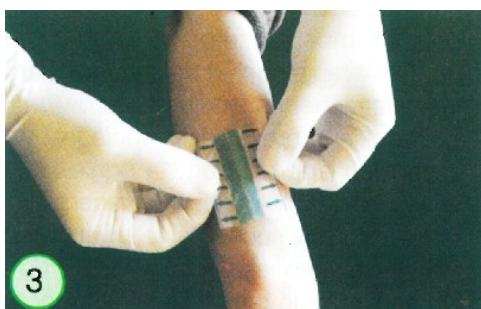

3 i 4. Usunąć wierzchnią plastikową osłonę, ciągnąc za zakładki zgodnie z kierunkiem pokazanym przez zielone strzałki.

