

## Zakładanie opatrunku hydrożelowego Medisorb G

Przystępując do zabezpieczenia miejsc z suchą tkanką martwiczą, należy przygotować Medisorb G oraz opatrunek wtórny do zabezpieczenia zewnętrznego np. Medisorb F. Należy wybrać taki rozmiar opatrunku wtórnego, który pokryje całą ranę.



1. Przed zastosowaniem opatrunku należy ubrać rękawiczki i przepłukać ranę 0,9% roztworem soli fizjologicznej i osuszyć otaczającą ją skórę.

2. Następnie należy wyjąć tubę Medisorb G z opakowania i ściągnąć zatyczkę, końcówkę przetrzeć chusteczką do dezynfekcji.

3. Zachowując czystość końcówki opakowania należy delikatnie wycisnąć żel na powierzchnię rany.



4. Wyciśnięty żel powinien wystawać ponad martwymi komórkami, na wysokość minimum 5mm.

5. Następnie należy zakryć ranę opatrunkiem wtórnym np. Medisorb F, który jest przezroczysty i umożliwia obserwację rany.



### Przy wyborze Medisorb F:

6. Usunąć papier ochronny (biały) z centralnej dolnej części opatrunku i trzymając za papierowe brzegi umieścić opatrunek na skórze.

7. Usunąć papier ochronny (biały) z brzegów i przykleić resztę opatrunku. Lekko docisnąć krawędzie opatrunku.

8. Usunąć wierzchnią plastikową osłonę, ciągnąc za zakładki zgodnie z kierunkiem pokazanym przez zielone strzałki.



### UWAGI:

9. Jeden opatrunek Medisorb G przeznaczony jest na jedno użycie dla jednej osoby, niewykorzystaną część należy wyrzucić.

10. W przypadku ran martwiczych Medisorb G należy zmieniać, co 24 godziny. W przypadku ran czystych żel może być pozostawiony maksymalnie przez okres 3 dni. Opatrunek należy zmienić natychmiast, jeśli pojawi się przeciek żelu poza opatrunek wtórny.



11. Aby usunąć żel z rany, należy przemyć ją 0,9% roztworem soli fizjologicznej.

