

Zakładanie opatrunku polimerowego Medisorb P

Przystępując do zabezpieczenia rany, należy wybrać taki rozmiar opatrunku wtórnego, który pokryje całą ranę z 2-3 cm marginesem.



1. Przed założeniem opatrunku należy ubrać rękawiczki, oczyścić ranę 0,9% roztworem soli fizjologicznej lub roztworem Ringera i osuszyć skórę otaczającą ranę.

2. Dobrać odpowiedni rozmiar opatrunku Medisorb P tak, aby zakrył on powierzchnię rany, oraz 2-3 cm skóry wokół niej.

3. Usunąć większy papier ochronny i nałożyć opatrunek na ranę.

4. Usunąć drugi papier ochronny i przykleić opatrunek delikatnie przyciskając jego krawędzie.



5. W przypadku stosowania Medisorb P w miejscach trudnych do opatrywania (pięta lub łokieć), dla ułatwienia przyklejenia opatrunku można rozciąć jego boki.

6. Opatrując rany odleżynowe okolicy krzyżowej, należy wygiąć opatrunek, umieścić go w zagłębieniu pośladkowym i lekko dociskając wygładzić na zewnątrz. Jeżeli pacjent nie trzyma moczu lub kału, należy dodatkowo zabezpieczyć brzegi opatrunku przyklepcem.

UWAGI:

7. Opatrunek należy codziennie kontrolować, żeby zapobiec ewentualnemu wyciekowi wydzieliny. Jeżeli nie ma żadnych niepokojących objawów, opatrunek może być pozostawiony na ranie do 7 dni. Opatrunek musi być usunięty natychmiast po stwierdzeniu jakichkolwiek klinicznych objawów infekcji. Stosowanie opatrunku Medisorb P można rozpocząć ponownie dopiero po ustąpieniu oznak stanu zapalnego.

