

Zakładanie opatrunku z alginianów wapnia Medisorb A

Przystępując do zabezpieczenia rany, należy przygotować Medisorb A oraz opatrunek wtórny do zabezpieczenia zewnętrznego np. Medisorb F lub Medisorb P. Należy wybrać taki rozmiar opatrunku wtórnego, który pokryje całą ranę.



1. Przed zastosowaniem opatrunku należy ubrać rękawiczki i przepłukać ranę 0,9% roztworem soli fizjologicznej i osuszyć otaczającą ją skórę.

2. Wybrać odpowiedni opatrunek, pokrywający całą powierzchnię rany z dodatkowym 2 cm marginesem.

3. Położyć Medisorb A bezpośrednio na ranę lub włożyć do rany.

4. Następnie należy zakryć ranę opatrunkiem wtórnym np. Medisorb F, który jest przezroczysty i umożliwia obserwację rany.




Przy wyborze Medisorb F:

5. Usunąć papier ochronny (biały) z centralnej dolnej części opatrunku i trzymając za papierowe brzegi umieścić opatrunek na skórze.

6. Usunąć papier ochronny (biały) z brzegów i przykleić resztę opatrunku. Lekko docisnąć krawędzie opatrunku.

7. Usunąć wierzchnią plastikową osłonę, ciągnąc za zakładki zgodnie z kierunkiem pokazanym przez zielone strzałki.

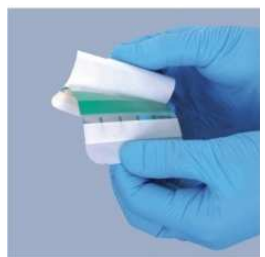

UWAGI:

8. W przypadku owrzodzenia podudzi Medisorb A może być stosowany w połączeniu z terapią uciskową, jeśli takie jest zalecenie lekarskie.

9. Na ranach niezainfekowanych opatrunek może przebywać maksymalnie 7 dni.

10. Na ranach zainfekowanych może być stosowany tylko i wyłącznie z przepisu i pod kontrolą lekarza.

11. Zmiana opatrunku powinna nastąpić, kiedy powierzchnia Medisorb A jest całkowicie przekształcona w żel. Odstęp czasowy pomiędzy zmianami opatrunku zależy całkowicie od stanu rany.

12. Medisorb A daje się łatwo usunąć bez powodowania bólu i zakłócania procesu gojenia rany: należy najpierw usunąć zewnętrzny opatrunek, następnie używając sterylnej pincety usunąć Medisorb A z rany, a na końcu oczyścić ranę z resztek żelu, przemywając sterylnym 0,9 % roztworem soli.

