

## Zakładanie opatrunku hemostatycznego Tromboguard®

Przystępując do zabezpieczenia rany, należy przygotować opatrunek Tromboguard® oraz opatrunek wtórny do zabezpieczenia zewnętrznego np. bandaż Matofix COHESIVE.



1. Przed zastosowaniem opatrunku należy ubrać rękawiczki.
2. Otworzyć opakowanie.
3. Należy chwycić przeciwne krawędzie opakowania bezpośredniego (opakowanie z folii metalizowanej) i pociągnąć, aż do pełnego odkrycia opatrunku.



4. Upewnić się, że opatrunek zostanie zastosowany na ranę odpowiednią powierzchnią! Opatrunek Tromboguard® posiada dwie powierzchnie:

- chropowatą powierzchnię aktywną, która powinna być stosowana w bezpośrednim kontakcie z miejscem krwawienia
- gładką powierzchnię z połyskiem, która powinna być stosowana jako powierzchnia zewnętrzna, chroniąc ranę przed czynnikami zewnętrznymi.



5. W sposób aseptyczny należy przenieść opatrunek na miejsce krwawienia. W przypadku mniejszych ran, opatrunek może zostać przycięty do rozmiaru umożliwiającego całkowite zaopatrzenie rany z naddatkiem 2–3 cm poza nią. W przypadku większych ran dopuszcza się stosowanie większej ilości opatrunków.



6. Należy zwrócić uwagę, aby miejsce krwawienia było bezpośrednio i w pełni zabezpieczone opatrunkiem.



7. Należy zastosować miejscowy ucisk, przez co najmniej trzy minuty, aż do zatamowania/zmniejszenia krwotoku.



8. Opatrunek należy unieruchomić przy użyciu elastycznej siatki opatrunkowej Codofix® lub bandaża (na zdjęciu bandaż samoprzylepny Matofix COHESIVE).