

Codopress®

Codopress® PREMIUM



Wyroby uciskowe stosowane
w terapii uciskowej w celu zapobiegania
powstawaniu przerostowych blizn
pooparzeniowych i pooperacyjnych.



**szyte
na miarę
indywidualnie
dla każdego
Pacjenta**

TRICOMED

CO NALEŻY ZROBIĆ ŻEBY
OTRZYMAĆ WYRÓB
Codopress® i Codopress® PREMIUM



**Aby otrzymać wyrób uciskowy Pacjent
powinien:**

Skontaktować się telefonicznie z firmą TRICOMED SA
w celu umówienia wizyty

- Osobiście przyjechać do siedziby firmy w umówionym terminie w celu pobrania miary i uszycia wyrobu
- Gotowy wyrób zostaje wykonany i przekazany w tym samym dniu, w którym odbywa się wizyta

**Skontaktować się telefonicznie z najbliższym punktem
pomiarowym w celu umówienia wizyty**

lista punktów pomiarowych dostępna
na stronach internetowych:

www.codopress.pl

www.tricomed.pl/products/codopress

- Osobiście przyjechać do punktu pomiarowego w umówionym terminie w celu pobrania miary
- Gotowy wyrób zostanie przesłany paczką na wskazany przez Pacjenta adres

Przy kolejnym zamówieniu identycznego wyrobu uciskowego istnieje możliwość złożenia zamówienia telefonicznego lub mailowego.

Więcej informacji na temat wyrobów uciskowych Codopress® i Codopress® PREMIUM znajduje się na stronach:

www.tricomed.pl/products/codopress

www.codopress.pl

www.na-rany.pl

Wszystkie
wyroby **szyte** są
**na indywidualne
zamówienie Pacjenta**
po dokonaniu jego obmiarów.


**Pacjenci powinni mieć
wygojone rany,
bez opatrunków.**



Wyroby **Codopress®** i **Codopress® PREMIUM** zapewniają I stopień kompresji, który gwarantuje najlepsze efekty działania w procesie rehabilitacji i zapobieganiu powstawania blizn pooparzeniowych i pooperacyjnych.

- mogą być stosowane w połączeniu z innymi rodzajami terapii (np. opatrunkami silikonowymi, aplikacją maści aktywnych na powierzchnię blizn)
- nie powodują uczuleń i podrażnień skóry
- wykonane są z przędzy objętych certyfikatem jakości Oeko-Tex Standard 100
- zmiękczają blizny, zapobiegają powstawaniu blizn przerostowych i keloidów oraz zmniejszają widoczność blizny,
- zapobiegają powstawaniu przykurczów,
- redukują uczucie swędzenia.

w terapii
blizn
czas jest
najważniejszy
nie przegap
go

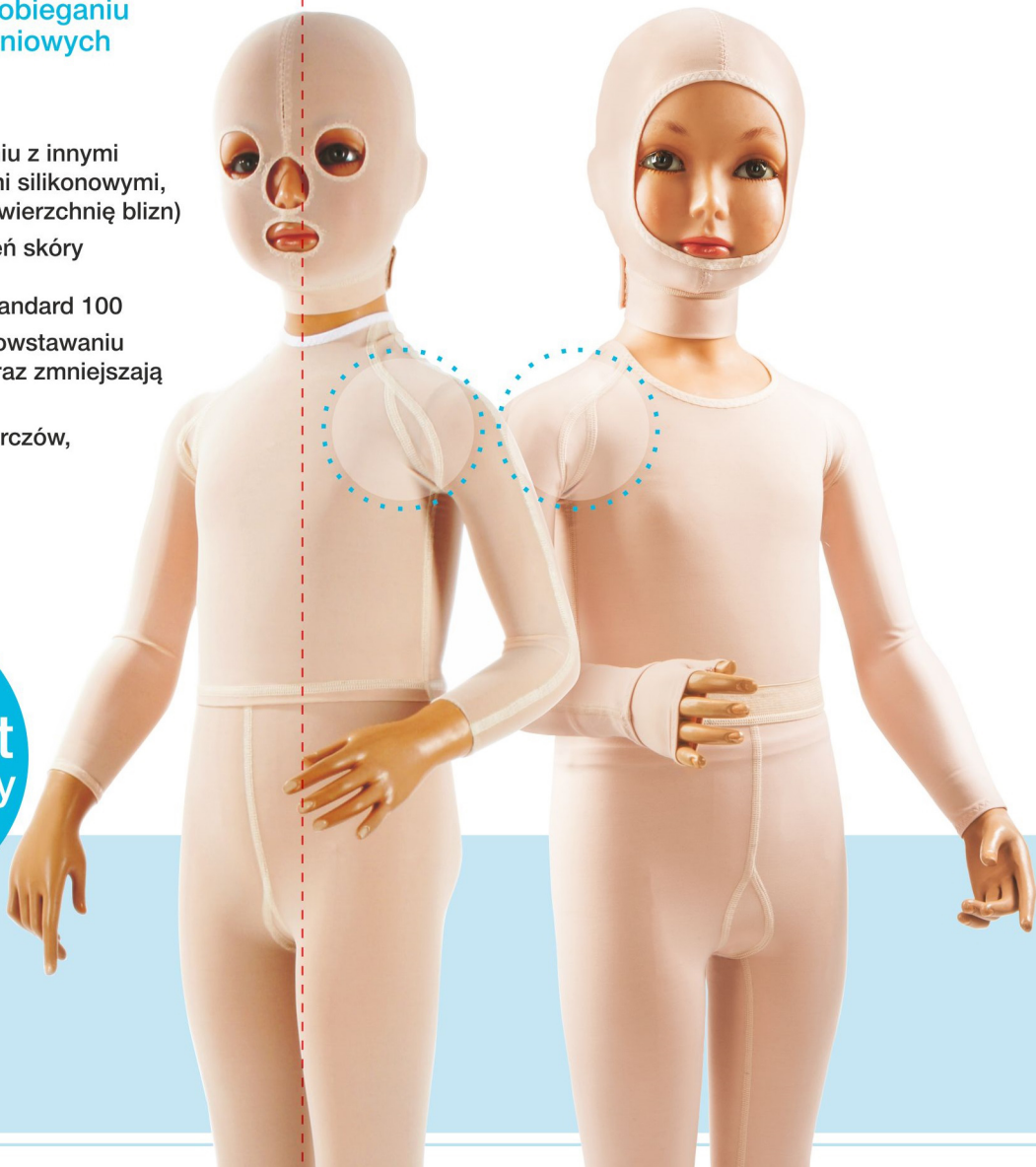Codopress®**Codopress® PREMIUM**




Codopress® i Codopress® PREMIUM różni zastosowany rodzaj dzianiny

Wyroby uciskowe Codopress® wykonane są z wysokoelastycznej, oddychającej dzianiny.

Wyroby Codopress® PREMIUM wykonane są z miękkich oraz bardzo elastycznych dzianin o podwyższonych walorach użytkowych.

Elementy dzianiny (zarówno Codopress®, jak i Codopress® PREMIUM) łączone są metodami szwalniczymi za pomocą płaskich szwów, co eliminuje ryzyko dodatkowego podrażnienia.

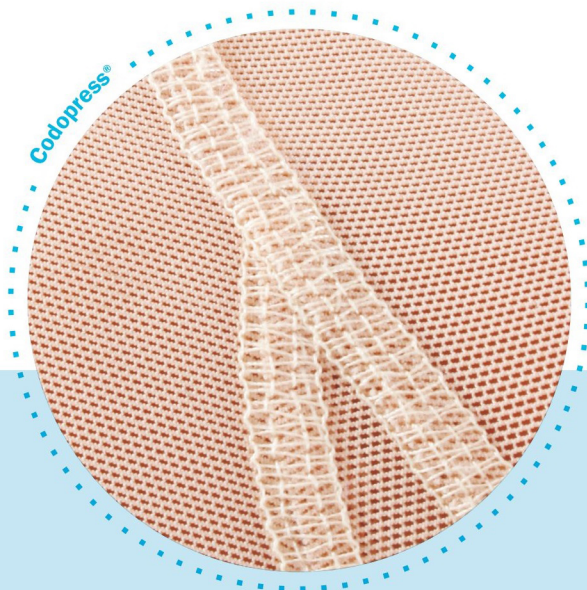

Wszystkie materiały stosowane w produkcji wyrobów Codopress® i Codopress® PREMIUM posiadają certyfikaty OEKO-TEX Standard 100.

Powyższy standard świadczy o ich **wysokiej jakości** oraz zapewnia **bezpieczeństwo** ich stosowania.

Pacjent może wybrać rodzaj dzianiny, z którego wytwarzany będzie wyrób.

WYSOKA
jakość
bezpieczeństwo
stosowania





Wyroby uciskowe powinny być noszone nieprzerwanie

- **Od 6 do 24 miesięcy** (o czasie terapii decyduje lekarz) przez **22-23 godziny na dobę**, z przerwą na toaletę ciała i masaż blizn z użyciem maści aktywnych oraz konserwację wyrobu.
- **U dzieci do 1,5 roku życia** zaleca się zakładanie wyrobu na **3-4 godziny z przerwami 1-2 godzinnymi**.
- **Niewskazane jest przerywanie terapii.**
W przypadkach dotyczących trudności w tolerancji terapii uciskowej przez Pacjenta istnieje możliwość stopniowego przyzwyczajania organizmu do stosowania wyrobu.
- Na początku terapii na obwodowych nieuciskanych częściach ciała może wystąpić obrzęk, który zwykle ustępuje po kilku dniach.
- W przypadku trudności w akceptacji wyrobu uciskowego należy problem skonsultować z lekarzem prowadzącym leczenie.

Pojawienie się wyraźnych objawów wyleczenia, tj. spłaszczenie, zblednięcie, zmięknienie blizny, może być sygnałem do zaprzestania stosowania wyrobów uciskowych.

W każdym jednak przypadku decyzję o zakończeniu terapii podejmuje lekarz.


Całość terapii wymaga na ogół kilkukrotnego zakupu wyrobów w zależności od stopnia utraty terapeutycznej elastyczności lub zmiany wymiarów Pacjenta (zwłaszcza dzieci).

Wyroby Codopress® oraz Codopress® PREMIUM szyte są na miarę, indywidualnie do potrzeb każdego Pacjenta

Wszystkie wyroby stosowane w leczeniu oparzeń są szyte na indywidualne zamówienie Pacjenta, po dokonaniu jego obmiarów.

Pacjenci zgłaszający się do firmy Tricomed SA powinni mieć wygojone rany, bez opatrunków, aby można było prawidłowo pobrać miarę i przymierzyć wyrób, nie uszkodzając naskórka.

Nie zaleca się stosowania wyrobu u osób cierpiących na miażdżycę, osób uczulonych na tworzywa sztuczne oraz u kobiet w ciąży.

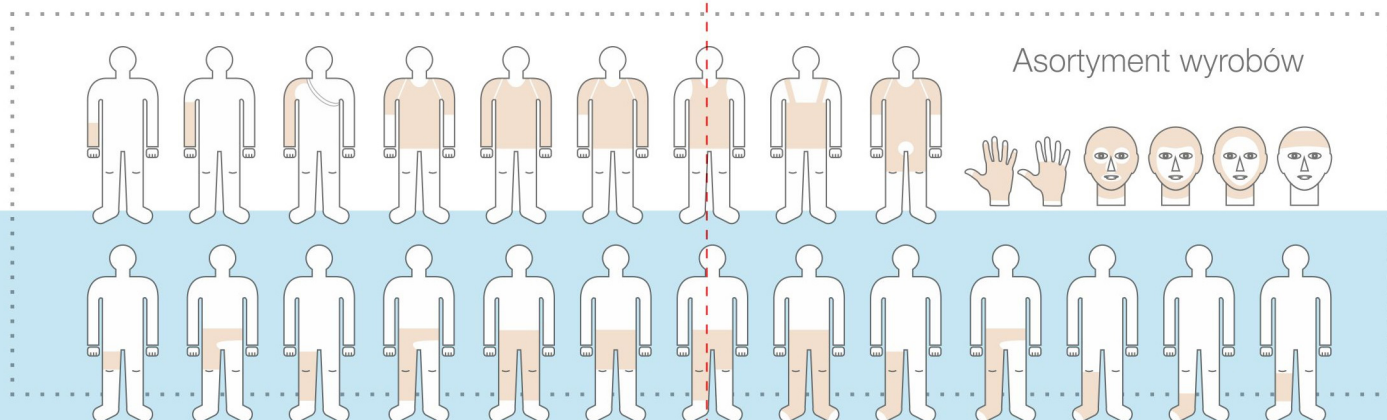

Codopress®

Codopress® PREMIUM

Presoterapia jest techniką prewencyjno-terapeutyczną, która polega na stosowaniu kompresji z wykorzystaniem stałego ucisku w postaci wyrobów uciskowych.

W celu osiągnięcia najlepszych efektów terapii wyroby takie powinny być dopasowane indywidualnie dla każdego Pacjenta (szyte na miarę). W tej metodzie rehabilitacji blizn bardzo ważny jest czas rozpoczęcia terapii uciskowej, dlatego decyzja o jej rozpoczęciu powinna być podjęta tuż po wygojeniu ran. Wyrób uciskowy powinien być noszony przez 22-23 godziny na dobę z przerwami na toaletę ciała, masaż oraz konserwację wyrobu. Proces rehabilitacji i leczenia blizn trwa około 2 lat.

W celu zwiększenia komfortu Pacjenta i skuteczności terapii zaleca się leczenie skojarzone, polegające na łączeniu wyrobów uciskowych Codopress®/Codopress® PREMIUM wraz z opatrunkami silikonowymi Codosil™ ADHESIVE.

Opatrunek silikonowy umieszczony bezpośrednio na bliznie, pod wyrobem uciskowym, działa wygładzająco i zmiękcza na leczone blizny, przez co wspomaga proces rehabilitacji.



opatrunek silikonowy
Codosil™ ADHESIVE




Tricomed SA - ponad 50 lat tradycji

TRICOMED SA to polska firma z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją w projektowaniu i produkcji wyrobów medycznych, głównie biomateriałów (wszczepiennych) oraz opatrunków specjalistycznych. Integralną częścią oferty firmy są wyroby uciskowe stosowane w procesie zapobiegania powstawaniu przerostowych blizn pooparzeniowych i pooperacyjnych oraz opatrunki silikonowe stosowane w terapii skojarzonej.

W 2009 roku firma Tricomed SA uzyskała status Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Wytwarzane w firmie produkty posiadają znak bezpieczeństwa CE zgodnie z obowiązującymi wymaganiami UE, a ich produkcja odbywa się w oparciu o System Zarządzania Jakością ISO 13485.

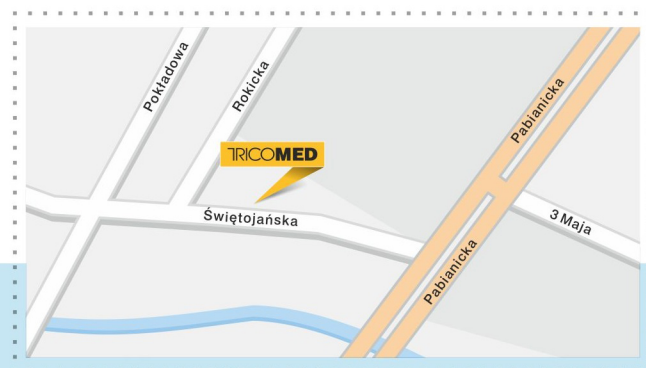

11-MAD-27UL-014/PL/01.2019

TRICOMED SA
ul. Świętojańska 5/9, 93-493 Łódź
codopress@tricomed.com
tel. kom. 723 185 454
tel. (42) 684 78 21

TZMO SA
tzmo-global.com
tricomed.com
matopat.pl
na-rany.pl
codopress.pl