

TRICOMED

biomateriały



Siatki chirurgiczne
Taśmy urologiczne i aplikatory
Protezy kości
Protezy więzadeł i ścięgien
Barwne oznaczniki chirurgiczne



TRICOMED SA

ponad 60 lat tradycji

Firma powstała w 1959 r.; od 1995 r. – spółka akcyjna, obecnie w ramach Grupy TZMO.

W 1961 roku wszczepiono pierwszą polską protezę naczyniową produkcji Tricomed (2 lata po analogicznej operacji w Stanach Zjednoczonych) – pacjent przeżył z nią 45 lat, zmarł w wieku 76 lat.

Jedna z nielicznych w świecie i jedyna w Polsce specjalizująca się w opracowaniu i produkcji wyrobów medycznych klasy III.

Wszystkie wyroby firmy spełniają wymogi bezpieczeństwa i uzyskały znak CE.

Firma posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę, nowoczesne zaplecze badawcze, doświadczenie i współpracuje z autorytetami medycznymi w dziedzinie chirurgii implantacyjnej.

Ma na swym koncie wiele nagród, a wyroby stosowane są w wielu ośrodkach w kraju i za granicą.

Od 6 lipca 2009 roku posiada status Centrum Badawczo–Rozwojowego, a jej naukowa specjalizacja to: protezy kości, siatki chirurgiczne i nowoczesne opatrunki specjalistyczne.

2017 Nagroda jakości od Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Nagroda przyznana dla
TRICOMED SA podczas XXII
Polskiego Dnia Jakości.



Quality International 2020

Złote Godło QI w XIV edycji Programu
Najwyższa Jakość QI w kategorii
Zarządzanie Najwyższej Jakości.



biomateriały

Spis treści:

Siatki chirurgiczne	3
Taśmy urologiczne i aplikatory	17
Protezy kości	21
Protezy więzadeł i ścięgien	27
Barwne oznaczniki chirurgiczne	28



siatki chirurgiczne

Optomesh®

SIATKA CHIRURGICZNA
DO OPERACYJNEGO LECZENIA
PRZEPUKLIN



Nieresorbowalne siatki chirurgiczne wykonane są z monofilamentowej przędzy polipropylenowej. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną, dobrą układalnością, niską masą powierzchniową, niestrzępliwością brzegów oraz wysoką wytrzymałością na wyrwanie szwów.

Oferowane są w dwóch wariantach:

- MACROPORE – lekka siatka o dużych porach,
- THINLIGHT – lekka siatka o standardowej powierzchni porów.

Implanty siatkowe Optomesh® dostępne są w pełnym zakresie rozmiarowym. Wyroby nie zawierają substancji pochodzenia allogenego oraz odzwierzęcego.

W wariantcie MACROPORE zastosowano niebieskie linie orientujące ułatwiające widoczność oraz ułożenie wyrobu w polu operacyjnym.

Dostępne w wersji jałowej (EO).

Zastosowanie:

Zalecane są do zabiegów rekonstrukcyjnych w celu uzupełnienia i/lub wzmocnienia ubytków tkanek miękkich w przypadku wystąpienia następujących przepuklin:

- pierwotnych i nawrotowych,
- pooperacyjnych,
- pachwinowych i udowych,
- okołopępkowych,
- kresy białej,
- o dużych wrotach.

SIATKA CHIRURGICZNA DO OPERACYJNEGO LECZENIA PRZEPUKLIN, JAŁOWA

kod wyrobu	rozmiar (mm)	wariant	opakowanie jednostkowe	opakowanie zbiorcze
MA-271-OPMT-001	50 x 60	T	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMT-002	50 x 100	T	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMT-003	60 x 110	T	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMT-004	65 x 125	T	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMT-005	80 x 80	T	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMT-006	80 x 130	T	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMT-007	100 x 160	T	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMT-008	125 x 200	T	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMT-009	125 x 250	T	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMT-010	150 x 150	T	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMT-011	150 x 200	T	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMT-012	200 x 250	T	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMT-013	200 x 300	T	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMT-014	220 x 350	T	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMT-015	260 x 360	T	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMT-016	300 x 300	T	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMT-021	100 x 100	T	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMT-022	200 x 200	T	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMM-001	50 x 60	M	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMM-002	50 x 100	M	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMM-003	60 x 110	M	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMM-004	65 x 125	M	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMM-005	80 x 80	M	1 szt.	10 op.



siatki chirurgiczne



MA-271-OPMM-006	80 x 130	M	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMM-007	100 x 160	M	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMM-008	125 x 200	M	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMM-009	125 x 250	M	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMM-010	150 x 150	M	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMM-011	150 x 200	M	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMM-012	200 x 250	M	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMM-013	200 x 300	M	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMM-014	220 x 350	M	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMM-015	260 x 360	M	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMM-016	300 x 300	M	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMM-017	100 x 100	M	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMM-018	200 x 200	M	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMT-017	60 x 140	TLI	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMT-019	45 x 100	TLI	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMT-018	60 x 140	TLIK	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMT-020	45 x 100	TLIK	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMM-101	50 x 60	MN	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMM-102	50 x 100	MN	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMM-103	60 x 110	MN	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMM-104	65 x 125	MN	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMM-105	80 x 80	MN	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMM-106	80 x 130	MN	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMM-107	100 x 160	MN	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMM-108	125 x 200	MN	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMM-109	125 x 250	MN	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMM-110	150 x 150	MN	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMM-111	150 x 200	MN	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMM-112	200 x 250	MN	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMM-113	200 x 300	MN	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMM-114	220 x 350	MN	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMM-115	260 x 360	MN	1 szt.	10 op.
MA-271-OPMM-116	300 x 300	MN	1 szt.	10 op.

T – wariant THINLIGHT

M – wariant MACROPORE

LI – do operacji Lichtenstein'a dla mężczyzn (z wycięciem na powrózek nasienny)

LIK – do operacji Lichtenstein'a dla kobiet

MN – wariant MACROPORE z niebieskimi liniami

Zapraszamy na optomesh.pl

Optomesh® ULTRALIGHT

SIATKA CHIRURGICZNA
DO OPERACYJNEGO LECZENIA
PRZEPUKLIN



Nieresorbowalne ultralekkie siatki chirurgiczne Optomesh® ULTRALIGHT wykonane są z zastosowaniem transparentnych oraz niebieskich jednowłókiennych (monofilamentowych) przędzy polipropylenowych.

Wyroby Optomesh® ULTRALIGHT oferowane są w trzech wariantach:

- L-Pore – o bardzo dużych porach (powierzchnia ok. 6 mm²),
- M-Pore – o dużych porach (powierzchnia ok. 4 mm²),
- S-Pore – o małych porach (powierzchnia ok. 1,3 mm²).

Implanty siatkowe Optomesh® ULTRALIGHT dostępne są w pełnym zakresie rozmiarowym, o różnej gramaturze oraz właściwościach mechanicznych, które zostały dostosowane do wielkości wrót przepuklinowych. Siatki nie zawierają substancji pochodzenia allogenego oraz odzwierzęcego.

W wariantach L-Pore oraz S-Pore zastosowano niebieskie linie orientujące ułatwiające widoczność oraz ułożenie wyrobu w polu operacyjnym.

siatki chirurgiczne

Dostępne w wersji jałowej (EO).

Zastosowanie:

Zalecane są do zabiegów rekonstrukcyjnych w celu uzupełnienia i/lub wzmocnienia ubytków tkanek miękkich w przypadku wystąpienia następujących przepuklin:

- pierwotnych i nawrotowych,
- pooperacyjnych,
- pachwinowych i udowych,
- okołopępkowych,
- kresy białej,
- o dużych wrotach.

W zależności od rodzaju przepukliny i jej wielkości można dobrać odpowiedni wariant siatki chirurgicznej:

- **L-Pore** do przepuklin z małym ubytkiem tkanki łącznej (powięziowej) [średnica wrót do 5 cm],
- **M-Pore** do przepuklin małych i średnich [średnica wrót do 10 cm] oraz dużych [średnica wrót powyżej 10 cm],
- **S-Pore** do przepuklin małych i średnich [średnica wrót do 10 cm].

nagroda 2018

Złoty Medal na Międzynarodowych
Targach Wynalazków 2018
w Seulu w Korei Południowej.



Zapraszamy na optomesh.pl

SIATKA CHIRURGICZNA DO OPERACYJNEGO LECZENIA PRZEPUKLIN, JAŁOWA

kod wyrobu	rozmiar (mm)	wariant	opakowanie jednostkowe	opakowanie zbiorcze
MA-271-OPUL-001	50 x 60	L-Pore	3 szt.	15 op.
MA-271-OPUL-006	60 x 110	L-Pore	3 szt.	15 op.
MA-271-OPUL-007	80 x 130	L-Pore	3 szt.	15 op.
MA-271-OPUL-008	75 x 150	L-Pore	3 szt.	18 op.
MA-271-OPUL-011	100 x 150	L-Pore	3 szt.	18 op.
MA-271-OPUL-015	150 x 150	L-Pore	3 szt.	18 op.
MA-271-OPUL-016	125 x 200	L-Pore	3 szt.	18 op.
MA-271-OPUL-019	200 x 300	L-Pore	3 szt.	7 op.
MA-271-OPUL-021	300 x 300	L-Pore	3 szt.	7 op.
MA-271-OPUM-001	50 x 60	M-Pore	3 szt.	15 op.
MA-271-OPUM-006	60 x 110	M-Pore	3 szt.	15 op.
MA-271-OPUM-007	80 x 130	M-Pore	3 szt.	15 op.
MA-271-OPUM-008	75 x 150	M-Pore	3 szt.	18 op.
MA-271-OPUM-011	100 x 150	M-Pore	3 szt.	18 op.
MA-271-OPUM-015	150 x 150	M-Pore	3 szt.	18 op.
MA-271-OPUM-016	125 x 200	M-Pore	3 szt.	18 op.
MA-271-OPUM-019	200 x 300	M-Pore	3 szt.	7 op.
MA-271-OPUM-021	300 x 300	M-Pore	3 szt.	7 op.
MA-271-OPUS-001	50 x 60	S-Pore	3 szt.	15 op.
MA-271-OPUS-006	60 x 110	S-Pore	3 szt.	15 op.
MA-271-OPUS-007	80 x 130	S-Pore	3 szt.	15 op.
MA-271-OPUS-008	75 x 150	S-Pore	3 szt.	18 op.
MA-271-OPUS-011	100 x 150	S-Pore	3 szt.	18 op.
MA-271-OPUS-015	150 x 150	S-Pore	3 szt.	18 op.
MA-271-OPUS-016	125 x 200	S-Pore	3 szt.	18 op.
MA-271-OPUS-019	200 x 300	S-Pore	3 szt.	7 op.
MA-271-OPUS-021	300 x 300	S-Pore	3 szt.	7 op.
MA-271-OPUL-002	20 x 80	L-Pore	1 szt.	10 op.
MA-271-OPUL-003	20 x 100	L-Pore	1 szt.	10 op.
MA-271-OPUL-004	60 x 90	L-Pore	1 szt.	10 op.
MA-271-OPUL-005	50 x 120	L-Pore	1 szt.	10 op.
MA-271-OPUL-009	90 x 130	L-Pore	1 szt.	10 op.
MA-271-OPUL-010	80 x 150	L-Pore	1 szt.	10 op.
MA-271-OPUL-012	50 x 300	L-Pore	1 szt.	10 op.



siatki chirurgiczne




MA-271-OPUL-013	60 x 300	L-Pore	1 szt.	10 op.
MA-271-OPUL-014	120 x 170	L-Pore	1 szt.	10 op.
MA-271-OPUL-017	150 x 250	L-Pore	1 szt.	10 op.
MA-271-OPUL-018	150 x 300	L-Pore	1 szt.	10 op.
MA-271-OPUL-020	250 x 250	L-Pore	1 szt.	10 op.
MA-271-OPUL-022	350 x 300	L-Pore	1 szt.	10 op.
MA-271-OPUL-023	300 x 450	L-Pore	1 szt.	10 op.
MA-271-OPUM-002	20 x 80	M-Pore	1 szt.	10 op.
MA-271-OPUM-003	20 x 100	M-Pore	1 szt.	10 op.
MA-271-OPUM-004	60 x 90	M-Pore	1 szt.	10 op.
MA-271-OPUM-005	50 x 120	M-Pore	1 szt.	10 op.
MA-271-OPUM-009	90 x 130	M-Pore	1 szt.	10 op.
MA-271-OPUM-010	80 x 150	M-Pore	1 szt.	10 op.
MA-271-OPUM-012	50 x 300	M-Pore	1 szt.	10 op.
MA-271-OPUM-013	60 x 300	M-Pore	1 szt.	10 op.
MA-271-OPUM-014	120 x 170	M-Pore	1 szt.	10 op.
MA-271-OPUM-017	150 x 250	M-Pore	1 szt.	10 op.
MA-271-OPUM-018	150 x 300	M-Pore	1 szt.	10 op.
MA-271-OPUM-020	250 x 250	M-Pore	1 szt.	10 op.
MA-271-OPUM-022	350 x 300	M-Pore	1 szt.	10 op.
MA-271-OPUM-023	300 x 450	M-Pore	1 szt.	10 op.
MA-271-OPUS-002	20 x 80	S-Pore	1 szt.	10 op.
MA-271-OPUS-003	20 x 100	S-pore	1 szt.	10 op.
MA-271-OPUS-004	60 x 90	S-Pore	1 szt.	10 op.
MA-271-OPUS-005	50 x 120	S-Pore	1 szt.	10 op.
MA-271-OPUS-009	90 x 130	S-Pore	1 szt.	10 op.
MA-271-OPUS-010	80 x 150	S-Pore	1 szt.	10 op.
MA-271-OPUS-012	50 x 300	S-Pore	1 szt.	10 op.
MA-271-OPUS-013	60 x 300	S-Pore	1 szt.	10 op.
MA-271-OPUS-014	120 x 170	S-Pore	1 szt.	10 op.
MA-271-OPUS-017	150 x 250	S-Pore	1 szt.	10 op.
MA-271-OPUS-018	150 x 300	S-Pore	1 szt.	10 op.
MA-271-OPUS-020	250 x 250	S-Pore	1 szt.	10 op.
MA-271-OPUS-022	350 x 300	S-Pore	1 szt.	10 op.
MA-271-OPUS-023	300 x 450	S-Pore	1 szt.	10 op.

Inne rozmiary dostępne na zamówienie.

Optomesh® SUPERULTRALIGHT

SIATKA CHIRURGICZNA
DO OPERACYJNEGO LECZENIA
PRZEPUKLIN

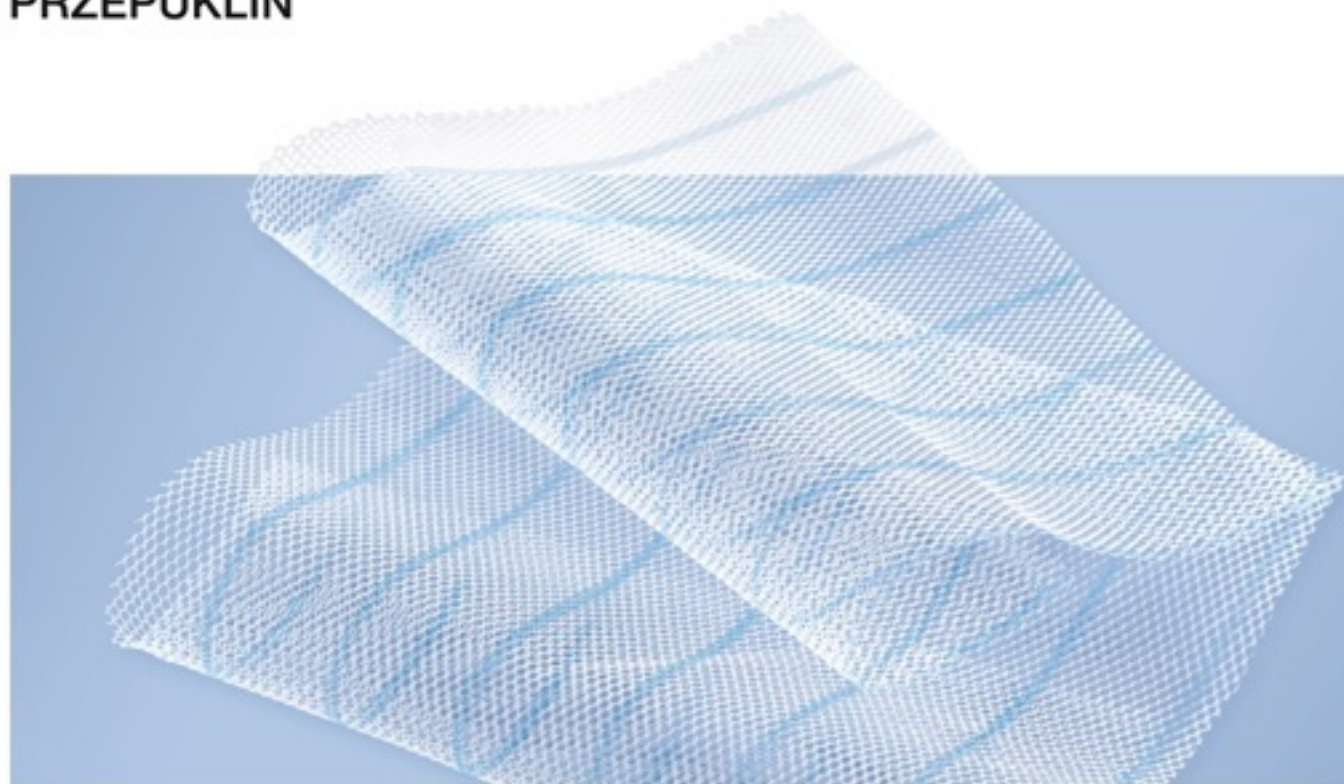

Nieresorbowalne ultralekkie siatki chirurgiczne Optomesh® SUPERULTRALIGHT wykonane są z zastosowaniem transparentnych oraz niebieskich, jednowłókiennych (monofilamentowych) przędzy polipropylenowych.

Implanty siatkowe Optomesh® SUPERULTRALIGHT dostępne są w pełnym zakresie rozmiarowym, nie zawierają substancji pochodzenia allogenego oraz odzwierzęcego.

W wyrobie zastosowano niebieskie linie orientujące ułatwiające widoczność oraz ułożenie w polu operacyjnym.

Dostępne w wersji jałowej (EO).

Zastosowanie:

Zalecane są do zabiegów rekonstrukcyjnych w celu uzupełnienia i/lub wzmocnienia ubytków tkanek miękkich w przypadku wystąpienia następujących przepuklin:

- pierwotnych i nawrotowych,
- pooperacyjnych,
- pachwinowych i udowych,
- okołopępkowych.

Optomesh® SUPERULTRALIGHT zaleca się stosować do zaopatrywania przepuklin z małym ubytkiem tkanki łącznej (powięziowej) – średnica wrót do 5 cm.

siatki chirurgiczne

SIATKA CHIRURGICZNA DO OPERACYJNEGO LECZENIA PRZEPUKLIN, JAŁOWA

kod wyrobu	rozmiar (mm)	opakowanie jednostkowe	opakowanie zbiorcze
MA-271-OPSL-001	50 x 60	1 szt.	10 op.
MA-271-OPSL-002	50 x 100	1 szt.	10 op.
MA-271-OPSL-003	60 x 110	1 szt.	10 op.
MA-271-OPSL-004	65 x 125	1 szt.	10 op.
MA-271-OPSL-005	80 x 80	1 szt.	10 op.
MA-271-OPSL-006	80 x 130	1 szt.	10 op.
MA-271-OPSL-007	100 x 100	1 szt.	10 op.
MA-271-OPSL-008	100 x 160	1 szt.	10 op.
MA-271-OPSL-009	125 x 200	1 szt.	10 op.
MA-271-OPSL-010	150 x 200	1 szt.	10 op.
MA-271-OPSL-011	150 x 150	1 szt.	10 op.
MA-271-OPSL-012	200 x 200	1 szt.	10 op.

Tricobelt

PAS PRZEPUKLINOWY BRZUSZNY

Wyrób dzięki swej konstrukcji wspomaga mięśnie brzucha w czasie codziennej aktywności, zapobiegając tworzeniu się przepuklin pooperacyjnych, a także powiększaniu już istniejących przepuklin brzusznych.

Wyrób zalecany jest do stosowania po operacjach jamy brzusznej, w zaopatrywaniu już istniejących przepuklin, w codziennej aktywności wspomagając mięśnie brzucha w czasie wysiłku fizycznego, w przebiegu chorób zwyrodnieniowych i zapalnych odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

PAS PRZEPUKLINOWY BRZUSZNY, NIEJAŁOWY

kod wyrobu	rozmiar	wariant	opakowanie jednostkowe	opakowanie zbiorcze
MA-152-TB24-00S	S	24 cm	1 szt.	7 op.
MA-152-TB24-00M	M	24 cm	1 szt.	7 op.
MA-152-TB24-00L	L	24 cm	1 szt.	7 op.
MA-152-TB24-0XL	XL	24 cm	1 szt.	7 op.
MA-152-TB24-2XL	XXL	24 cm	1 szt.	7 op.
MA-152-TB20-00S	S	20 cm	1 szt.	7 op.
MA-152-TB20-00M	M	20 cm	1 szt.	7 op.
MA-152-TB20-00L	L	20 cm	1 szt.	7 op.
MA-152-TB20-0XL	XL	20 cm	1 szt.	7 op.
MA-152-TB20-2XL	XXL	20 cm	1 szt.	7 op.

Optomesh® 3D • Optomesh® 3D ILAM

SIATKA CHIRURGICZNA
DO OPERACYJNEGO LECZENIA
PRZEPUKLIN PACHWINOWYCH



Nieresorbowalne siatki chirurgiczne Optomesh® 3D to wyroby o przestrzennej konstrukcji, wykonane z zastosowaniem transparentnych oraz niebieskich, jednowłókienkowych (monofilamentowych) przędz polipropylenowych.

Wyrób oferowany jest w czterech wariantach:

- Prawa, rozmiar S/M,
- Prawa, rozmiar L,
- Lewa, rozmiar S/M,
- Lewa, rozmiar L.

Zapraszamy na optomesh.pl

siatki chirurgiczne

Implanty Optomesh® 3D posiadają znacznik ułatwiający implantację siatki, wykonany z niebieskiej przędzy polipropylenowej. Wyroby Optomesh® 3D nie zawierają substancji pochodzenia allogenego oraz odzwierzęcego.

Oferujemy także siatkę chirurgiczną o przestrzennej konstrukcji Optomesh® 3D ILAM, dostosowaną do anatomii pacjenta. Optomesh® 3D ILAM to innowacyjny wyrób chirurgiczny opracowany na podstawie tomografii komputerowej, co pozwala na dobór idealnego kształtu dopasowanego do struktur anatomicznych pachwiny danego pacjenta.

Dostępne w wersji jałowej (EO).

Zastosowanie:

Zalecane są do zabiegów rekonstrukcyjnych w celu uzupełnienia i/lub wzmocnienia ubytków tkanek miękkich w przypadku wystąpienia przepuklin pachwinowych zarówno pierwotnych jak i nawrotowych.

SIATKA CHIRURGICZNA DO OPERACYJNEGO LECZENIA PRZEPUKLIN PACHWINOWYCH, JAŁOWA

kod wyrobu	wariant	opakowanie jednostkowe	opakowanie zbiorcze
MA-271-OP3D-001	Prawa, rozmiar S/M	1 szt.	10 op.
MA-271-OP3D-002	Prawa, rozmiar L	1 szt.	10 op.
MA-271-OP3D-003	Lewa, rozmiar S/M	1 szt.	10 op.
MA-271-OP3D-004	Lewa, rozmiar L	1 szt.	10 op.
MA-271-OP3D-005	Prawa, dostosowana do pacjenta	1 szt.	-
MA-271-OP3D-006	Lewa, dostosowana do pacjenta	1 szt.	-

Zapraszamy na pierwszanaswiecie.pl

Optomesh® STOMA

SIATKA CHIRURGICZNA
DO OPERACYJNEGO LECZENIA
PRZEPUKLIN OKOŁOSTOMIJNYCH



Nieresorbowalne siatki chirurgiczne Optomesh® STOMA wykonane są z zastosowaniem transparentnych oraz niebieskich, jednowłókiennych (monofilamentowych) przędz polipropylenowych. Wyrób dostępny jest w jednym rozmiarze 195 mm x 195 mm, przy czym dopuszcza się modyfikowanie wymiarów przez chirurga podczas implantacji, w celu dopasowania kształtu do indywidualnej anatomii pacjenta. Implant nie zawiera substancji pochodzenia allogenego oraz odzwierzęcego. W wyrobie zastosowano niebieskie linie orientujące ułatwiające widoczność oraz ułożenie w polu operacyjnym.

Dostępne w wersji jałowej (EO).

Zastosowanie:

Zalecane są do stosowania podczas chirurgicznego leczenia przyczynowego lub zapobiegawczego występowania przepuklin okołostomijnych.

SIATKA CHIRURGICZNA DO OPERACYJNEGO LECZENIA
PRZEPUKLIN OKOŁOSTOMIJNYCH, **JAŁOWA**

kod wyrobu	rozmiar (mm)	opakowanie jednostkowe	opakowanie zbiorcze
MA-271-OPST-001	195 x 195	1 szt.	10 op.

siatki chirurgiczne

G-Mesh®

SIATKA GINEKOLOGICZNA
DO CHIRURGICZNEGO LECZENIA
OBNIŻENIA NARZĄDU RODNEGO



Nieresorbowalne siatki ginekologiczne wykonane są z zastosowaniem transparentnych oraz niebieskich, jednowłókiennych (monofilamentowych) przędz polipropylenowych. Na końcach ramion wyrób posiada wypustki ułatwiające przełożenie ich przez otwory w aplikatorze. Implant nie zawiera substancji pochodzenia allogennego oraz odzwierzęcego.

Wyrób G-Mesh® jest oferowany w trzech wariantach:




- Typ Posterior 2 – siatka dwuramienna,
- Typ Anterior 4 – siatka czteroramienna,
- Typ Posterior 6 – siatka sześcioramienna.

Dostępne w wersji jałowej (EO).

Zastosowanie:

Stosowane do zabiegów chirurgii rekonstrukcyjnej leczenia obniżenia narządu rodne (Pelvic Organ Prolapse, POP). Decyzję odnośnie metody implantacji podejmuje lekarz specjalista, wskazuje się jednak, aby pacjentki z objawami:

- rectocele, enterocele zaopatrywane były wariantem Posterior 2 lub Posterior 6,
- cystocele zaopatrywane były wariantem Anterior 4,
- obniżenia macicy lub sklepienia pochwy po histerektomii zaopatrywane były wariantem Posterior 6.

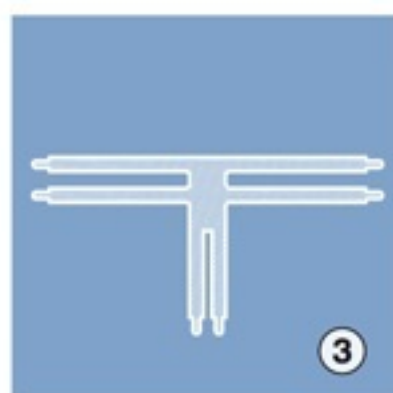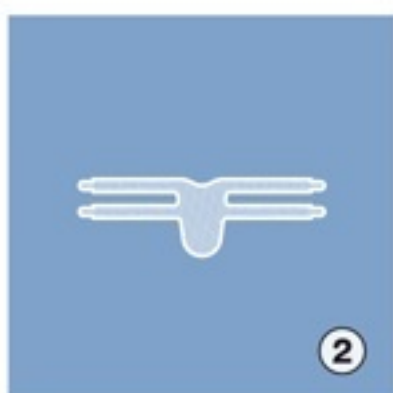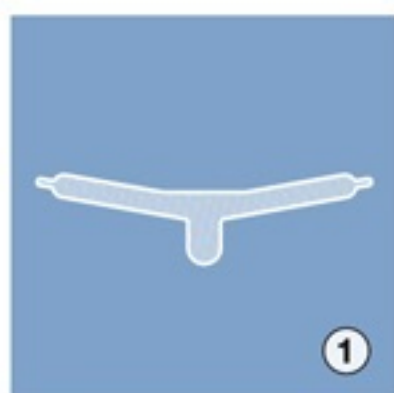

SIATKA GINEKOLOGICZNA DO CHIRURGICZNEGO LECZENIA OBNIŻENIA NARZĄDU RODNEGO, **JAŁOWA**

	kod wyrobu	wariant	opakowanie jednostkowe	opakowanie zbiorcze
①	MA-271-GMP2-001	Posterior 2	1 szt.	20 op.
②	MA-271-GMA4-001	Anterior 4	1 szt.	10 op.
③	MA-271-GMP6-001	Posterior 6	1 szt.	10 op.

nagroda 2019

Siatki ginekologiczne G-Mesh® zostały nagrodzone złotym medalem podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków PRO INVENT 2019 w Rumunii.



taśmy urologiczne

Dallop® NM ULTRALIGHT • Dallop® NM

TAŚMA UROLOGICZNA
DO CHIRURGICZNEGO
LECZENIA NIETRZYMANIA MOCZU



Zapraszamy na dallop-nm.pl

Nieresorbowalne, chirurgiczne taśmy urologiczne wykonane są z zastosowaniem jednowłókienkowej (monofilamentowej) przędzy polipropylenowej, w kolorze transparentnym (Dallop® NM) oraz w kolorze transparentnym i niebieskim (Dallop® NM ULTRALIGHT). W wyrobie Dallop® NM ULTRALIGHT zastosowano niebieską linię wzdłuż wyrobu, która ułatwia widoczność w polu operacyjnym oraz umożliwia jego identyfikację w przypadku konieczności poprawy napięcia.

Wyroby zaopatrzone są w niebieskie uchwyty ułatwiające mocowanie wyrobu w aplikatorze. Wyroby nie zawierają substancji pochodzenia allogenego oraz odzwierzęcego.

Dostępne w wersji jałowej (EO).

Zastosowanie:

Zalecane są do stosowania podczas zabiegów chirurgicznych leczenia Wysiłkowego Nietrzymania Moczu (WNM). Wyroby przeznaczone są do implantacji następującymi metodami:

- Tension-Free Vaginal Tape (TVT),
- Trans Obturator Tape (TOT),
- Tension-Free Vaginal Tape-Obturator (TVT-O).

TAŚMA UROLOGICZNA DO CHIRURGICZNEGO LECZENIA NIETRZYMANIA MOCZU DALLOP® NM ULTRALIGHT, JAŁOWA

kod wyrobu	rozmiar (mm)	opakowanie jednostkowe	opakowanie zbiorcze
MA-271-TNMU-001	300	1 szt.	5 op.
MA-271-TNMU-002	450	1 szt.	5 op.

TAŚMA UROLOGICZNA DO CHIRURGICZNEGO LECZENIA NIETRZYMANIA MOCZU DALLOP® NM, JAŁOWA

kod wyrobu	rozmiar (mm)	opakowanie jednostkowe	opakowanie zbiorcze
MA-271-TNMS-004	450	1 szt.	5 op.
MA-271-TNMS-003	600	1 szt.	5 op.

APLIKATORY

NARZĘDZIA POMOCNICZE
W CHIRURGICZNYM LECZENIU
NIETRZYMANIA MOCZU



Zapraszamy na dallop-nm.pl

Aplikatory to niesterylne narzędzia chirurgiczne wielokrotnego użytku, wykonane ze stali nierdzewnej, martenzytycznej, spełniające wymagania norm dotyczących narzędzi chirurgicznych.

Zastosowanie:

Stosowane w chirurgicznym leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet z uwzględnieniem metody zastosowanej przez specjalistę:

- ① Aplikator TVT to narzędzie pomocnicze wykorzystywane w metodzie TVT (Tension-Free Vaginal Tape),
- ② Aplikator TOT to narzędzie pomocnicze wykorzystywane w metodzie TOT (Trans Obturator Tape),
- ③ Zestaw aplikatorów TOT składa się z dwóch aplikatorów stanowiących swoje odbicie lustrzane. Jest on przeznaczony do wykorzystania w metodzie TOT (Trans Obturator Tape),
- ④ Zestaw aplikatorów TOT składa się z dwóch aplikatorów stanowiących swoje lustrzane odbicie. Jest on przeznaczony do wykorzystania w metodzie TOT „outside-in” (Trans Obturator Tape).

UWAGA

Aplikatory są wyrobami wielokrotnego użytku dostarczonymi do sprzedaży w stanie niejałowym. Przed pierwszym oraz każdym następnym użyciem wyrobu należy poddać go czyszczeniu i sterylizacji zwalidowanymi metodami wg stosowych instrukcji.

NARZĘDZIA POMOCNICZE W CHIRURGICZNYM LECZENIU NIETRZYMANIA MOCZU, **NIEJAŁOWE**

	kod wyrobu	dla metody	opakowanie jednostkowe	opakowanie zbiorcze
①	MA-292-XTVT-001	TVT	1 szt.	5 op.
②	MA-292-XTOT-001	TOT	1 szt.	5 op.
③	MA-292-ZTOT-003	zestaw TOT	2 szt.	5 op.
④	MA-292-ZTOT-004	zestaw TOT	2 szt.	5 op.

Codubix® • Codubix® S

PROTEZA KOŚCI CZASZKI



Proteza kości sklepienia czaszki wykonana jest techniką dziania z przędzy polipropylenowej i poliestrowej. Dzięki zdolności do odkształcania nie ulega uszkodzeniom mechanicznym pod wpływem działania sił zewnętrznych. Duża wytrzymałość, niska masa właściwa, prawie całkowity brak absorpcji cieczy oraz płynów fizjologicznych, nietoksyczność, dobry stopień wgajania oraz brak cieniowania dla promieni rentgenowskich powodują, że protezę można identyfikować pod względem właściwości fizycznych z naturalną kością czaszki.

Zastosowanie:

Dziane protezy kości czaszki Codubix®, Codubix® S przeznaczone są do wypełnienia ubytku kości w pokrywie czaszki.

Dostępne w wersji jałowej (STEAM) i niejłowej

W każdym przypadku należy stosować odpowiednią instrukcję użycia.

Do kraniotomii proponujemy również jałowe zestawy operacyjne:

- MB-136-ZOL2-005 • MB-136-ZOL3-003 • MB-136-ZOL3-011

PROTEZA KOŚCI CZASZKI CODUBIX® S, JAŁOWA

kod wyrobu	długość (mm)	szerokość (mm)	opakowanie jednostkowe	opakowanie zbiorcze
MA-272-KOCZ-S01	130	125	1 szt.	5 op.
MA-272-KOCZ-S02	134	110	1 szt.	5 op.
MA-272-KOCZ-S04	105	60	1 szt.	5 op.
MA-272-KOCZ-S05	75	75	1 szt.	5 op.
MA-272-KOCZ-S06	75	57	1 szt.	5 op.

PROTEZA KOŚCI CZASZKI CODUBIX®, NIEJAŁOWA

kod wyrobu	długość (mm)	szerokość (mm)	opakowanie jednostkowe	opakowanie zbiorcze
MA-272-KOCZ-001	134	110	1 szt.	5 op.
MA-272-KOCZ-002	130	125	1 szt.	5 op.
MA-272-KOCZ-004	105	60	1 szt.	5 op.
MA-272-KOCZ-005	75	75	1 szt.	5 op.
MA-272-KOCZ-006	75	57	1 szt.	5 op.

Oferujemy także protezę kości sklepienia czaszki dostosowaną do anatomii pacjenta, wykonaną na podstawie analizy danych obrazowych uzyskanych w badaniu tomografem komputerowym (CT), przez specjalnie do tego celu opracowane oprogramowanie. Analiza obrazów uzyskanych metodami tomografii komputerowej oraz modelowanie komputerowe pozwalają na przygotowanie matrycy do kształtowania protezy czaszkowej Codubix® (CT) i Codubix® S (CT).

Implantacja protezy dostosowanej do pacjenta poprawia komfort pracy chirurga, redukuje czas operacji i utratę krwi, co wpływa na bezpieczeństwo stosowania wyrobu. Jednocześnie proteza zapewnia optymalny efekt kosmetyczny. Zastosowanie modelowania komputerowego pozwala na przygotowanie protezy czaszkowej indywidualnie dopasowanej do kształtu głowy pacjenta.

PROTEZA KOŚCI CZASZKI CODUBIX® S (CT), JAŁOWA

kod wyrobu	wariant	opakowanie jednostkowe
MA-272-KOCZ-SCT	dostosowana	1 szt.
MA-272-KOCZ-S1C	<50 cm ²	1 szt.
MA-272-KOCZ-S2C	50-120 cm ²	1 szt.
MA-272-KOCZ-S3C	>120 cm ²	1 szt.
MA-272-KOCZ-S4C	dostosowane	2 szt.

PROTEZA KOŚCI CZASZKI CODUBIX® (CT), NIEJAŁOWA

kod wyrobu	wariant	opakowanie jednostkowe
MA-272-KOCZ-0CT	dostosowana	1 szt.
MA-272-KOCZ-1CT	<50 cm ²	1 szt.
MA-272-KOCZ-2CT	50-120 cm ²	1 szt.
MA-272-KOCZ-3CT	>120 cm ²	1 szt.
MA-272-KOCZ-4CT	dostosowane	2 szt.

Codubix® OCZODÓŁ

PROTEZA KOŚCI OCZODOŁU



Proteza kości oczodołu wykonana jest techniką dziania z przędzy polipropylenowej. Wysoka wytrzymałość, niski ciężar właściwy, hydrofobowość przyczyniająca się do braku absorpcji cieczy oraz płynów fizjologicznych, nietoksyczność, brak aktywności chemicznej, powodują, że protezę kości oczodołu można identyfikować pod względem właściwości fizycznych z naturalną kością. Proteza Codubix® OCZODÓŁ łatwo poddaje się modelowaniu w czasie implantacji oraz umożliwia diagnostykę nie dając artefaktów.

Zastosowanie:

Przeznaczone są do wypełnienia ubytków kości oczodołu (złamania jarzmowo – szczękowo – oczodołowe, złamania izolowane dna oczodołu) powstałych w wyniku złamań środkowej twarzowej części czaszki po urazach oraz z powodu innych przyczyn.

Dostępne w wersji jałowej (STEAM).

PROTEZA KOŚCI OCZODOŁU, JAŁOWA

kod wyrobu	rozmiar (cm)	opakowanie jednostkowe	opakowanie zbiorcze
MA-272-COKO-S01	4 x 5	1 szt.	5 op.

Codubix® OCZODÓŁ 3D

PROTEZA KOŚCI
OCZODOŁU



Proteza Codubix® OCZODÓŁ 3D ma anatomiczny kształt i jest dostępna w wersji prawo- i lewostronnej, każda z nich w trzech rozmiarach. Protezy oferujemy także w zestawach.

Dostępne w wersji jałowej (STEAM).

PROTEZA KOŚCI OCZODOŁU, JAŁOWA

kod wyrobu	rozmiar	opakowanie jednostkowe	opakowanie zbiorcze
MA-272-COKO-SLS	lewa S	1 szt.	5 op.
MA-272-COKO-SLM	lewa M	1 szt.	5 op.
MA-272-COKO-SLL	lewa L	1 szt.	5 op.
MA-272-COKO-SPS	prawa S	1 szt.	5 op.
MA-272-COKO-SPM	prawa M	1 szt.	5 op.
MA-272-COKO-SPL	prawa L	1 szt.	5 op.
MA-272-COKO-SLZ	lewa S, M, L	3 szt.	5 op.
MA-272-COKO-SPZ	prawa S, M, L	3 szt.	5 op.

Oferujemy protezy kości oczodołu dostosowane do anatomii pacjenta, odzwierciedlające kształt ubytku: MA-272-COKO-SCT

Codubix® ŻEBRA • Codubix® S ŻEBRA

PROTEZA DO WYPEŁNIANIA UBYTKÓW
W ŚCIANIE KLATKI PIERSIOWEJ



Protezy rozległych ubytków w ścianie klatki piersiowej wykonane są techniką dziania z przędzy poliestrowej i polipropylenowej. Protezy cechuje wysoka wytrzymałość, niski ciężar właściwy, hydrofobowość przyczyniająca się do braku absorpcji cieczy oraz płynów fizjologicznych, nietoksyczność, brak aktywności chemicznej oraz dobry stopień wgajania. Wyroby łatwo poddają się modelowaniu w czasie implantacji oraz umożliwiają diagnostykę, nie dając artefaktów.

Zastosowanie:

Przeznaczone są do wypełnienia fragmentów ściany klatki piersiowej po leczeniu pierwotnych i przerzutowych nowotworów obejmujących tę strukturę oraz naciekających ją niedrobnokomórkowych nowotworów płuc.

Dostępne w wersji jałowej (STEAM) i niejaoowej.

W każdym przypadku należy stosować odpowiednią instrukcję użycia.

PROTEZA DO WYPEŁNIANIA UBYTKÓW W ŚCIANIE KLATKI PIERSIOWEJ, CODUBIX® S ŻEBRA, **JAŁOWA**

kod wyrobu	rozmiar (mm)	wariant	opakowanie jednostkowe	opakowanie zbiorcze
MA-272-KOCZ-S01	250 x 20	Ż	1 szt.	10 op.
MA-272-KOCZ-S02	250 x 200	Ż	1 szt.	10 op.
MA-272-KOCZ-S03	250 x 65	Ż	1 szt.	10 op.
MA-272-KOCZ-S04	200 x 125	Ż	1 szt.	10 op.
MA-272-KOCZ-S05	31 x 63 x 53	M	1 szt.	5 op.
MA-272-KOCZ-S06	30 x 76 x 70	M	1 szt.	5 op.
MA-272-KOCZ-S07	42 x 91 x 81	M	1 szt.	5 op.
MA-272-KOCZ-S08	28 x 44 x 93	M	1 szt.	5 op.
MA-272-KOCZ-S09	30 x 60 x 117	M	1 szt.	5 op.
MA-272-KOCZ-S10	34 x 71 x 130	M	1 szt.	5 op.
MA-272-KOCZ-S11	42 x 79 x 133	M	1 szt.	5 op.
MA-272-KOCZ-S12	37 x 89 x 161	M	1 szt.	5 op.

Ż – proteza żeber, M – proteza mostka

PROTEZA DO WYPEŁNIANIA UBYTKÓW W ŚCIANIE KLATKI PIERSIOWEJ, CODUBIX® ŻEBRA, **NIEJAŁOWA**

kod wyrobu	długość (mm)	szerokość (mm)	opakowanie jednostkowe	opakowanie zbiorcze
MA-272-KOZE-001	250	20	1 szt.	5 op.
MA-272-KOZE-002	250	200	1 szt.	5 op.

protezy więzadeł i ścięgien

Dallos®

PROTEZA WIĘZADEŁ I ŚCIĘGIEN



Proteza Dallos® wytwarzana jest techniką dziania z przędzy poliestrowej. Proteza więzadeł i ścięgien Dallos® nie wywołuje odczynów zapalnych, w krótkim okresie łatwo wgaja się w tkankach. Możliwe jest jej zespolenie z tkankami, jest podatna na zginanie. Wykazuje wysoką wytrzymałość mechaniczną w stosunku do minimalnej ilości użytego materiału. Ułatwia również wprowadzenie wczesnej, intensywnej rehabilitacji.

Zastosowanie:

- w rekonstrukcji rozerwanych więzadeł, np. kruczo-obończykowych i obończykowo-barkowych oraz więzadeł krzyżowych i pobocznych stawu kolanowego,
- w plastyce ścięgien o małej przesuwalności,
- przednie tenodezy stawu skokowego w stopie porażennej opadającej.

Dostępne w wersji jałowej (R).

PROTEZA WIĘZADEŁ I ŚCIĘGIEN, JAŁOWA

kod wyrobu	długość (mm)	szerokość (mm)	opakowanie jednostkowe	opakowanie zbiorcze
MA-272-PRDA-164	900	1	1 szt.	5 op.
MA-272-PRDA-165	900	2	1 szt.	5 op.
MA-272-PRDA-166	900	3	1 szt.	5 op.
MA-272-PRDA-220	900	4	1 szt.	5 op.
MA-272-PRDA-168	900	5	1 szt.	5 op.

barwne oznaczniki chirurgiczne

Codoloops®

BARWNE OZNACZNIKI CHIRURGICZNE



Barwne oznaczniki chirurgiczne służą do podtrzymania narządów wypreparowanych w czasie operacji. Wytwarzane są z włókien poliestrowych techniką dziania w formie pasm o krawędziach bocznych zwiniętych do wewnątrz. Właściwości splotu ograniczają strzępliwość w miejscach przecięć. Barwne oznaczniki Codoloops® są produkowane w trzech szerokościach i czterech kolorach: białym, żółtym, czerwonym i niebieskim.

Zastosowanie:

Zaleca się stosować do odciągania i podtrzymania:

- czerwone – tętnic,
- niebieskie – żył,
- żółte – przewodów moczowych,
- białe – nerwów.

Dostępne w wersji jałowej (R).

barwne oznaczniki chirurgiczne

BARWNE OZNACZNIKI CHIRURGICZNE, JAŁOWE

kod wyrobu	wariant	dł. w stanie swobodnym (mm)	opakowanie jednostkowe	opakowanie zbiorcze
MA-274-CR2B-001	niebieski	2 x 900	10 szt.	5 op.
MA-274-CR2R-001	czerwony	2 x 900	10 szt.	5 op.
MA-274-CR2W-001	biały	2 x 900	10 szt.	5 op.
MA-274-CR2Y-001	żółty	2 x 900	10 szt.	5 op.
MA-274-CR3B-001	niebieski	3 x 900	10 szt.	5 op.
MA-274-CR3R-001	czerwony	3 x 900	10 szt.	5 op.
MA-274-CR3W-001	biały	3 x 900	10 szt.	5 op.
MA-274-CR3Y-001	żółty	3 x 900	10 szt.	5 op.
MA-274-CR4B-001	niebieski	4 x 900	10 szt.	5 op.
MA-274-CR4R-001	czerwony	4 x 900	10 szt.	5 op.
MA-274-CR4W-001	biały	4 x 900	10 szt.	5 op.
MA-274-CR4Y-001	żółty	4 x 900	10 szt.	5 op.

"Łódzkie Eureka" 2018



Nagroda w kategorii "technika"
dla następujących wyrobów:
Optomesh ULTRALIGHT,
Dallop NM ULTRALIGHT
oraz siatki ginekologiczne G-Mesh.



TRICOMED



11-MAD-27UL-013/PL/04.2022



 **TZMO SA**
| matopat.pl
| tricomed.pl

