



## Łatwe wyjmowanie dyspensera



1. Specjalny nadruk w rogu kartonu zbiorczego wskazuje miejsce klejenia kartonu, które jednocześnie jest najlepszym miejscem do rozerwania boku.



2. Należy rozwarstwić klejenie we wskazanym miejscu.



3. Oderwanie przedniej ścianki kartonu zbiorczego umożliwia pewne złapanie i wyjęcie dyspensera.



4. Dyspenser można umieścić na półce w magazynku. Pozwala on na dodatkowe zabezpieczenie przed zabrudzeniem wyrobów znajdujących się wewnątrz aż do momentu ich użycia na bloku operacyjnym. Opakowanie z kodem kreskowym EAN 128 ułatwia kierowanie procesem logistycznym, lepszą gospodarkę magazynową oraz łatwą identyfikację zawartości dzięki etykietce na froncie.



5. Dyspenser jest opakowaniem wielokrotnego zamykania ze specjalną klapką i otworem dozującym. Można go łatwo otwierać przy pomocy uchwyty, dzięki czemu można łatwo i szybko wyjąć sterylny wyrób z opakowania.



- 6.